


Obsidian® ASG brugsanvisning

FORSEGLING | HELING | REGENERATION


Den korrekte rækkefølge af anvendelsen af Obsidian® ASG vises i nedenstående trin.




Trin 1
Resektion af colon med stapler eller anden standardiseret, kirurgisk procedure.

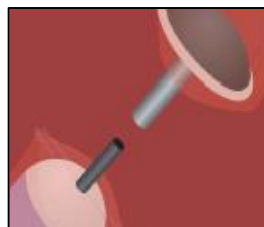


Trin 2
Efter vellykket placering af ambolten og indføring af den cirkulære stapler forbindes de to dele.

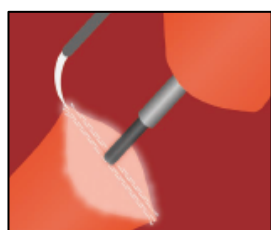


Trin 3
Kontroller den proximale colons placering, og anvend mindst 2 ml Obsidian® ASG på hele den distale colonstumps overflade.
Vigtigt: Specielt skal de ydre kanter dækkes.

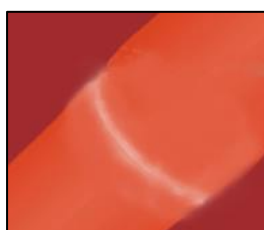

Trin 4
Stapleren lukkes og udløses iht. producentens anvisninger og trækkes forsigtigt tilbage gennem anus.

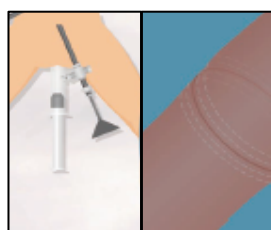


Trin 5
Anastomosens lufttæthed kontrolleres med en "bobbeltest - vand og luft" eller med et kontrastmiddel.

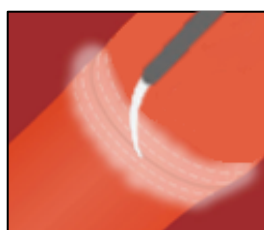

Trin 6
Efter saltvandsevakuering og en tilstrækkelig visualisering af anastomoseområdet forstærkes anastomosen hele vejen rundt med påføring af Obsidian® ASG 1,5 cm distalt og 1,5 cm proksimalt.



Trin 7
Efter fascialukning af den abdominale midtlinje under laparoskopiske procedurer eller hele incisionen i åbne procedurer, anvendes den resterende Obsidian® ASG direkte oven på fascialukningen.

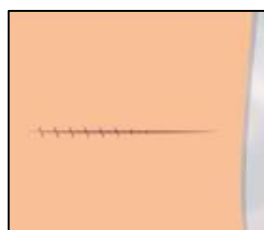

Trin 8
Endelig sårlukning.

Bemærk: Når Obsidian® ASG er påført, bør der ventes i ca. 30 sekunder, før operationen fortsættes, så Obsidian® ASG-polymeriseringsprocessen færdiggøres.