

Handleiding Obsidian® ASG Applicatie

AFDICHTING | GENEZING | REGENERATIE

De juiste volgorde van aanbrengen van Obsidian® ASG wordt in onderstaande stappen weergegeven.




Stap 1

Colonresectie met stapler of een andere gestandaardiseerde chirurgische procedure.




Stap 2

Na succesvolle plaatsing van het aambeeld en inbrenging van de circulaire stapler verbindt u de twee delen.

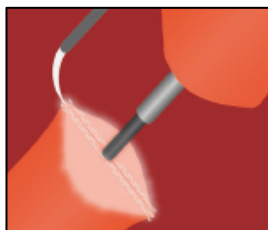


Stap 3

Controleer de positie van de proximale colon en breng ten minste 2 ml Obsidian® ASG aan op het gehele oppervlak van de distale colonstomp. **Belangrijk:** Vooral de buitenranden moeten volledig bedekt zijn.

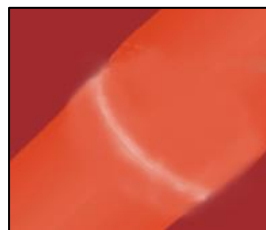


Stap 4

De stapler wordt gesloten en geactiveerd volgens de richtlijnen van de fabrikant en voorzichtig transanaal teruggetrokken.

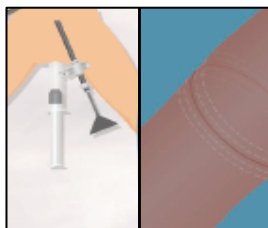

Stap 5

De luchtdichtheid van de anastomose wordt gecontroleerd door een "bellentest - water en lucht", of door een test met contrastmiddel.

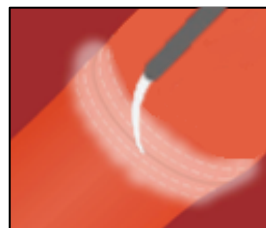


Stap 6

Na NaCl-evacuatie en adequate visualisatie van het anastomotisch gebied, versterkt u de anastomose volledig rondom door Obsidian® ASG 1,5 cm distaal en 1,5 cm proximaal aan te brengen.



Stap 7

Na fasciale sluiting van de abdominale middellijn bij laparoscopische procedures of de volledige chirurgische incisie bij open procedures brengt u de resterende Obsidian® ASG direct op de fasciale sluiting aan.

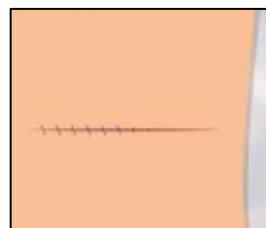

Stap 8

Definitieve wondsluiting.

Opmerking: Wacht na het aanbrengen van Obsidian® ASG ongeveer 30 seconden voordat u verdergaat met chirurgische manoeuvres totdat het polymerisatieproces van de Obsidian® ASG is voltooid.