

Guia de aplicação de Obsidian® ASG


SELAGEM | CICATRIZAÇÃO | REGENERAÇÃO

A sequência correta de aplicação de Obsidian® ASG é mostrada nos passos seguintes.




Passo 1

Ressecção do cólon com agrafador ou por outro procedimento cirúrgico padronizado.

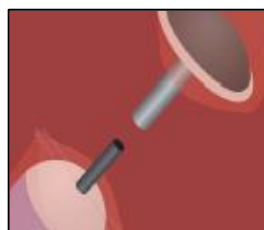

Passo 2


Após a colocação bem-sucedida da bigorna e introdução do agrafador circular, ligar as duas partes.

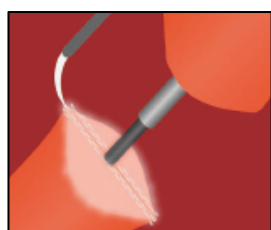

Passo 3

Verificar a posição do cólon proximal e aplicar pelo menos 2 ml de Obsidian® ASG em toda a superfície do coto do cólon distal.

Importante: As margens exteriores, em especial, devem ficar totalmente cobertas.

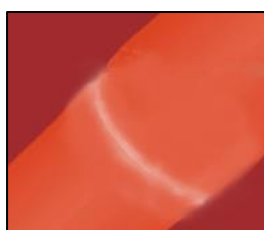


Passo 4

O agrafador é fechado e acionado de acordo com as orientações do fabricante e cuidadosamente recolhido por via transanal.



Passo 5

A estanquidade ao ar da anastomose é controlada pelo “teste de bolha - água e ar” ou por um teste com produto de contraste.

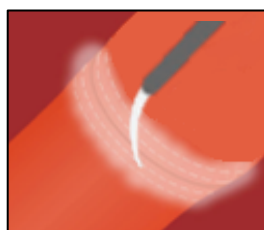


Passo 6

Após a evacuação de NaCl e da visualização adequada da área anastomosada, reforçar a anastomose a toda a circunferência aplicando Obsidian® ASG a 1,5 cm distalmente e a 1,5 cm proximalmente.



Passo 7

Após o encerramento fascial da linha média abdominal durante os procedimentos laparoscópicos ou de toda a incisão cirúrgica em procedimentos de cirurgia aberta, aplicar o restante Obsidian® ASG diretamente sobre o encerramento da fásia.

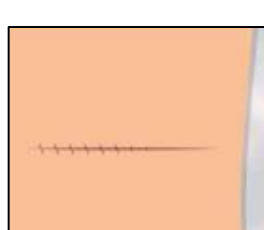

Passo 8

Encerramento final da sutura.

Nota: Depois de terminar de aplicar Obsidian® ASG, aguardar cerca de 30 segundos antes de continuar as manobras cirúrgicas até o processo de polimerização de Obsidian® ASG estar concluído.