

Obsidian® ASG Appliceringsguide


FÖRSEGLING | LÄKNING | REGENERATION

I de olika stegen nedan visas rätt sekvens för applicering av Obsidian® ASG.




Steg 1

Kolonresektion med stapler eller genom annan kirurgisk standardprocedur.

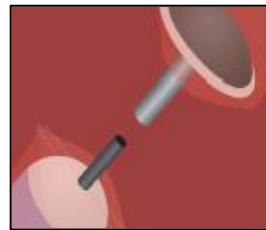


Steg 2

När du lyckats placera städet och sätta in den cirkulära staplern kan du koppla ihop de två delarna.

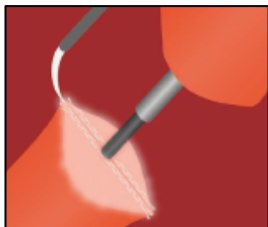

Steg 3

Kontrollera läget för den proximala delen av kolon och applicera minst 2 ml Obsidian® ASG över hela ytan på den distala kolonstumpen. **Viktigt:** Särskilt de yttre kanterna måste täckas helt.

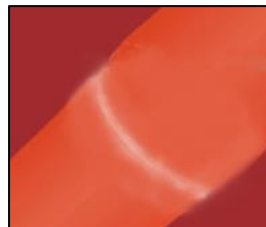


Steg 4

Stapler stängs och avfyras enligt tillverkarens riktlinjer och dras försiktigt tillbaka transanalt.



Steg 5

Anastomosens lufttätethet kontrolleras genom "bubbeltest – vatten och luft" eller genom ett test med kontrastmedel.

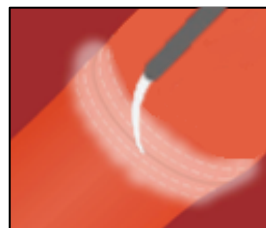


Steg 6

Efter NaCl-evakuering och adekvat visualisering av anastomosområdet ska du förstärka anastomosens hela omkrets genom att applicera Obsidian® ASG 1,5 cm distalt och 1,5 cm proximalt.



Steg 7

Efter fascieförslutning av buakens mittlinje vid laparoskopiska ingrepp eller hela det kirurgiska snittet vid öppna ingrepp, applicera den återstående Obsidian® ASG direkt ovanpå fascieförslutningen.

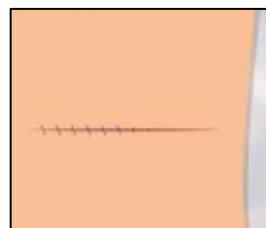

Steg 8

Slutlig särförslutning.

Obs: Efter avslutad applicering av Obsidian® ASG ska du vänta ungefär 30 sekunder innan du fortsätter kirurgiska manövrer tills polymeriseringsprocessen av Obsidian® ASG är slutförd.