


# Obsidian® RFT Anwendungsleitfaden

SEALING | HEALING | REGENERATION

## TEIL 1: Vorbereitung des Fisteltrakts

4 bis 6 Wochen vor dem chirurgischen Eingriff sollte ein Seton eingesetzt werden.

1. Fisteltrakt(e) exponieren.
2. Fistelbürste (Ovesco) einführen. Reinigung und Debridement der Fisteltrakt(e) durch Vor- und Rückwärtsbewegungen (20-mal), wobei das nicht vaskularisierte Gewebe entfernt wird.
3. Fisteltrakt(e) mit Kochsalzlösung (37 °C) spülen.
4. Debridement und Spülzyklus (Schritte 2 und 3) nach Bedarf wiederholen. **Wichtig:** Zwischen den Debridements gründlich mit der Fistelbürste reinigen.
5. Eine Z-Naht oder optional einen Mukosa-Flap anlegen.
6. Den Cava-Test durchführen, um die Steifheit und Widerstandsfähigkeit der Ostium-internum-Naht zu überprüfen. Verfahren: 1. Eine Z-Naht anwenden. 2. Die Naht festziehen, aber nicht vollständig schließen. 3. Den Bereich durch Auftragen von Kochsalzlösung vom Ostium externum befeuchten. 4. Sicherstellen, dass keine Flüssigkeit vom Ostium internum austritt und die Naht ausreichend fest ist. 5. Die Z-Naht lockern und die Applikatorvorrichtung zum Auftragen von Obsidian® RFT einführen (siehe Teil 2).

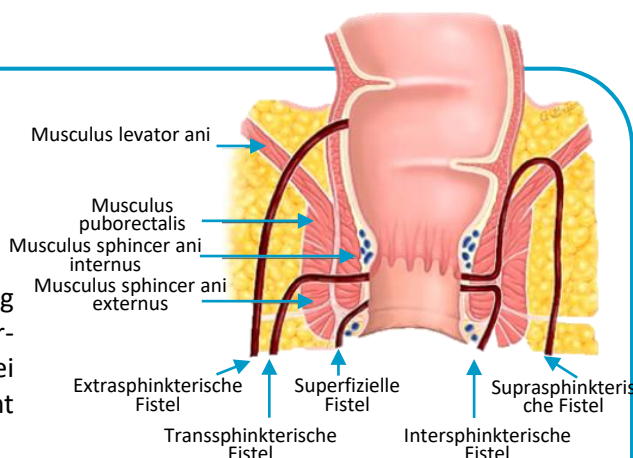

## TEIL 2: Auftragen von Obsidian® RFT

1. Den endoskopischen Katheter Obsidian® RFT von der distalen äußeren Öffnung der Fistel zum intraluminalen proximalen Ostium internum der Fistel einführen.
2. Mit der Anwendungseinstellung „Jet No Air“ konstant Obsidian® RFT abgeben und dabei den Katheter langsam zurückziehen. Optional ist es möglich, 1–5 ml einer zweiten Substanz gemeinsam mit Obsidian® RFT zu verabreichen (z. B. Antibiotika).
3. Die innere Fistelöffnung mit einer Naht oder einem Mukosa-Flap verschließen.
4. Optional kann das restliche Obsidian® RFT um das Ostium internum der Fistel injiziert werden.
5. Das Ostium externum der Fistel bleibt offen.
6. Mit nichthaftender Wundauflage bedecken.

**Die Behandlung mit Obsidian® RFT kann zur vollständigen Heilung der Fistel(n) wiederholt werden.**