


# Guía de aplicación de Obsidian® RFT

SELLADO | CICATRIZACIÓN | REGENERACIÓN

## PARTE 1: Preparación del trayecto fistuloso

*El sedal deberá colocarse 4-6 semanas antes del procedimiento quirúrgico.*

1. Deje al descubierto el trayecto o los trayectos fistulosos.
2. Inserte el cepillo para fístulas (Ovesco). Limpie y desbride el trayecto o los trayectos fistulosos retirando el tejido no vascularizado con un movimiento hacia adelante y hacia atrás (20 veces).
3. Purgue el trayecto o los trayectos fistulosos con solución salina (37 °C)
4. Repita el ciclo de desbridamiento y enjuague (pasos 2 y 3) como sea necesario. **Importante:** Limpie bien el cepillo para fístulas entre desbridamientos.
5. Aplique una sutura en Z u, opcionalmente, un colgajo de mucosa.
6. Lleve a cabo la prueba Cava para comprobar la rigidez y la resistencia de la sutura del orificio interno. Procedimiento: 1. Aplique una sutura en Z. 2. Apriete la sutura sin cerrarla por completo. 3. Irrigue la zona aplicando solución salina desde el orificio exterior con la presión adecuada. 4. Asegúrese de que no haya fugas de líquido del orificio interior y de que la sutura está suficientemente tensa. 5. Afloje la sutura en Z e inserte el dispositivo aplicador para aplicar Obsidian® RFT (vea la parte 2).

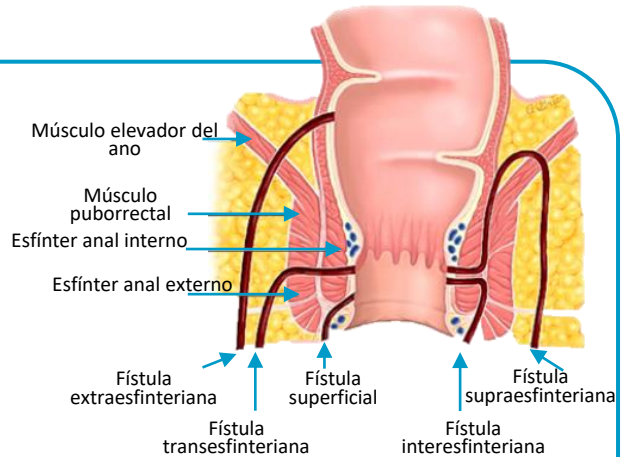

## PARTE 2: Aplicación de Obsidian® RFT

1. Inserte el catéter endoscópico Obsidian® RFT desde la abertura exterior distal de la fístula hasta el orificio interior proximal intraluminal de la fístula.
2. Aplique Obsidian® RFT de manera constante mientras retrae lentamente el catéter utilizando el ajuste de aplicación «Jet No Air». Opcionalmente, pueden coadministrarse 1-5 ml de una segunda sustancia con Obsidian® (p. ej., antibióticos).
3. Cierre la abertura interior de la fístula mediante sutura o con un colgajo de mucosa.
4. Opcionalmente, inyecte el resto de Obsidian® RFT alrededor del orificio interior de la fístula.
5. El orificio externo de la fístula permanece abierto.
6. Cubra con un apósito no adherente.

***El tratamiento con Obsidian® RFT puede repetirse para lograr la cicatrización completa de la fístula o fístulas.***