


Guida all'applicazione di Obsidian® RFT

SIGILLATURA | GUARIGIONE | RIGENERAZIONE

PARTE 1: Preparazione del tratto di fistola

Il drenaggio deve essere posizionato 4-6 settimane prima della procedura chirurgica

1. Esporre il/i tratto/i di fistola
2. Inserire lo spazzolino per fistola (Ovesco). Pulire e sbrigliare il/i tratto/i di fistola con un movimenti va e vieni (x20) rimuovendo il tessuto non vascolarizzato
3. Irrigare il/i tratto/i di fistola con soluzione fisiologica (37 °C)
4. Ripetere il ciclo di sbrigliamento e irrigazione (punti 2 e 3) secondo necessità. **Importante:** Pulire accuratamente lo spazzolino per fistola tra un'operazione di sbrigliamento e l'altra
5. Applicare a discrezione una sutura a Z o un lembo di mucosa
6. Eseguire il Cava Test per verificare la rigidità e la resistenza della sutura dell'os interno. Procedura: 1. Applicare una sutura a Z 2. Stringere la sutura senza chiuderla completamente 3. Irrigare l'area con una soluzione fisiologica dall'os esterno a una pressione adeguata 4. Assicurarsi che non vi siano fuoriuscite di liquido dall'os interno e che la sutura sia sufficientemente stretta 5. Allentare la sutura a Z e inserire il dispositivo applicatore per applicare Obsidian® RFT (v. Parte 2).

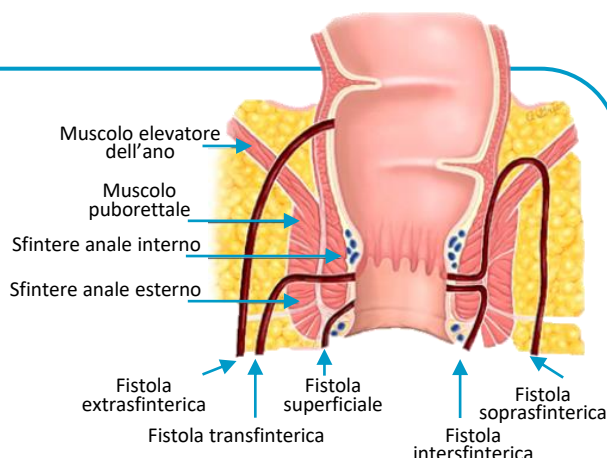

PARTE 2: Applicazione di Obsidian® RFT

1. Inserire il catetere endoscopico Obsidian® RFT dall'apertura esterna distale della fistola verso l'ostio interno della fistola prossimale intraluminalmente
2. Applicare Obsidian® RFT in maniera costante e nel contempo ritrarre lentamente il catetere utilizzando l'impostazione di applicazione "Jet No Air" (Getto senza aria). A discrezione si possono somministrare 1-5 ml di una seconda sostanza (per es. antibiotico) insieme a Obsidian® RFT
3. Chiudere l'apertura interna della fistola mediante sutura o lembo di mucosa
4. A discrezione, iniettare la restante quantità di Obsidian® RFT attorno all'ostio interno della fistola
5. L'ostio esterno della fistola rimane aperto
6. Coprire con una medicazione non aderente

Il trattamento con Obsidian® RFT può essere ripetuto fino a guarigione completa della/e fistola/e