


Guia de aplicação de Obsidian® RFT

SELAGEM | CICATRIZAÇÃO | REGENERAÇÃO

PARTE 1: Preparação do trato da fístula

O seton deve ser colocado 4 a 6 semanas antes do procedimento cirúrgico

1. Expor o(s) trato(s) da fístula
2. Inserir a escova da fístula (Ovesco). Limpar e desbridar o(s) trato(s) da fístula com um movimento de vaivém (20 vezes), removendo o tecido não vascularizado
3. Irrigar o(s) trato(s) da fístula com solução salina (37 °C)
4. Repetir o ciclo de desbridamento e lavagem (passos 2 e 3), conforme necessário.
Importante: Limpar bem a escova da fístula entre desbridamentos
5. Aplicar uma sutura em Z ou, opcionalmente, um retalho de mucosa
6. Realizar o teste da cava para verificar a rigidez e a resistência da sutura do orifício interno.
Procedimento: 1. Aplicar uma sutura em Z 2. Apertar a sutura sem a encerrar completamente 3. Irrigar a área aplicando solução salina a partir do orifício externo com pressão adequada 4. Certificar-se da inexistência de fugas de líquido do orifício interno e de que a sutura está apertada o suficiente 5. Afrouxar a sutura em Z e inserir o dispositivo aplicador para aplicar Obsidian® RFT (consultar parte 2).

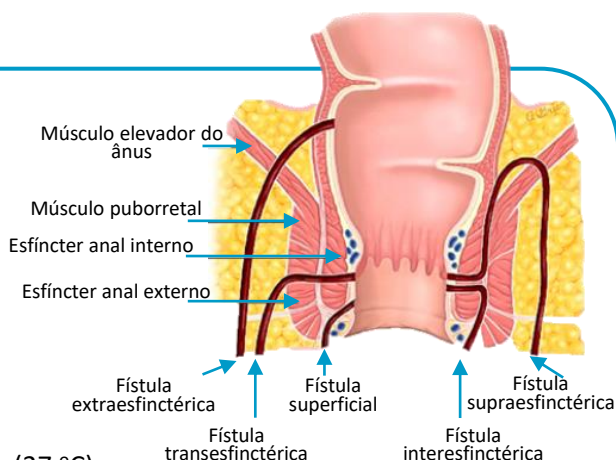

PARTE 2: Aplicação de Obsidian® RFT

1. Insira o cateter de endoscopia de Obsidian® RFT pela abertura externa distal da fístula até ao ostium interno proximal intraluminal
2. Aplicar Obsidian® RFT constantemente enquanto se recolhe lentamente o cateter usando a definição de aplicação “jato sem ar”. Opcionalmente, uma segunda substância de 1 a 5 ml pode ser coadministrada com Obsidian® RFT (por ex., antibióticos)
3. Fechar a abertura da fístula interna usando sutura ou retalho de mucosa
4. Opcionalmente, injetar o restante Obsidian® RFT à volta do ostium interno da fístula
5. O ostium da fístula externo permanece aberto
6. Cobrir com penso não aderente

O tratamento com Obsidian® RFT pode ser repetido para a cicatrização completa da(s) fístula(s)