



**DEEL 1 – DE WEGWERPAPPLICATOR EN DE APPLICATOREENHEID VOORBEREIDEN**


Zet de applicatoreenheid AAN op de achterkant en sluit de voetschakelaar aan

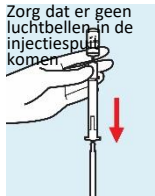


1. Plaats de 21 g naald net in het pH 10-flesje, trek vloeistof op in de 1 ml-injectiespuit

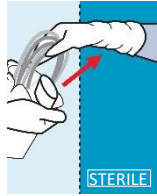


2. Breng de wegwerppapapplicator + pH-papier over naar het steriele veld

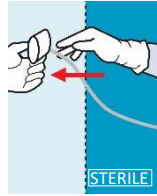


3. Breng de injectiespuit-houder buiten het steriele veld

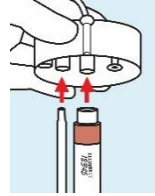


4. Plaats de pH 10 en ArthroZheal-injectiespuiten in de injectiespuit-houder

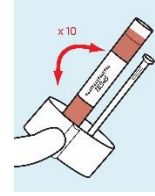


5. Draai de injectiespuit-houder heen en weer (10x)

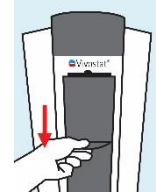

6. Open de afscherming wanneer dit wordt aangegeven op het display

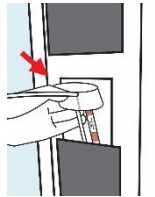

7. Plaats en positioneer de injectiespuit-houder

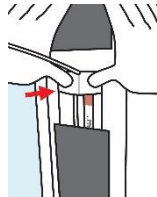

8. Druk de injectiespuit-houder in de holte met twee vingers




9. Sluit de afscherming

LET OP:

1) Om te voorkomen dat luchtballen het mengsel negatief beïnvloeden, dient u de naald **NIET** helemaal tot het einde in het pH 10-flesje te duwen in stap 1

2) Volg stap 5 zorgvuldig zodat er geen bloedplaatjes neerslaan op de bodem, omdat deze essentieel zijn voor het genezingsproces


3) Als er meer dan 30 min. verstreken zijn na stap 5, dient u de injectiespuit-houder opnieuw te draaien: Houd de knop aan de bovenkant van de applicatoreenheid langer dan 4 seconden ingedrukt, haal de injectiespuit-houder eruit, draai deze, duw de injectiespuit-houder in de holte, sluit de afscherming en houd de knop langer dan 4 seconden ingedrukt

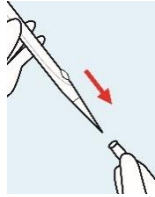DEEL 2 – INJECTIESPUITEN LADEN, VULLEN EN DE APPLICATIE STARTEN


1. Verwijder de dop van de Spraypen




2. Druk op de knop om te starten met het laden van injectiespuiten

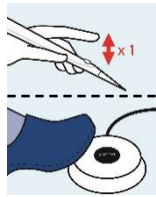

3. Druk **eenmaal** op de Spraypen-knop **of** de voetschakelaar om de spuiten te vullen

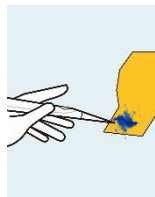


4. Richt de naald naar de onderste hoek van het pH-papier en voer de automatische vulprocedure uit

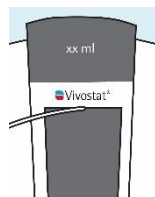


5. De automatische vulprocedure stopt automatisch en wordt weergegeven




6. Controleer het correcte mengsel op pH-papier (van vloeibaar tot viskeus in 10-30 sec.)

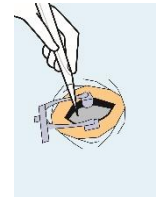


7. Gereed voor applicatie.

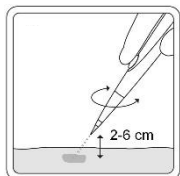AANVULLENDE TIPS VOOR HET AANBRENGEN


Gebruik cirkelvormige bewegingen op een spuitafstand van 2-6 cm

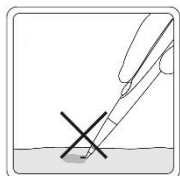


Prik **NIET** in weefsel en buig de punt van de Spraypen niet

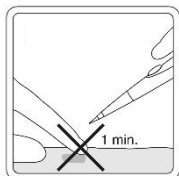

Vermijd het aanraken van de aangebrachte stof onmiddellijk na het aanbrengen

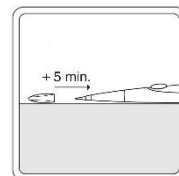

Als het aanbrengen +5 minuten wordt onderbroken, plaatst u de dop op de Spraypen

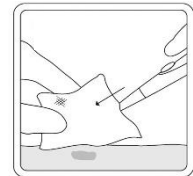

Verwijder de dop en veeg de punt van de Spraypen schoon voordat u de stof opnieuw aanbrengt