



Série APL 400

Kit de Aplicação ArthroZheal

Cartão de consulta rápida

Encontram-se disponíveis para transferência as versões
no idioma local em: www.vivostat.com/qrcs




PARTE 1 – PREPARAR DISPOSITIVO APLICADOR DESCARTÁVEL E UNIDADE APLICADORA


LIGUE a unidade aplicadora na parte de trás e ligue o interruptor de pedal





Evite a formação de bolhas de ar na seringa

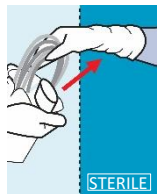


STERILE

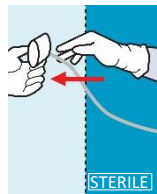

STERILE

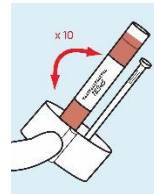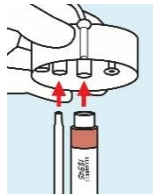

x 10

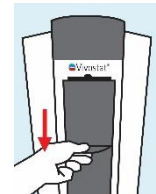

1. Introduza uma agulha de 21 g no interior do frasco de pH 10; recolha o líquido para uma seringa de 1 ml


2. Transfira aplicador descartável + papel de pH para área estéril

3. Transfira o suporte de seringa para fora da área estéril


4. Insira as seringas de pH 10 e ArthroZheal no suporte de seringas

5. Rode o suporte de seringas para trás e para a frente (10 vezes)


6. Quando indicado no visor, abra a tampa

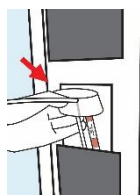

7. Insira e posicione o suporte de seringas

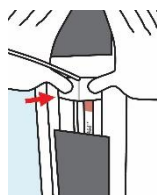

8. Pressione o suporte de seringas na cavidade utilizando dois dedos

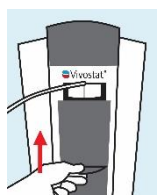


9. Feche a tampa

ATENÇÃO:

- 1) De modo a evitar que bolhas de ar afetem negativamente a mistura, **NÃO** empurre a agulha até ao fim do frasco de pH 10 no Passo 1
- 2) Siga o Passo 5 cuidadosamente, para que as plaquetas não assentem no fundo, pois são essenciais no processo de cicatrização
- 3) Se passarem mais de 30 min. após o Passo 5, rode o suporte de seringas novamente: pressione o botão no topo da unidade aplicadora por mais de 4 segundos, retire o suporte de seringas, rode-o, introduza o suporte de seringas na cavidade do recetáculo, feche a tampa e pressione o botão por mais de 4 segundos.


PARTE 2 – CARREGAR SERINGAS, IRRIGAR E INICIAR A APLICAÇÃO

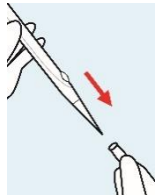


1. Retire a tampa da Spraypen




2. Pressione o botão para iniciar o carregamento de seringas

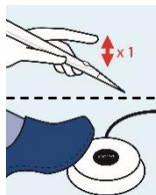


3. Pressione o botão da Spraypen ou o interruptor de pedal uma vez para irrigar

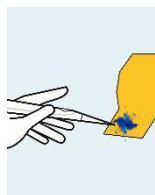

4. Aponte para o canto inferior do papel de pH e proceda à autoirrigação

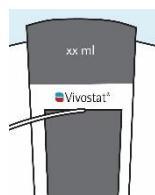


5. A autoirrigação para automaticamente e é exibido o modo de pulverização “ml +”

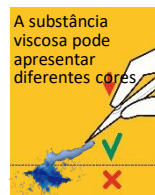


A substância viscosa pode apresentar diferentes cores

6. Verifique a mistura correta no papel de pH (de líquida a viscosa em 10-30 segundos)

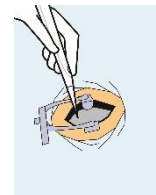


7. Pronto para aplicação.


DICAS DE APLICAÇÃO ADICIONAIS

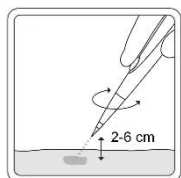


Utilize movimentos circulares a uma distância do spray de 2 a 6 cm

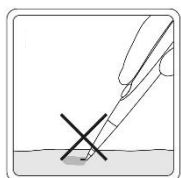


NÃO espete no tecido nem dobre a ponta da Spraypen

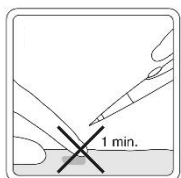

Evite tocar na substância aplicada imediatamente após a aplicação

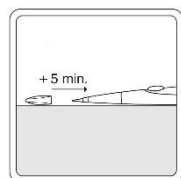

Se interromper a aplicação durante mais de 5 minutos, coloque a tampa na Spraypen

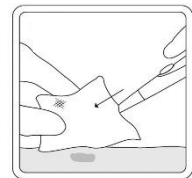

Remova a tampa e limpe a ponta da Spraypen antes de reaplicar