




DEL 1 – FÖRBERED ENGÅNGSAPPLIKATORENHETEN OCH APPLIKATORENHETEN


Slå På applikatorenheten på baksidan och anslut fotkontakten

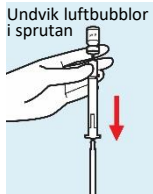


1. Placera 21 g nål precis inuti pH 10-flaskan, dra upp vätska i 1 ml spruta




2. Överför engångsapplicator + pH-papper till ett sterilt område

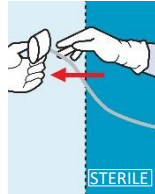


3. Flytta spruthållaren från det sterila området

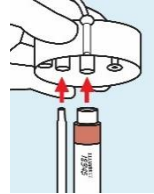


4. Sätt i pH 10 och ArthroZheal-sprutor i spruthållaren

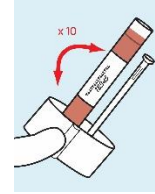


5. Vrid spruthållaren fram och tillbaka (x10)

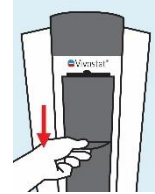

6. Öppna skärmen när det indikeras i displayen

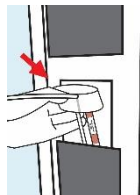

7. Sätt i och placera spruthållaren

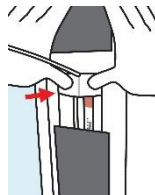

8. Tryck in spruthållaren i hålligheten med hjälp av två fingrar




9. Stäng skölden

FÖRSIKTIGHET:

- 1) För att undvika att luftbubblor påverkar blandningen negativt ska du **INTE** trycka nålen till slutet av pH 10-flaskan i steg 1
- 2) Följ steg 5 noggrant så att blodplättarna inte lägger sig i botten, eftersom de är viktiga i läkningsprocessen
- 3) Om minst 30 min. går efter steg 5 roterar du spruthållaren igen: Tryck på knappen ovanpå applikatorenheten i minst 4 sek., ta ut spruthållaren, vrid den, tryck in spruthållaren i mottagningshålligheten, stäng skärmen och tryck på knappen i 4 sek.


DEL 2 – LADDA SPRUTOR, PRIMA OCH INITIERA APPLICERING

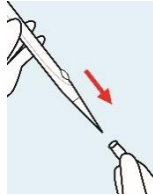


1. Ta av locket på Spraypen




2. Tryck på knappen för att börja ladda sprutor

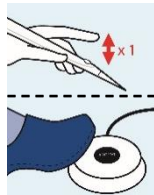

3. Tryck på knappen eller fotkontakten till Spraypen en gång för att prima

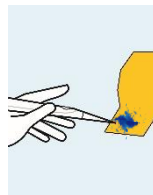


4. Peka på det nedre hörnet av pH-pappret och autoprimer

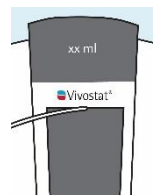

5. Autoprimer stoppar automatiskt och ml + sprayläge visas




6. Verifiera korrekt blandning på pH-papper (från flytande till viskös på 10–30 sek.)

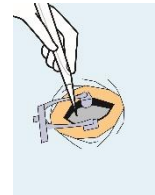


7. Färdig för applicering.


YTTERLIGARE TIPS FÖR ANVÄNDNING

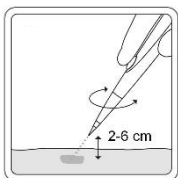


Använd cirkulära rörelser med ett avstånd på 2-6 cm

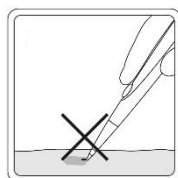


Peta **INTE** i vävnaden och böj inte spetsen på Spraypen

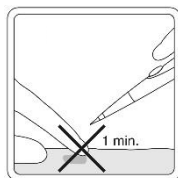

Undvik att röra vid det applicerade ämnet omedelbart efter appliceringen

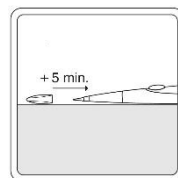

Om du pausar appliceringen i mer än 5 minuter ska du sätta på locket på Spraypen

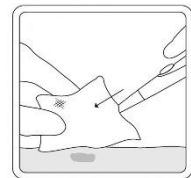

Avlägsna locket och torka av spetsen på Spraypen innan du använder den på nytt