




DEL 1 – FÖRBERED ENGÅNGSAPPLIKATORENHETEN OCH APPLIKATORENHETEN


Slå På applikatorenheten på baksidan och anslut fotkontakten

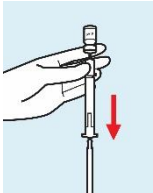


1. Placera 21 g nål precis inuti pH 10-flaskan, dra upp vätska i 1 ml spruta




2. Överför engångsapplicator + pH-papper till ett sterilt område

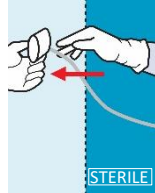


3. Flytta spruthållaren från det sterila området

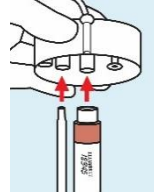


4. Sätt i pH 10 och ArthroZheal-sprutor i spruthållaren

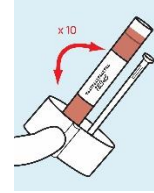


5. Vrid spruthållaren fram och tillbaka (x10)

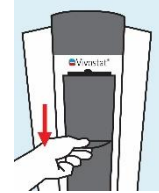

6. Öppna skärmen när det indikeras i displayen

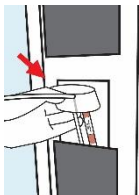

7. Sätt i och placera spruthållaren

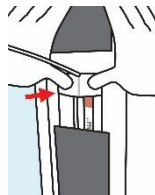

8. Tryck in spruthållaren i håligheten med hjälp av två fingrar



9. Stäng skölden


FÖRSIKTIGHET:

- 1) För att undvika att luftbubblor påverkar blandningen negativt ska du **INTE** trycka nålen till slutet av pH 10-flaskan i steg 1
- 2) Följ steg 5 noggrant så att blodplättarna inte lägger sig i botten, eftersom de är viktiga i läkningsprocessen
- 3) Om minst 30 min. går efter steg 5 roterar du spruthållaren igen: Tryck på knappen ovanpå applikatorenheten i minst 4 sek., ta ut spruthållaren, vrid den, tryck in spruthållaren i mottagningshåligheten, stäng skärmen och tryck på knappen i 4 sek.


DEL 2 (VALFRITT) – LADDA KATETERN I STERILISERAT ARTHROSKOPISKT APPLIKATORHANDTAG




1. Placera den arthroscopiska kateters spets i änden av handtaget

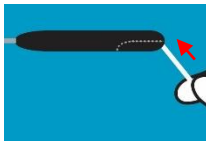

2. Ladda och tryck helt igenom den arthroscopiska katetern

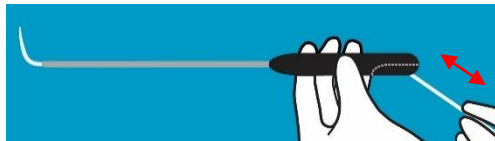

3. Justera den arthroscopiska katetern för rätt position – alla vinklar är möjliga

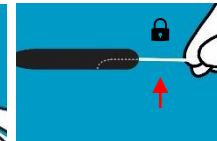

4. För att låsa positionen trycker du katetern uppåt tills den "klickar"


DEL 3 – LADDA SPRUTOR, PRIMA OCH INITIERA APPLICERING




1. Tryck på knappen för att börja ladda sprutor



2. Tryck på fotkontakten en gång för att prima

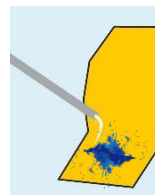


3. Peka på det nedre hörnet av pH-pappret och autoprima

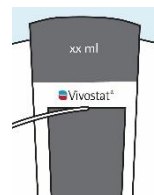

4. Autoprimering stoppar automatiskt och ml + sprayläge visas



5. Verifiera korrekt blandning på pH-papper (från flytande till viskös på 10–30 sek.)

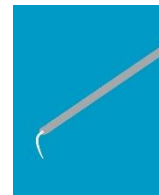

6. Färdig för applicering.

För applikationsvägledning följer du separata anvisningar för ArthroZheal® Applikation som medföljer i kartongen.