



PRO 800 Serie


# ArthroZheal® tilberedningsæt

## Referencekort




Lokale sprogversioner kan downloades fra [www.vivostat.com/qrcs](http://www.vivostat.com/qrcs)


### Del 1 – KLARGØRING FØR PATIENTEN INVOLVERES (ca. 1 minut)

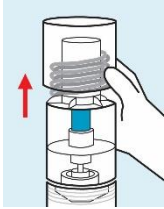

1. Fjern det udvendige låg

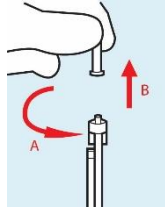


2. Tag hættten af slangen

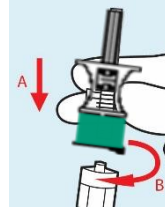

3. Åbn snaphætten, skru spiken på slangen, og fjern spikens hætte




4. Fjern hættten fra glasset med citrat

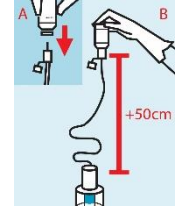


5. Vend hætteglasset med citrat om, sæt spiken i, og tøm hætteglasset


### DEL 2 – TAP BLOD FRA PATIENTEN (ca. 5 minutter)

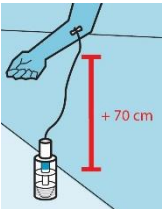

1. Få adgang til blodkarret, og udtag 120 ml blod

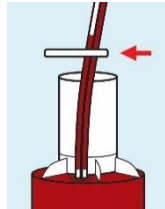


2. Når tilberedningsenheden er fyldt, klemmes slangen af

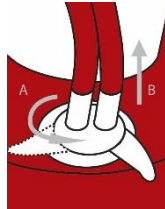


3. Drej for at lukke hanen korrekt, og fjern slangen




4. Rens hanen med Sugi-spyd

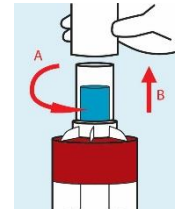


5. Fjern låget

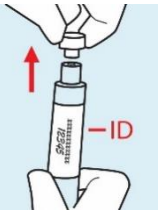

6. Tag sprøjten, tilføj patient-id, og fjern hættten

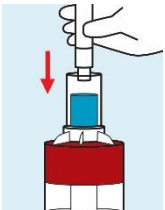

7. Sæt sprøjten i tilberedningsenheden

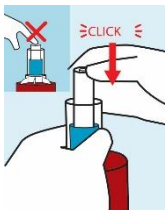


8. Klik den på plads uden at trykke på sprøjtestemplet

#### Undgå lækage og apparatfejl ved:


- 1) Ikke at bruge for højt tryk på blodflowet under fyldningen af tilberedningsenheden
- 2) Ikke at overfylde tilberedningsenheden
- 3) At lukke og rengøre hanen korrekt

### DEL 3 – BEHANDLING AF PATIENTENS BLOD (ca. 25 minutter)

Tænd for behandlingsenheden på bagsiden

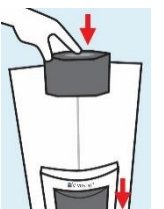


1. Tryk på knappen for at åbne dækslet

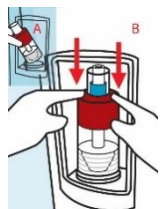

2. Placer tilberedningsenheden sikkert




3. Luk dækslet, og tryk på knappen, så behandlingen starter

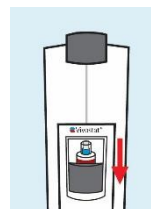

4. Når behandlingen er fuldført, tages Tilberedningsenheden ud



5. Vend tilberedningsenheden om, og fjern sprøjten

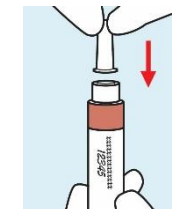

6. Sæt hættten tilbage på

ArthroZheal® autolog, bioaktiv matrix er nu klar til brug og kan anvendes med Vivostat® Applicator. Se det separate ArthroZheal® anlægssæt - Referencekort.