



PRO 800-serie


ArthroZheal® Preparatiekit

Snelle referentiekaart




Lokale taalversies kunnen worden gedownload op www.vivostat.com/qrcs


DEEL 1 – VOORBEREIDING VOORDAT DE PATIËNT ERBIJ BETROKKEN IS (ongeveer 1 minuut)

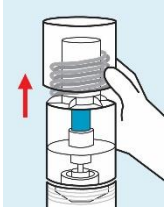

1. Verwijder de buitenste dop

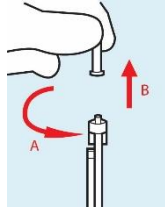


2. Verwijder de dop van de buis

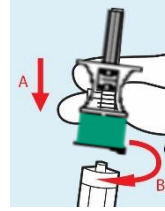

3. Open de klikdop, draai de naald op de buis, verwijder de naaldstop




4. Verwijder de citraatdop

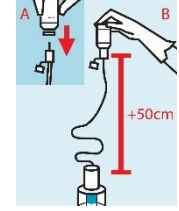


5. Draai het citraat om, prik door met de naald en leeg de flacon


DEEL 2 – BLOED AFNEMEN VAN DE PATIËNT (ongeveer 5 minuten)

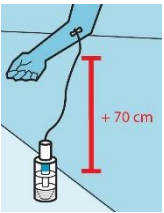

1. Breng de vasculaire toegang aan en neem 120 ml bloed af

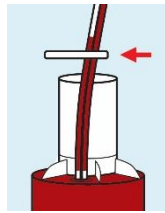


2. Wanneer de bereidingseenheid is gevuld, klemt u de lijn af

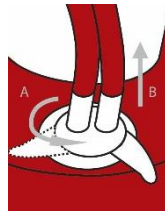


3. Draai om de klep goed te sluiten en verwijder de lijn




4. Reinig de klep met de sugi-swabs

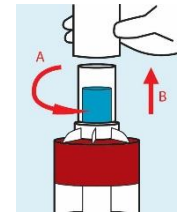

5. Verwijder de dop

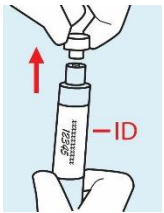

6. Neem de spuit, breng de patiënt-ID aan en verwijder de dop

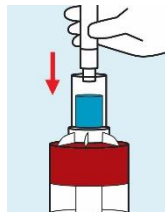

7. Breng de spuit aan in de bereidingseenheid




8. Klik de spuit op zijn plaats zonder de plunjer in te drukken

Ga voorzichtig te werk om lekkage en machinefouten te voorkomen:


- 1) Oefen niet te veel druk uit op de bloedstroom tijdens het vullen van de bereidingseenheid
- 2) Laat de bereidingseenheid niet te vol lopen
- 3) Sluit en reinig de klep zorgvuldig

DEEL 3 – HET BLOED VAN DE PATIËNT VERWERKEN (ca. 25 minuten)

Zet de verwerkingseenheid AAN op de achterkant

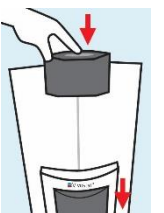


1. Druk op de knop om de afscherming te openen

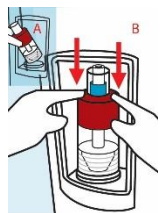


2. Plaats de bereidingseenheid stevig




3. Sluit de afscherming, druk op de knop en de verwerking wordt gestart

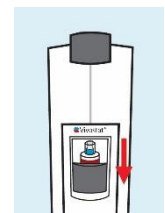

4. Als u klaar bent, neemt u de bereidingseenheid uit

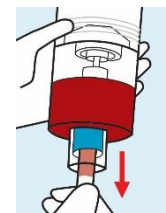

5. Draai de bereidingseenheid om en verwijder de spuit

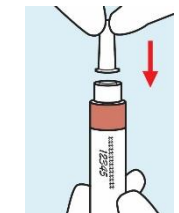

6. Plaats de dop

De ArthroZheal® autologe bioactieve matrix is nu klaar voor gebruik en kan worden aangebracht met de Vivostat®-applicator. Volg de aparte ArthroZheal® -applicatiekit - Snelle referentiekaart.