



# Kit de Preparação ArthroZheal®


Cartão de consulta rápida




Série PRO 800

Encontram-se disponíveis para transferência as versões  
no idioma local em: [www.vivostat.com/qrcs](http://www.vivostat.com/qrcs)


## PARTE 1 – PREPARAÇÃO ANTES DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE (cerca de 1 minuto)

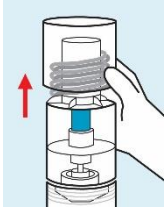

1. Retire a tampa exterior

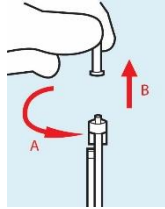


2. Retire a tampa do tubo

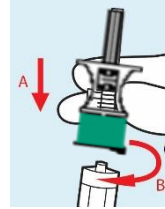

3. Abra a tampa de encaixe, enrosque o punção no tubo, retire a tampa do punção




4. Retire a tampa do citrato

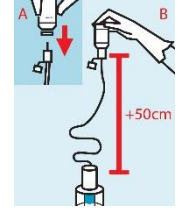


5. Vire o citrato, punção e esvazie o punção e esvazie o frasco


## PARTE 2 – COLHER SANGUE DO PACIENTE (cerca de 5 minutos)

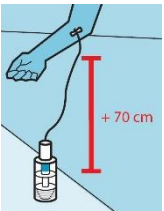

1. Certifique-se da existência de acesso vascular e colha 120 ml de sangue

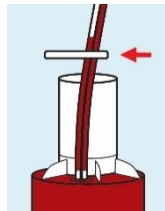


2. Quando a unidade de preparação estiver cheia, fixe o tubo

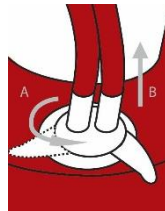


3. Rode para fechar devidamente a válvula e retire o tubo




4. Limpe a válvula com cotonetes sugi

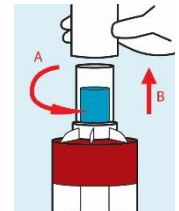


5. Retire a tampa

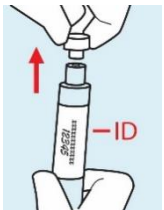

6. Pegue na seringa, adicione a ID do paciente e retire a cobertura

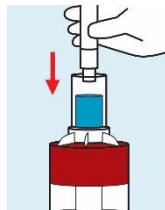

7. Insira a seringa na unidade de preparação

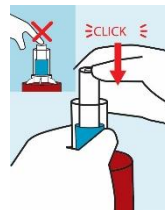


8. Encaixe na posição sem pressionar o êmbolo da seringa

Para evitar fugas e erros da máquina, proceda com cuidado:


- 1) Não utilize pressão muito alta no fluxo sanguíneo ao encher a unidade de preparação
- 2) Não encha a unidade de preparação em demasia
- 3) Para fechar e limpar a válvula devidamente

## PARTE 3 – PROCESSAR O SANGUE DO PACIENTE (cerca de 25 minutos)

LIGUE a unidade de processamento na parte de trás

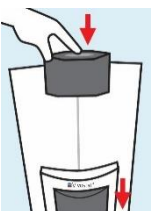


1. Pressione o botão para abrir o protetor

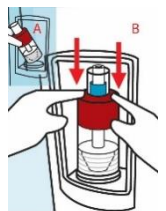


2. Coloque firmemente a unidade de preparação




3. Feche a tampa, pressione o botão e o processamento tem início

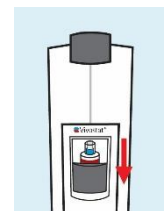

4. Quando concluído, retire a unidade de preparação para fora

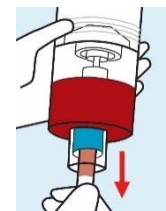

5. Inverta a unidade de preparação e retire a seringa

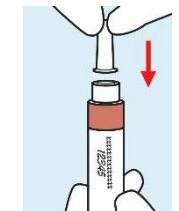

6. Coloque a tampa

A matriz bioativa autóloga ArthroZheal® está agora pronta para ser utilizada, e pode ser aplicada com o Aplicador Vivostat®. Siga o Kit de Aplicação ArthroZheal® - Cartão de Consulta Rápida