



APL 400 Series

Vivostat® Fibrin Anwendungskit

Schnellreferenz-Karte



Lokale Sprachversionen können über www.vivostat.com/qrcs heruntergeladen werden

TEIL 1 – EINWEGAPPLIKATOR UND APPLIKATOREINHEIT VORBEREITEN


Applikatoreinheit auf der Rückseite einschalten und Fußschalter anschließen




1. Die 21-g-Nadel direkt in das pH-10-Fläschchen stecken und die Flüssigkeit in eine 1-ml-Spritze aufziehen



2. Einwegapplikator + pH-Papier in einen sterilen Bereich bringen

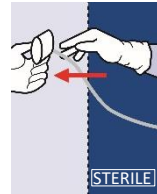


3. Spritzenhalter aus dem sterilen Bereich entfernen

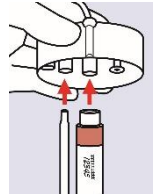


4. pH-10- und Vivostat® Fibrin Spritze in den Spritzenhalter einsetzen



5. Wenn im Display angezeigt, Schild öffnen

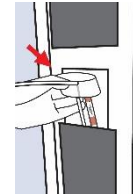

6. Spritzenhalter einsetzen und positionieren

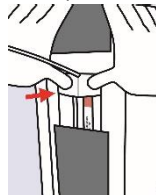

7. Spritzenhalter mit zwei Fingern in die Vertiefung drücken




8. Schild schließen

VORSICHT:

Um zu vermeiden, dass sich Luftblasen negativ auf die Mischung auswirken, die Nadel in Schritt 1 **NICHT** bis zum Ende des pH-10-Fläschchens drücken.


TEIL 2 – SPRITZEN LADEN, ENTLÜFTEN UND DIE ANWENDUNG STARTEN

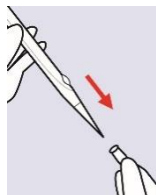


1. Kappe von Spraypen abnehmen




2. Taste drücken, um das Laden der Spritzen zu starten

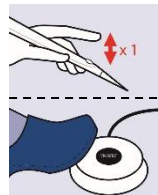

3. Zum Entlüften einmal auf die Spraypen-Taste oder den Fußschalter drücken

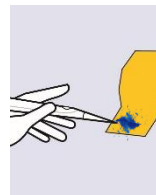


4. Spitze auf die untere Ecke des pH-Papiers richten und Autopriming starten

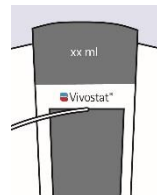

5. Autopriming stoppt automatisch und ml + Sprühmodus wird angezeigt




6. Korrekte Mischung auf pH-Papier überprüfen (von flüssig bis zähflüssig in 10–30 Sek.)

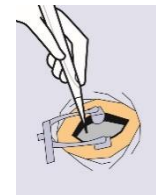


7. Bereit für die Anwendung


ZUSÄTZLICHE ANWENDUNGSTIPPS

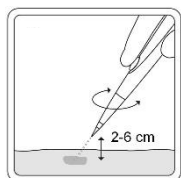


In einem Sprühabstand von 2–6 cm kreisende Bewegungen ausführen

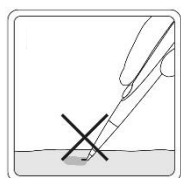


Gewebe **NICHT** durchstechen und Spraypen-Spitze nicht verbiegen

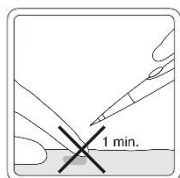

Berührung der abgegebenen Substanz direkt nach der Anwendung vermeiden

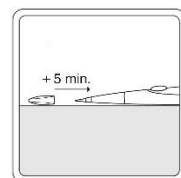

Bei Unterbrechung der Anwendung von mehr als 5 Minuten Kappe an Spraypen anbringen

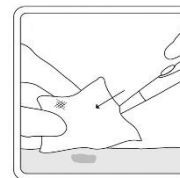

Kappe entfernen und Spraypen-Spitze vor der erneuten Anwendung abwischen