



APL 400 Series

# Kit di applicazione di Vivostat® Fibrin

Scheda di riferimento rapido




Sono disponibili per il download versioni nelle lingue locali su [www.vivostat.com/qrcs](http://www.vivostat.com/qrcs)

## PARTE 1 – PREPARAZIONE DEL DISPOSITIVO APPLICATORE MONOUSO E DELL'UNITÀ APPLICATORE


Accendere l'unità applicatore sul retro e collegare il pedale




1. Inserire un ago 21g nel flacone pH 10, prelevare il liquido in una siringa da 1 ml

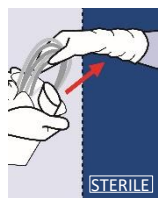

2. Trasferire l'applicatore monouso + carta tornasole nell'area sterile

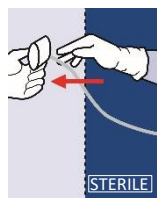


3. Rimuovere il portasinghe dall'area sterile

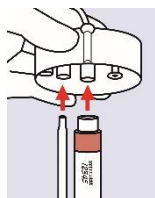


4. Inserire le siringhe di pH 10 e Vivostat® Fibrin nel portasinghe




5. Quando indicato sul display, aprire lo schermo

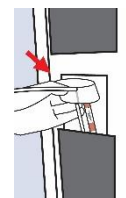

6. Inserire e posizionare il portasinghe

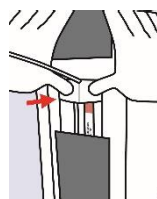

7. Premere il portasinghe nella cavità usando due dita

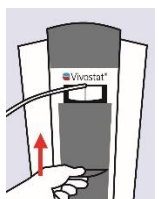


8. Chiudere lo schermo

### ATTENZIONE:

Per evitare che bolle d'aria compromettano la miscela NON spingere l'ago in fondo al flacone pH 10 nel Punto 1


## PARTE 2 – CARICAMENTO DELLE SIRINGHE, ADESCAMENTO E INIZIO DELL'APPLICAZIONE

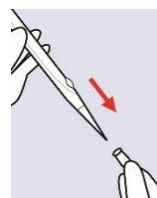


1. Togliere il cappuccio dallo strumento Spraypen




2. Premere il pulsante per avviare il caricamento delle siringhe

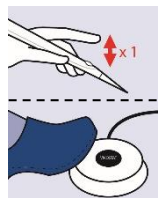

3. Premere il pulsante dello Spraypen oppure il pedale una volta per adescare

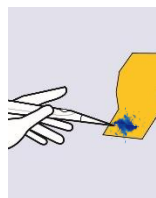


4. Puntare sull'angolo inferiore della carta tornasole mentre avviene l'adescamento o automatico

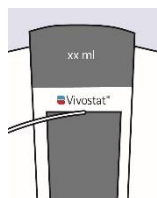

5. L'adescamento si arresta automaticamente e viene visualizzata la modalità spray + ml




6. Verificare che la miscela sia corretta sulla carta tornasole (da liquida a viscosa in 10-30 s)

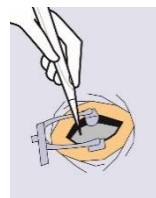


7. Pronto per l'applicazione.


## ULTERIORI SUGGERIMENTI PER L'APPLICAZIONE

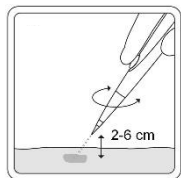


Usare movimenti circolari con una distanza di spruzzo di 2-6 cm

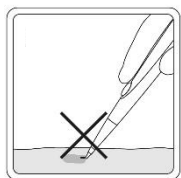


**NON** colpire il tessuto e non piegare la punta dello Spraypen

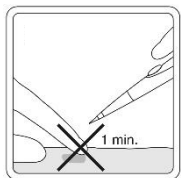

Evitare di toccare la sostanza applicata immediatamente dopo l'applicazione

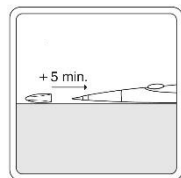

In caso di pausa superiore a 5 minuti dopo l'applicazione, rimettere il cappuccio sullo Spraypen

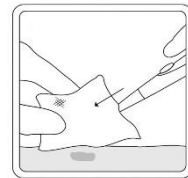

Togliere il cappuccio e pulire la punta dello Spraypen prima dell'applicazione successiva