



APL 400 Series

Vivostat® Fibrin Applikationsatts


Snabbreferensguide




Lokala språkversioner är tillgängliga för nedladdning på www.vivostat.com/qrcs

DEL 1 – FÖRBERED ENGÅNGSAPPLIKATORENHETEN OCH APPLIKATORENHETEN


Slå På applikatorenheten på baksidan och anslut fotkontakten

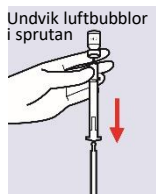


1. Placera 21 g nål precis inuti pH 10-flaskan, dra upp vätska i 1 ml spruta

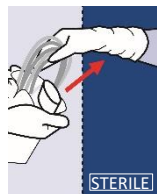

2. Överför engångsapplicator + pH-papper till ett sterilt område

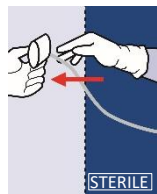


3. Flytta spruthållaren från det sterila området

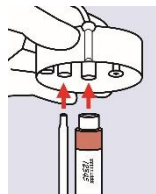


4. Sätt i pH 10 och Vivostat® Fibrin sprutor i spruthållaren




5. Öppna skärmen när det indikeras i displayen

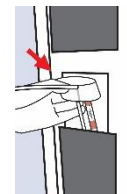

6. Sätt i och placera spruthållaren

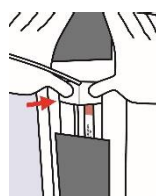

7. Tryck in spruthållaren i hålligheten med hjälp av två fingrar

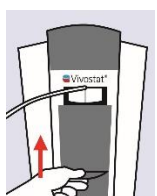


8. Stäng skölden

FÖRSIKTIGHET:

För att undvika att luftbubblor påverkar blandningen negativt ska du INTE trycka nålen till slutet av pH 10-flaskan i steg 1


DEL 2 – LADDA SPRUTOR, PRIMA OCH INITIERA APPLICERING

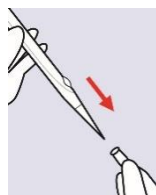


1. Ta av locket på Spraypen




2. Tryck på knappen för att börja ladda sprutor

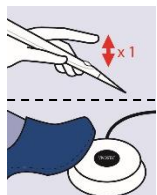

3. Tryck på knappen *eller* fotkontakten till Spraypen en gång för att prima

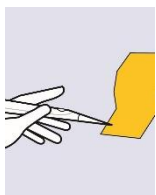


4. Peka på det nedre hörnet av pH-pappret och autopräma

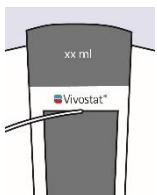

5. Autoprimering stoppar automatiskt och ml + sprayläge visas




6. Verifiera korrekt blandning på pH-papper (från flytande till viskös på 10–30 sek.)

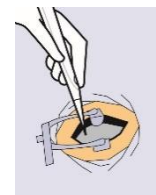


7. Färdig för applicering.


YTTERLIGARE TIPS FÖR ANVÄNDNING

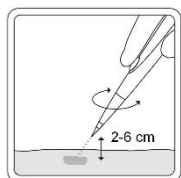


Använd cirkulära rörelser med ett avstånd på 2-6 cm

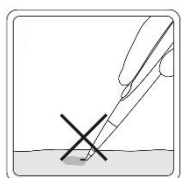


Peta INTE i vävnaden och bøj inte spetsen på Spraypen

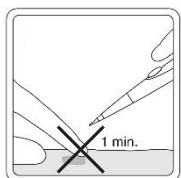

Undvik att röra vid det applicerade ämnet omedelbart efter appliceringen

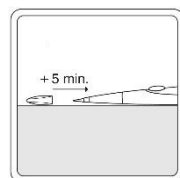

Om du pausar appliceringen i mer än 5 minuter ska du sätta på locket på Spraypen

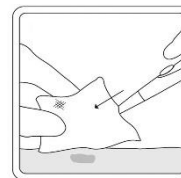

Avlägsna locket och torka av spetsen på Spraypen innan du använder den på nytt