




APL 404 Series


Lokale sprogversioner kan downloades fra www.vivostat.com/qrcs

DEL 1 – FORBERED ENGANGSAPPLIKATORENHEDEN OG APPLIKATOREN

Tænd for applikatoren på bagsiden, og tilslut fodkontakten

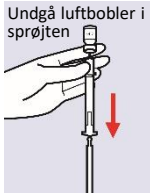


Undgå luftbobler i sprøjten

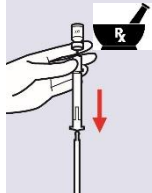


2. Klargør Co-D-opløsningen til samtidig indsprøjtning med Fibrin



3. Transfer disposable applicator + pH-papir to sterile area

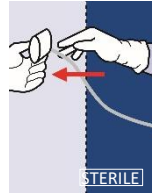


4. Fjern sprøjteholderen fra det sterile område

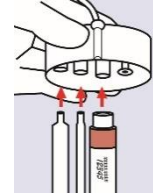


5. Indsæt Fibrin, pH 10 og Co-D-sprøjterne i sprøjteholderen



6. Når det angives på displayet, åbnes dækslet

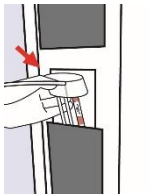

7. Indsæt og placer sprøjteholderen

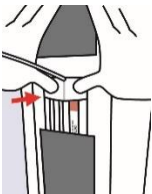

8. Tryk sprøjteholderen ind i åbningen med to fingre




9. Luk dækslet

FORSIGTIG:

For at undgå luftbobler, der kan påvirke blandingen negativt, må nålen IKKE skubbes helt ind i pH 10 hætteglasset i Trin 1


DEL 2 – ISÆT SPRØJTERNE, FYLD, OG START APPLIKATIONEN

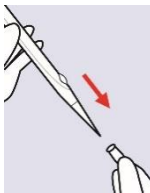


1. Tag hættten af Spraypen




2. Tryk på knappen for at begynde isætning af sprøjterne

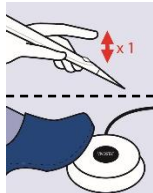

3. Tryk på Spraypens knap eller på fodpedalen én gang for at primere

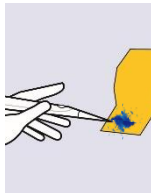


4. Peg mod det nederste hjørne af pH-papiret, og foretag automatisk fyldning

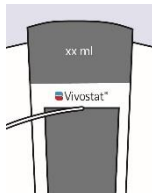

5. Den automatiske fyldning standser af sig selv, og ml + sprayfunktion vises




6. Kontrollér den korrekte blanding på pH-papiret (fra flydende til viskøst på 10-30 sek.)

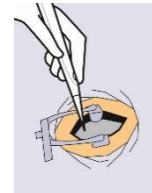


7. klar til anvendelse.


YDERLIGERE BRUGSTIPS

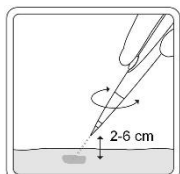


Brug cirkelformede bevægelser, og sprøjt i en afstand af 2-6 cm

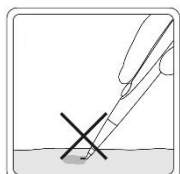


Prik IKKE vævet, og bøj IKKE Spraypens spids

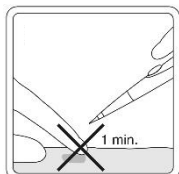

Undgå af røre ved det påførte stof umiddelbart efter påføringen

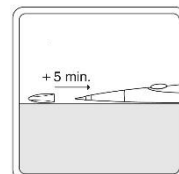

Hvis påføringen standses i mere end 5 minutter, sættes hættten på Spraypen

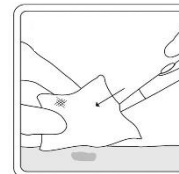

Fjern hættten og tør Spraypens spids af, før der påføres igen