



APL 404 Series


Lokale Sprachversionen können über  
[www.vivostat.com/qrcs](http://www.vivostat.com/qrcs) heruntergeladen werden

### TEIL 1 – EINWEGAPPLIKATOR UND APPLIKATOREINHEIT VORBEREITEN

Applikatoreinheit auf der Rückseite einschalten und Fußschalter anschließen




1. Die 21-g-Nadel direkt in das pH-10-Fläschchen stecken und die Flüssigkeit in eine 1-ml-Spritze aufziehen

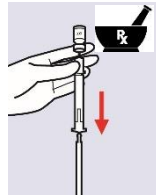


2. Die Co-D-Lösung, die gemeinsam mit Fibrin abgegeben werden soll, vorbereiten



3. Einwegapplikator auf pH-Papier in einen sterilen Bereich bringen

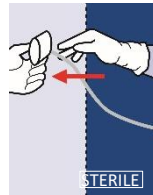


4. Spritzenhalter aus dem sterilen Bereich entfernen

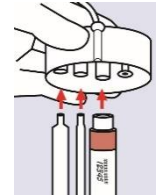


5. Fibrin-, pH-10- und Co-D-Spritze in den Spritzenhalter einsetzen




6. Wenn im Display angezeigt, Schild öffnen

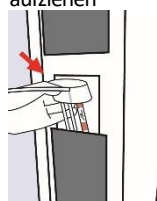

7. Spritzenhalter einsetzen und positionieren

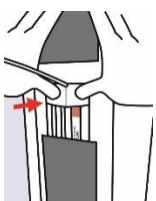

8. Spritzenhalter mit zwei Fingern in die Vertiefung drücken

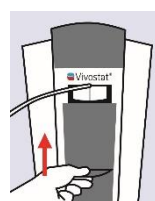


9. Schild schließen

#### VORSICHT:

Um zu vermeiden, dass sich Luftblasen negativ auf die Mischung auswirken, die Nadel in Schritt 1 NICHT bis zum Ende des pH-10-Fläschchens drücken.


### TEIL 2 – SPRITZEN LADEN, ENTLÜFTEN UND DIE ANWENDUNG STARTEN

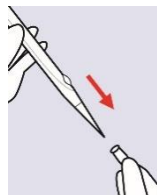


1. Kappe von Sprayen abnehmen




2. Taste drücken, um das Laden der Spritzen zu starten

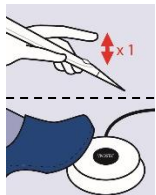

3. Zum Entlüften einmal auf die Sprayen-Taste oder den Fußschalter drücken

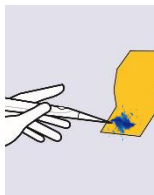


4. Spitze auf die untere Ecke des pH-Papiers richten und Autopriming starten

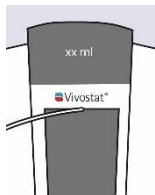

5. Autopriming stoppt automatisch und ml + Sprühmodus wird angezeigt




6. Korrekte Mischung auf pH-Papier überprüfen (von flüssig bis zähflüssig in 10–30 Sek.)

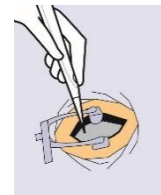


7. Bereit für die Anwendung


### ZUSÄTZLICHE ANWENDUNGSTIPPS

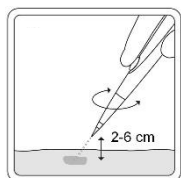


In einem Sprühabstand von 2–6 cm kreisende Bewegungen ausführen

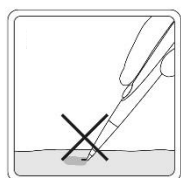


Gewebe NICHT durchstechen und Sprayen-Spitze nicht verbiegen

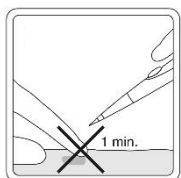

Berührung der abgegebenen Substanz direkt nach der Anwendung vermeiden

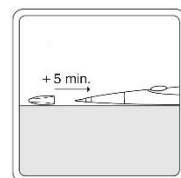

Bei Unterbrechung der Anwendung von mehr als 5 Minuten Kappe an Sprayen anbringen

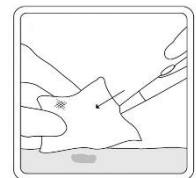

Kappe entfernen und Sprayen-Spitze vor der erneuten Anwendung abwischen