




APL 404 Series

Lokale taalversies kunnen worden gedownload op www.vivostat.com/qrcs

DEEL 1 – DE WEGWERPAPPLICATOR EN DE APPLICATOREENHEID VOORBEREIDEN

Zet de applicatoreenheid AAN op de achterkant en sluit de voetschakelaar aan


Zorg dat er geen luchtballen in de injectiespuit komen

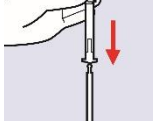


1. Plaats de 21 g naald net in het pH 10-flesje, trek vloeistof op in de 1 ml-injectiespuit opzichten




2. Bereid de Co-D-oplossing voor die samen met Fibrin moet worden toegepast

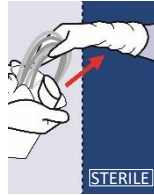

3. Breng de wegwerppaplicator + pH-papier over naar het steriele veld

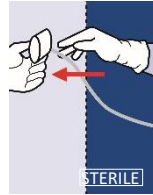


4. Breng de injectiespuit-houder buiten het steriele veld

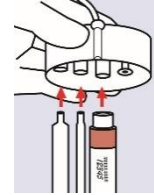


5. Plaats de injectiespuiten van Fibrin met pH 10 en Co-D-oplossing in de injectiespuit-houder




6. Open de afscherming wanneer dit wordt aangegeven op het display

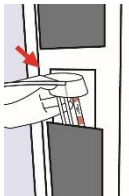

7. Plaats en positioneer de injectiespuit-houder

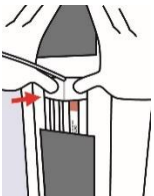

8. Druk de injectiespuit-houder in de holte met twee vingers

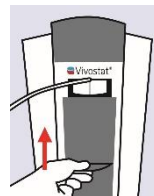


9. Sluit de afscherming

LET OP:

Om te voorkomen dat luchtballen het mengsel negatief beïnvloeden, dient u de naald NIET helemaal tot het einde in het pH 10-flesje te duwen in stap 1


DEEL 2 – INJECTIESPUITEN LADEN, VULLEN EN DE APPLICATIE STARTEN

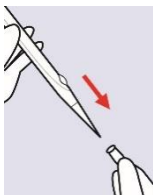


1. Verwijder de dop van de Spraypen




2. Druk op de knop om te starten met het laden van injectiespuiten

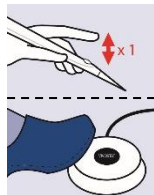

3. Druk eenmaal op de Spraypen-knop of de voetschakelaar om de spuit te vullen

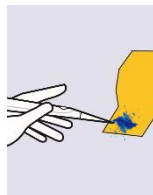


4. Richt de naald naar de onderste hoek van het pH-papier en voer de automatische vulprocedure uit

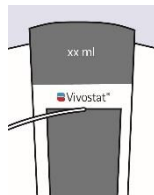

5. De automatische vulprocedure stopt automatisch en ml + spuitmodus wordt weergegeven




6. Controleer het correcte mengsel op pH-papier (van vloeibaar tot viskeus in 10-30 sec.)

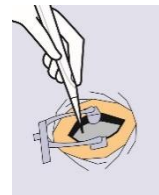


7. Gereed voor applicatie.


AANVULLENDE TIPS VOOR HET AANBRENGEN

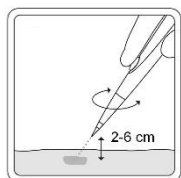


Gebruik cirkelvormige bewegingen op een spuitafstand van 2-6 cm

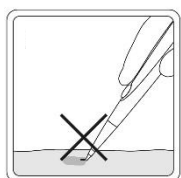


Prik NIET in weefsel en buig de punt van de Spraypen niet

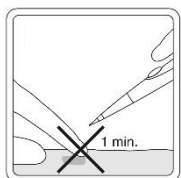

Vermijd het aanraken van de aangebrachte stof onmiddellijk na het aanbrengen

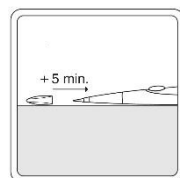

Als het aanbrengen +5 minuten wordt onderbroken, plaatst u de dop op de Spraypen

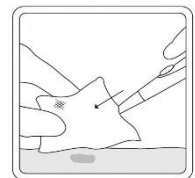

Verwijder de dop en veeg de punt van de Spraypen schoon voordat u de stof opnieuw aanbrengt