



APL 404 Series


Encontram-se disponíveis para transferência as versões no idioma local em: www.vivostat.com/qrcs

PARTE 1 – PREPARAR DISPOSITIVO APLICADOR DESCARTÁVEL E UNIDADE APLICADORA


LIGUE a unidade aplicadora na parte de trás e ligue o interruptor de pedal




1. Introduza uma agulha de 21 g no interior do frasco de pH 10; recolha o líquido para uma seringa de 1 ml aufziehen

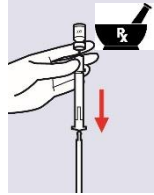


2. Prepare a solução de Co-E, para co-aplicação com Fibrin

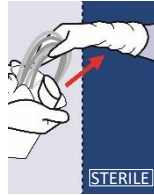

3. Transfira aplicador descartável + papel de pH para área estéril

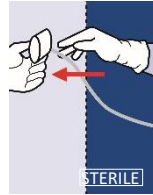

4. Transfira o suporte de seringa para fora da área estéril

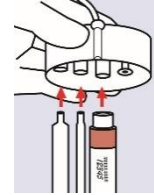


5. Insira as seringas de Fibrin, pH 10 e solução de Co-E no suporte de seringas



6. Quando indicado no visor, abra a tampa



7. Insira e posicione o suporte de seringas

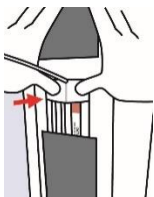

8. Pressione o suporte de seringas na cavidade utilizando dois dedos




9. Feche a tampa

ATENÇÃO:

De modo a evitar que bolhas de ar afetem negativamente a mistura, **NÃO** empurre a agulha até ao fim do frasco de pH 10 no Passo 1

PARTE 2 – CARREGAR SERINGAS, IRRIGAR E INICIAR A APLICAÇÃO

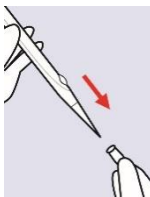


1. Retire a tampa da Spraypen




2. Pressione o botão para iniciar o carregamento de seringas




3. Pressione o botão da Spraypen ou o interruptor de pedal uma vez para irrigar

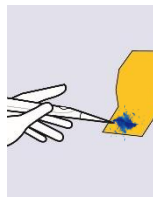

4. Aponte para o canto inferior do papel de pH e proceda à autoirrigação

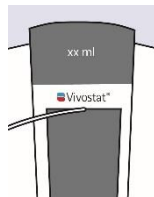


5. A autoirrigação para automaticamente e é exibido o modo de pulverização “ml +”

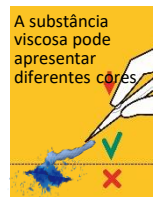


A substância viscosa pode apresentar diferentes cores.

6. Verifique a mistura correta no papel de pH (de líquida a viscosa em 10-30 segundos)

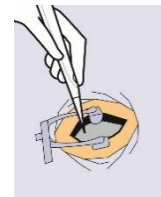


7. Pronto para aplicação.


DICAS DE APLICAÇÃO ADICIONAIS

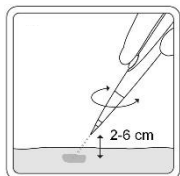


Utilize movimentos circulares a uma distância do spray de 2 a 6 cm

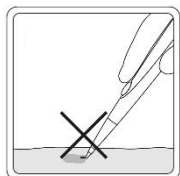


NÃO espete no tecido nem dobre a ponta da Spraypen

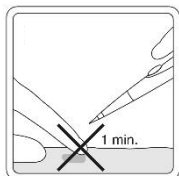

Evite tocar na substância aplicada imediatamente após a aplicação

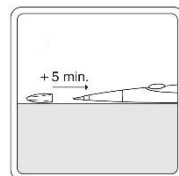

Se interromper a aplicação durante mais de 5 minutos, coloque a tampa na Spraypen

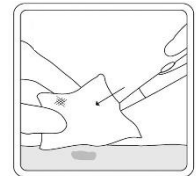

Remova a tampa e limpe a ponta da Spraypen antes de reaplicar