




APL 404 Series

Lokala språkversioner är tillgängliga för nedladdning på www.vivostat.com/qrcs


DEL 1 – FÖRBERED ENGÅNGSAPPLIKATORENHETEN OCH APPLIKATORENHETEN

Slå PÅ applikatorenheten på baksidan och anslut fotkontakten


Undvik luftbubblor i sprutan

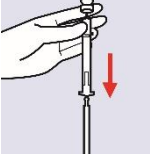


1. Placera 21 g nål precis inuti pH 10-flaskan, dra upp vätska i 1 ml spruta

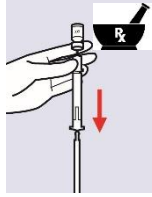


2. Bered en lösning för samtidig tillförsel som ska appliceras med Fibrin

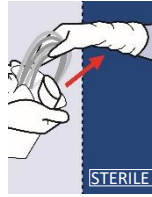

3. Överför engångsapplicatör + pH-papper till ett sterilt område

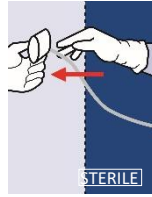


4. Flytta spruthållaren från det sterila området

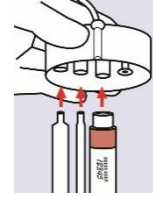


5. Sätt i Fibrin-, pH 10-sprutor och sprutor med lösningen för samtidig tillförsel i spruthållaren



6. Öppna skärmen när det indikeras i displayen

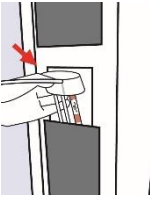

7. Sätt i och placera spruthållaren

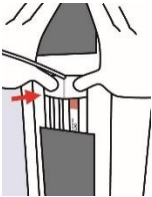

8. Tryck in spruthållaren i håligheten med hjälp av två fingrar




9. Stäng skölden

FÖRSIKTIGHET:

För att undvika att luftbubblor påverkar blandningen negativt ska du INTE trycka nålen till slutet av pH 10-flaskan i steg 1


DEL 2 – LADDA SPRUTOR, PRIMA OCH INITIERA APPLICERING

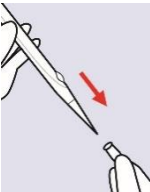


1. Ta av locket på Spraypen




2. Tryck på knappen för att börja ladda sprutor

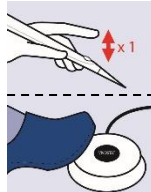

3. Tryck på knappen *eller* fotkontakten till Spraypen en gång för att prima

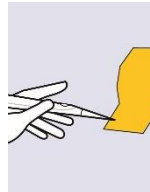

4. Peka på det nedre hörnet av pH-pappret och autoprimera

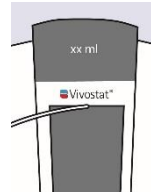


5. Autoprimering stoppar automatiskt och ml + sprayläge visas



Viskösa substans kan variera i färger




6. Verifiera korrekt blandning på pH-papper (från flytande till viskösa på 10–30 sek.)

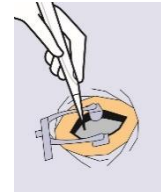


7. Färdig för applicering.


YTTERLIGARE TIPS FÖR ANVÄNDNING

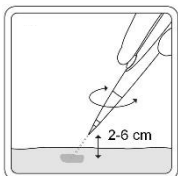


Använd cirkulära rörelser med ett avstånd på 2-6 cm

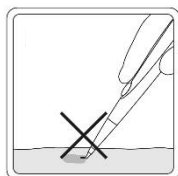


Peta INTE i vävnaden och bøj inte spetsen på Spraypen

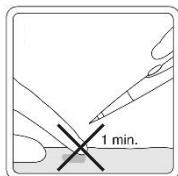

Undvik att röra vid det applicerade ämnet omedelbart efter appliceringen

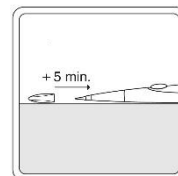

Om du pausar appliceringen i mer än 5 minuter ska du sätta på locket på Spraypen

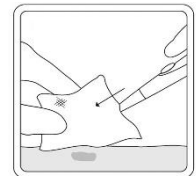

Avlägsna locket och torka av spetsen på Spraypen innan du använder den på nytt