



APL 400 Series

Vivostat® Fibrin Endoscopic Applicatiekit


Snelle referentiekaart



Lokale taalversies kunnen worden gedownload op www.vivostat.com/qrcs

DEEL 1 – DE WEGWERPAPPLICATOR EN DE APPLICATOREENHEID VOORBEREIDEN

Zet de applicatoreenheid AAN op de achterkant en sluit de voetschakelaar aan

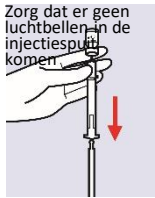


1. Plaats de 21 g naald net in het pH 10-flesje, trek vloeistof op in de 1 ml-injectiespuit



2. Breng de wegwerpapplicator + pH-papier over naar het steriele veld




3. Breng de injectiespuit-houder buiten het steriele veld

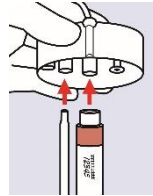


4. Plaats de pH 10 en Vivostat® Fibrin injectiespuiten in de injectiespuit-houder



5. Open de afscherming wanneer dit wordt aangegeven op het display

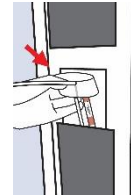

6. Plaats en positioneer de injectiespuit houder

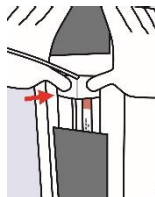

7. Druk de injectiespuit-houder in de holte met twee vingers



8. Sluit de afscherming


LET OP:

1) Om te voorkomen dat luchtballen het mengsel negatief beïnvloeden, dient u de naald **NIET** helemaal tot het einde in het pH 10-flesje te duwen in stap 1

DEEL 2 (OPTIONEEL) – KATHETER LADEN IN GESTERILISEERDE ENDOSCOPISCHE APPLICATORHANDGREEP



1. Plaats de tip van de endoscopische katheter in het uiteinde van de handgreep

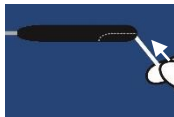

2. Laad de endoscopische katheter en duw hem helemaal door de handgreep



3. Pas de endoscopische katheter aan in de juiste positie - alle hoeken zijn mogelijk




4. Om de positie te vergrendelen duwt u de katheter omhoog tot hij "klikt"


DEEL 3 – INJECTIESPUITEN LADEN, VULLEN EN DE APPLICATIE STARTEN




1. Druk op de knop om te starten met het laden van injectiespuiten

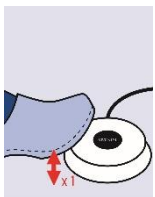

2. Druk eenmaal op de voetschakelaar om de spuiten te vullen

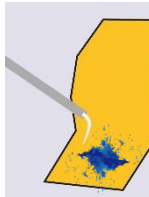

3. Richt de naald naar de onderste hoek van het pH-papier en voer de automatische vulprocedure uit

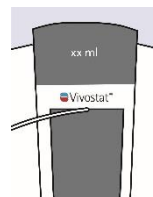

4. De automatische vulprocedure stopt automatisch en ml + spuitmodus wordt weergegeven



5. Controleer het correcte mengsel op pH-papier (van vloeibaar tot viskeus in 10-30 sec.)



6. Gereed voor applicatie.