



APL 400 Series

Kit de Aplicação Vivostat® Fibrin Endoscópico

Cartão de consulta rápida



Encontram-se disponíveis para transferência as versões no idioma local em: www.vivostat.com/grcs

PARTE 1 – PREPARAR DISPOSITIVO APLICADOR DESCARTÁVEL E UNIDADE APLICADORA

LIGUE a unidade aplicadora na parte de trás e ligue o interruptor de pedal




1. Introduza uma agulha de 21 g no interior do frasco de pH 10; recolha o líquido para uma seringa de 1 ml



2. Transfira aplicador descartável + papel de pH para área estéril




3. Transfira o suporte de seringa para fora da área estéril

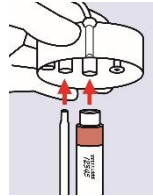


4. Insira as seringas de pH 10 e Vivostat® Fibrin no suporte de seringas



5. Quando indicado no visor, abra a tampa

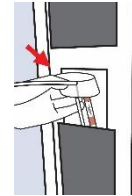

6. Insira e posicione o suporte de seringas

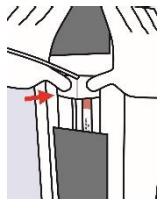

7. Pressione o suporte de seringas na cavidade utilizando dois dedos



8. Feche a tampa


ATENÇÃO:

1) De modo a evitar que bolhas de ar afetem negativamente a mistura, NÃO empurre a agulha até ao fim do frasco de pH 10 no Passo 1

PARTE 2 (OPCIONAL) – CARREGAR O CATETER NO CABO DO APLICADOR ENDOSCÓPICO ESTERILIZADO



1. Coloque a ponta do cateter endoscópico na extremidade do cabo

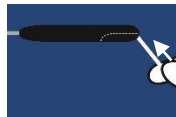

2. Introduza e empurre o cateter endoscópico completamente para dentro do cabo



3. Ajuste o cateter endoscópico para a posição certa - são possíveis todos os ângulos




4. Para bloquear o cateter na posição, empurre-o para cima até ouvir um "clique"


PARTE 3 – CARREGAR SERINGAS, IRRIGAR E INICIAR A APLICAÇÃO




1. Pressione o botão para iniciar o carregamento de seringas

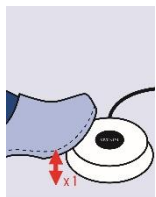

2. Pressione o interruptor de pedal uma vez para irrigar

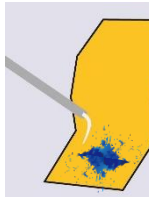

3. Aponte para o canto inferior do papel de pH e proceda à autoirrigação

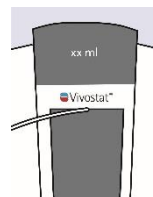

4. A autoirrigação para automaticamente e é exibido o modo de pulverização "ml +"



5. Verifique a mistura correta no papel de pH (de líquida a viscosa em 10-30 segundos)



6. Pronto para aplicação.