






DEL 1 – FÖRBEREDELSE FÖR PATIENTBEHANDLING (cirka 1 minut)

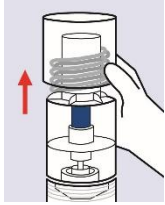

1. Avlägsna ytterlocket

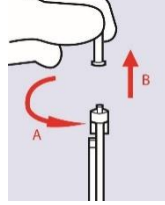


2. Avlägsna locket från slangen

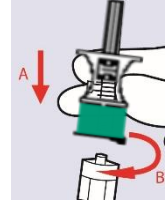

3. Öppna snäpplocket, skruva in spetsen på slangen, avlägsna spetslocket




4. Avlägsna citratflaskans lock

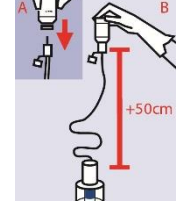


5. Vänd på citratflaskan, gör hål med spetsen och töm flaskan


DEL 2 – BLODPROVSTAGNING FRÅN PATIENTEN (cirka 5 minuter)

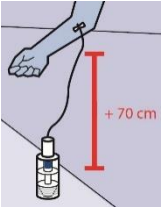

1. Förbered vaskulär åtkomst och dra 120 ml blod

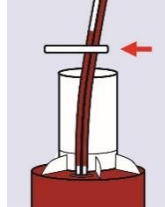


2. När förberedningsenheten är fylld, kläm åt slangen

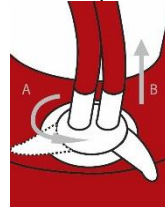


3. Vrid för att stänga ventilen ordentligt och avlägsna slangen




4. Rengör ventilen med sugi-svabbar

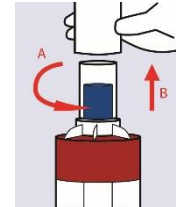


5. Avlägsna locket

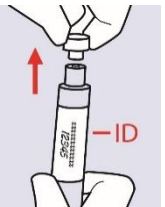

6. Ta sprutan, sätt på patient-ID och avlägsna locket

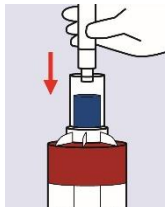

7. För in sprutan i förberedningsenheten

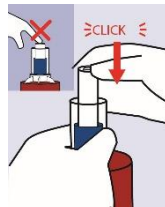

8. Klicka på plats utan att trycka på sprutkolven

För att undvika läckage och maskinfel, se nogga till att:


- 1) Inte använda för högt blodflödestryck när du fyller förberedningsenheten
- 2) Inte överfylla förberedningsenheten
- 3) Stänga och rengöra ventilen ordentligt

DEL 3 – BEARBETA PATIENTENS BLOD (cirka 25 minuter)

Slå PÅ bearbetningsenheten på baksidan




1. Tryck på knappen för att öppna skärmen

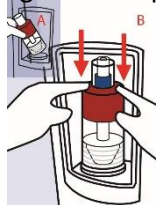


2. Placera förberedningsenheten säkert på plats




3. Stäng skärmen, tryck på knappen och bearbetningen startar

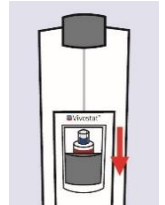

4. När den är klar, ta ut förberedningsenheten

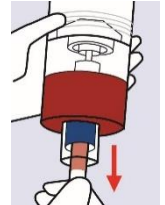

5. Vänd på förberedningsenheten och avlägsna sprutan

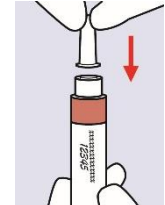

6. Sätt på locket

Vivostat® Fibrin är nu klar för användning och kan tillämpas med Vivostat®-applikatorn. Se separat Snabbreferensguide för Vivostat® Fibrin Applikationsats.