



Serie APL 400


# Obsidian® ASG Anwendungskit Schnellreferenz-Karte




Lokale Sprachversionen können über  
[www.vivostat.com/qrcs](http://www.vivostat.com/qrcs) heruntergeladen werden

## TEIL 1 – EINWEGAPPLIKATOR UND APPLIKATOREINHEIT VORBEREITEN


Applikatoreinheit auf der Rückseite einschalten und Fußschalter anschließen

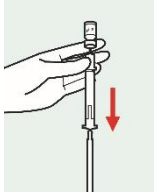


**1.** Die 21-g-Nadel direkt in das pH-10-Fläschchen stecken und die Flüssigkeit in eine 1-ml-Spritze aufziehen

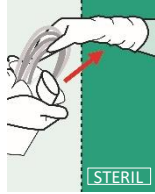


**2.** Einwegapplikator + pH-Papier in einen sterilen Bereich bringen

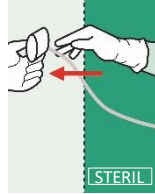

**3.** Spritzenhalter aus dem sterilen Bereich entfernen

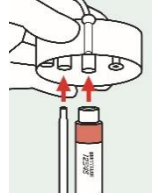


**4.** pH-10- und Obsidian-Spritze in den Spritzenhalter einsetzen

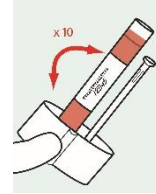


**5.** Spritzenhalter hin und her drehen (x10)




**6.** Wenn im Display angezeigt, Schild öffnen

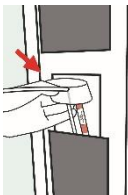

**7.** Spritzenhalter einsetzen und positionieren

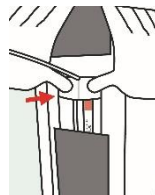

**8.** Spritzenhalter mit zwei Fingern in die Vertiefung drücken

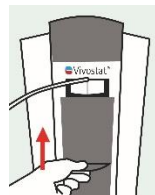

**9.** Schild schließen

### VORSICHT:

- 1) Um zu vermeiden, dass sich Luftblasen negativ auf die Mischung auswirken, die Nadel in Schritt 1 NICHT bis zum Ende des pH-10-Fläschchens drücken.
- 2) Schritt 5 sorgfältig befolgen, damit sich die Blutplättchen nicht am Boden absetzen, da sie für den Heilungsprozess wichtig sind
- 3) Wenn nach Schritt 5 mehr als 30 Minuten vergangen sind, den Spritzenhalter erneut drehen: Taste auf der Oberseite der Applikatoreinheit länger als 4 Sekunden drücken, Spritzenhalter herausnehmen und drehen, Spritzenhalter in die Aufnahmevertiefung schieben, Abdeckung schließen und Taste länger als 4 Sekunden drücken

## TEIL 2 (OPTIONAL) – KATHETER IN DEN STERILISIERTEN GRIFF DES ENDOSKOPISCHEN APPLIKATORS EINSETZEN




**1.** Spitze des endoskopischen Katheters am Ende des Griffs platzieren



**2.** Den endoskopischen Katheter einführen und vollständig durchschieben



**3.** Den endoskopischen Katheter in die richtige Position bringen – alle Winkel sind möglich

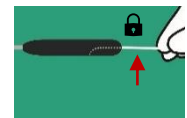


**4.** Zum Fixieren der Position den Katheter nach oben schieben, bis er einrastet


## TEIL 3 – SPRITZEN LADEN, ENTLÜFTEN UND DIE ANWENDUNG STARTEN




**1.** Taste drücken, um das Laden der Spritzen zu starten

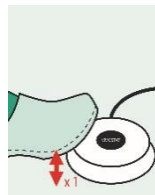

**2.** Zum Entlüften einmal den Fußschalter drücken

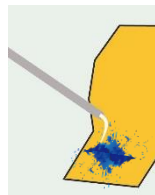


**3.** Spitze auf die untere Ecke des pH-Papiers richten und Auto-priming starten

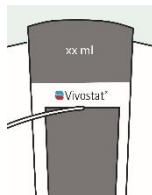

**4.** Auto-priming stoppt automatisch und ml + Sprühmodus wird angezeigt



**5.** Korrekte Mischung auf pH-Papier überprüfen (von flüssig bis zähflüssig in 10–30 Sek.)

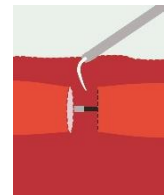

**6.** Bereit für die Anwendung, siehe separate Obsidian® ASG Anwendungsanweisung

Für die Anwendung die separate Obsidian® ASG Anwendungsanleitung befolgen, die in der Verpackung enthalten ist.