



Série APL 400

# Kit de Aplicação Obsidian® ASG


Cartão de consulta rápida




Encontram-se disponíveis para transferência as versões  
no idioma local em: [www.vivostat.com/qrcs](http://www.vivostat.com/qrcs)

## PARTE 1 – PREPARAR DISPOSITIVO APLICADOR DESCARTÁVEL E UNIDADE APLICADORA


LIGUE a unidade aplicadora na parte de trás e ligue o interruptor de pedal

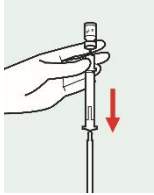


1. Introduza uma agulha de 21 g no interior do frasco de pH 10; recolha o líquido para uma seringa de 1 ml

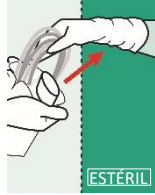


2. Transfira aplicador descartável + papel de pH para área estéril

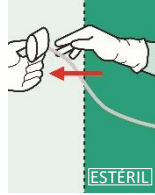

3. Transfira o suporte de seringa para fora da área estéril

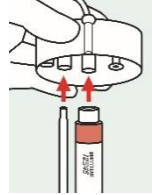


4. Insira as seringas de pH 10 e Obsidian no suporte de seringas

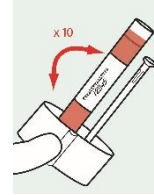


5. Rode o suporte de seringas para trás e para frente (10 vezes)




6. Quando indicado no visor, abra a tampa

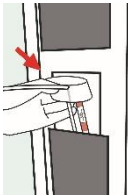

7. Insira e posicione o suporte de seringas

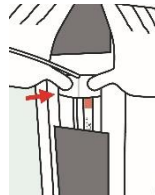

8. Pressione o suporte de seringas na cavidade utilizando dois dedos

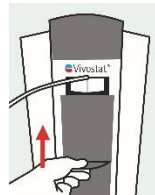

9. Feche a tampa

### ATENÇÃO:

- 1) De modo a evitar que bolhas de ar afetem negativamente a mistura, **NÃO** empurre a agulha até ao fim do frasco de pH 10 no Passo 1
- 2) Siga o Passo 5 cuidadosamente, para que as plaquetas não assentem no fundo, pois são essenciais no processo de cicatrização
- 3) Se passarem mais de 30 min. após o Passo 5, rode o suporte de seringas novamente: pressione o botão no topo da unidade aplicadora por mais de 4 segundos, retire o suporte de seringas, rode-o, introduza o suporte de seringas na cavidade do recetáculo, feche a tampa e pressione o botão por mais de 4 segundos.

## PARTE 2 (OPCIONAL) – CARREGAR O CATETER NO CABO DO APLICADOR ENDOSCÓPICO ESTERILIZADO




1. Coloque a ponta do cateter endoscópico na extremidade do cabo



2. Introduza e empurre o cateter endoscópico completamente para dentro do cabo



3. Ajuste o cateter endoscópico para a posição certa - são possíveis todos os ângulos

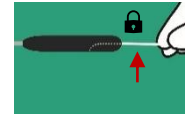


4. Para bloquear o cateter na posição, empurre-o para cima até ouvir um “clique”


## PARTE 3 – CARREGAR SERINGAS, IRRIGAR E INICIAR A APLICAÇÃO




1. Pressione o botão para iniciar o carregamento de seringas

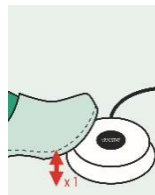

2. Pressione o interruptor de pedal uma vez para irrigar

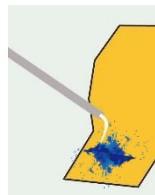


3. Aponte para o canto inferior do papel de pH e proceda à autoirrigação

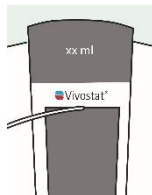

4. A autoirrigação para automaticamente e é exibido o modo de pulverização “ml +”



5. Verifique a mistura correta no papel de pH (de líquida a viscosa em 10-30 segundos)

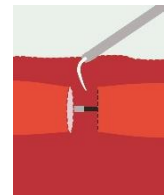

6. Pronto para aplicação, siga as Instruções de Aplicação do Obsidian® ASG em separado

Para orientações quando à aplicação, siga as Instruções de Aplicação do Obsidian® ASG incluídas na embalagem.