




APL 400/404 Series
(APL 404 til samtidig indgift, funktion)

Lokale sprogversioner kan downloades fra www.vivostat.com/qrcs


DEL 1 – FORBERED ENGANGSAPPLIKATORENHEDEN OG APPLIKATOREN

Tænd for applikatoren på bagsiden, og tilslut fodkontakten

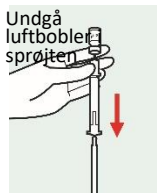


Undgå luftbobler i sprøjten


1. Placer 21G nålen lige inden i pH 10 hætteglasset, træk væske ind i 1 ml sprøjten

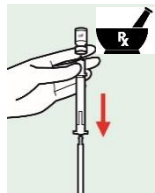


2. VALGFRIT: Klargør Co-D-opløsningen, der skal anvendes samtidigt med Obsidian

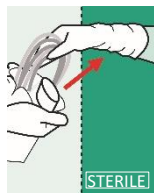


3. Overfør engangsapplikatoren + pH-papiret til det sterile område

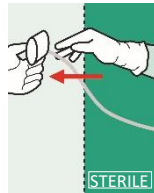

4. Fjern sprøjteholderen fra det sterile område

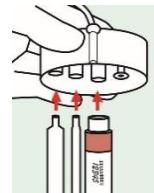


5. Indsæt Obsidian, pH 10 og de valgfri sprøjter med Co-D-opløsningen i sprøjteholderen

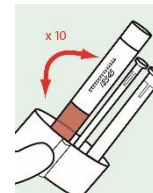


6. Drej sprøjteholderen frem og tilbage (x10)




7. Når det angives på displayet, åbnes dækslet

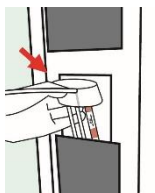

8. Indsæt og placer sprøjteholderen

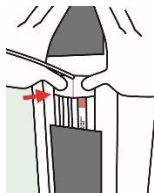

9. Tryk sprøjteholderen ind i åbningen med to fingre

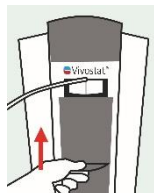

10. Luk dækslet


FORSIGTIG:

- 1) For at undgå luftbobler, der kan påvirke blandingen negativt, må nålen IKKE skubbes helt ind i pH 10 hætteglasset i Trin 1
- 2) Følg Trin 6 omhyggeligt, så trombocytterne ikke lægger sig på bunden, da de er vigtige for helingsprocessen
- 3) Hvis der går mere end 30 min. efter trin 6, drejes sprøjteholderen igen: Tryk på knappen øverst på applikatorenheden i mere end 4 sek., tag sprøjteholderen ud, drej den, skub sprøjteholderen ind i åbningen, luk dækslet, og tryk på knappen i mere end 4 sek.


DEL 2 – ISÆT SPRØJTERNE, FYLD, OG START APPLIKATIONEN




1. Tryk på knappen for at begynde isætning af sprøjterne

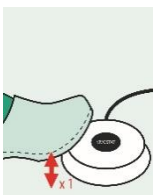

2. Tryk en gang på fodkontakten for at fylde

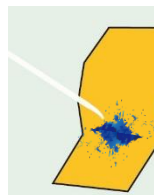


3. Peg mod det nederste hjørne af pH-papiret, og foretag automatisk fyldning

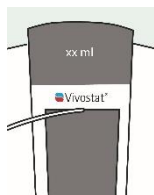

4. Den automatiske fyldning standser af sig selv, og ml + sprayfunktion vises



5. Kontrollér den korrekte blanding på pH-papiret (fra flydende til viskøst på 10-30 sek.)

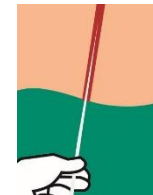

6. Når den er klar til anvendelse, følges den separate anvendelsesanvisning for Obsidian® RFT

For vejledning i anvendelse følges den separate anvendelsesanvisning for Obsidian® RFT i boksen.