



APL 400/404 Series

(APL 404 para a opção de co-envio)

Encontram-se disponíveis para transferência as versões


no idioma local em: www.vivostat.com/qrcs

PARTE 1 – PREPARAR DISPOSITIVO APLICADOR DESCARTÁVEL E UNIDADE APLICADORA


LIGUE a unidade aplicadora na parte de trás e ligue o interruptor de pedal




1. Introduza uma agulha de 21 g no interior do frasco de pH 10; recolha o líquido para uma seringa de 1 ml

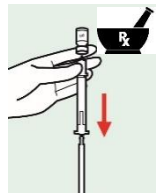


2. OPCIONAL: Prepare a solução de Co-E. para co-aplicação com Obsidian

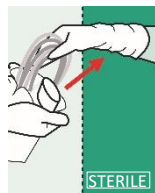


3. Transfira aplicador descartável + papel de pH para área estéril

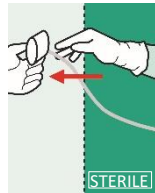

4. Transfira o suporte de seringa para fora da área estéril

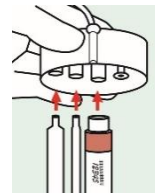


5. Insira as seringas de Obsidian, pH 10 e solução de Co-E opcional no suporte de seringas

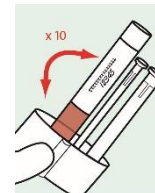


6. Rode o suporte de seringas para trás e para a frente (10 vezes)




7. Quando indicado no visor, abra a tampa

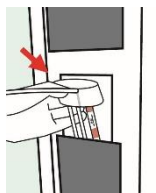

8. Insira e posicione o suporte de seringas

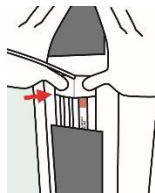

9. Pressione o suporte de seringas na cavidade utilizando dois dedos

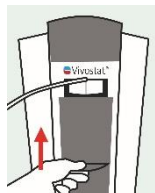

10. Feche a tampa

ATENÇÃO:

1) De modo a evitar que bolhas de ar afetem negativamente a mistura, **NAO** empurre a agulha até ao fim do frasco de pH 10 no Passo 1


2) Siga o Passo 6 cuidadosamente, para que as plaquetas não assentem no fundo, pois são essenciais no processo de cicatrização

3) Se passarem mais de 30 min. após o Passo 6, rode o suporte de seringas novamente: pressione o botão no topo da unidade aplicadora por mais de 4 segundos, retire o suporte de seringas, rode-o, introduza o suporte de seringas na cavidade do recetáculo, feche a tampa e pressione o botão por mais de 4 segundos.


PARTE 2 – CARREGAR SERINGAS, IRRIGAR E INICIAR A APLICAÇÃO




1. Pressione o botão para iniciar o carregamento de seringas

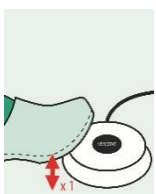

2. Pressione o interruptor de pedal uma vez para irrigar

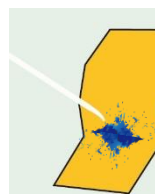

3. Aponte para o canto inferior do papel de pH e proceda à autoirrigação

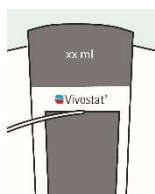

4. A autoirrigação para automaticamente e é exibido o modo de pulverização "ml +"



5. Verifique a mistura correta no papel de pH (de líquida a viscosa em 10-30 segundos)



6. Pronto para aplicação, siga as Instruções de Aplicação do Obsidian® RFT em separado

Para orientações quando à aplicação, siga as Instruções de Aplicação do Obsidian® RFT incluídas na embalagem.