



APL 400 Series

Vivostat® PRF Anwendungskit

Schnellreferenz-Karte



Lokale Sprachversionen können über www.vivostat.com/grcs heruntergeladen werden


TEIL 1 – EINWEGAPPLIKATOR UND APPLIKATOREINHEIT VORBEREITEN

Applikatoreinheit auf der Rückseite einschalten und Fußschalter anschließen (falls verwendet)




Luftblasen in der Spritze vermeiden


1. Die 21-g-Nadel direkt in das pH-10-Fläschchen stecken und die Flüssigkeit in eine 1-ml-Spritze aufziehen

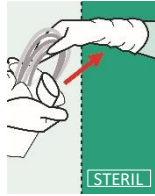


2. Einwegapplikator + pH-Papier in einen sterilen Bereich bringen

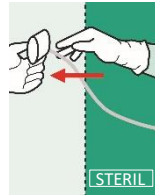

3. Spritzenhalter aus dem sterilen Bereich entfernen

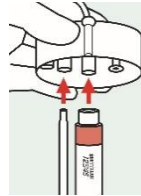


4. pH-10- und PRF-Spritze in den Spritzenhalter einsetzen

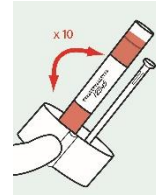


5. Spritzenhalter hin und her drehen (x10)




6. Wenn im Display angezeigt, Schild öffnen

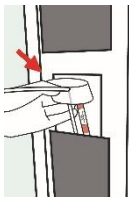

7. Spritzenhalter einsetzen und positionieren

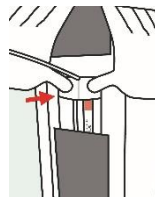

8. Spritzenhalter mit zwei Fingern in die Vertiefung drücken

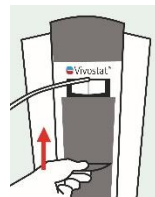


9. Schild schließen

VORSICHT:

- 1) Um zu vermeiden, dass sich Luftblasen negativ auf die Mischung auswirken, die Nadel in Schritt 1 NICHT bis zum Ende des pH-10-Fläschchens drücken.
- 2) Schritt 5 sorgfältig befolgen, damit sich die Blutplättchen nicht am Boden absetzen, da sie für den Heilungsprozess wichtig sind
- 3) Wenn nach Schritt 5 mehr als 30 Minuten vergangen sind, den Spritzenhalter erneut drehen: Taste auf der Oberseite der Applikatoreinheit länger als 4 Sekunden drücken, Spritzenhalter herausnehmen und drehen, Spritzenhalter in die Aufnahmevertiefung schieben, Abdeckung schließen und Taste länger als 4 Sekunden drücken


TEIL 2 – SPRITZEN LADEN, ENTLÜFTEN UND DIE ANWENDUNG STARTEN

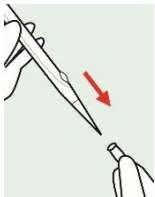


1. Kappe von Sprayen abnehmen




2. Taste drücken, um das Laden der Spritzen zu starten

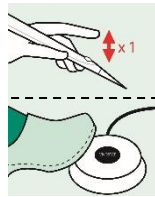

3. Zum Entlüften einmal auf die Sprayen-Taste oder den Fußschalter drücken

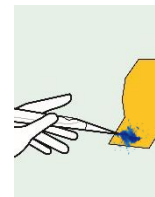


4. Spitze auf die untere Ecke des pH-Papiers richten und Autopriming starten

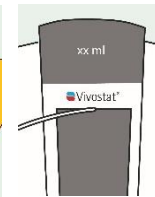

5. Autopriming stoppt automatisch und ml + Sprühmodus wird angezeigt




6. Korrekte Mischung auf pH-Papier überprüfen (von flüssig bis zähflüssig in 10–30 Sek.)

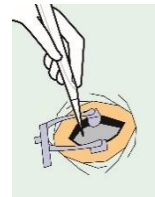


7. Bereit für die Anwendung


ZUSÄTZLICHE ANWENDUNGSTIPPS

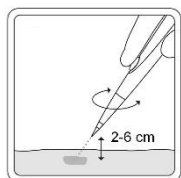


In einem Sprühabstand von 2–6 cm kreisende Bewegungen ausführen

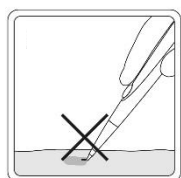


Gewebe NICHT durchstechen und Sprayen-Spitze nicht verbiegen

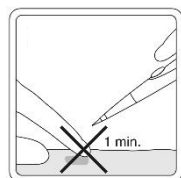

Berührung der abgegebenen Substanz direkt nach der Anwendung vermeiden

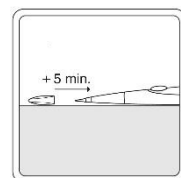

Bei Unterbrechung der Anwendung von mehr als 5 Minuten Kappe an Sprayen anbringen

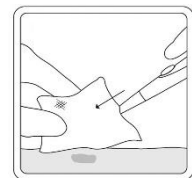

Kappe entfernen und Sprayen-Spitze vor der erneuten Anwendung abwischen