



APL 400 Series

Kit d'application de Vivostat® PRF

Fiche aide-mémoire



Versions dans d'autres langues disponibles au téléchargement sur


www.vivostat.com/qrcs

PHASE 1 – PRÉPARATION DU DISPOSITIF D'APPLICATION JETABLE ET DE L'UNITÉ D'APPLICATION


Mettre l'unité d'application en marche à l'arrière de l'appareil et connecter l'interrupteur au pied (si utilisé)




1. Placer l'aiguille 21 G juste à l'intérieur du flacon de pH 10, prélever le liquide dans une seringue de 1 ml

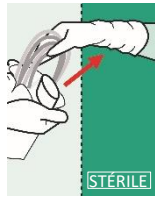


2. Transférer l'applicateur jetable et le papier pH sur le champ stérile

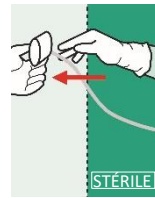

3. Sortir le porte-seringues du champ stérile

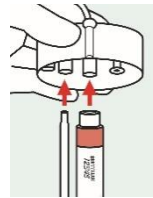


4. Insérer les seringues de pH 10 et de PRF dans le porte-seringues

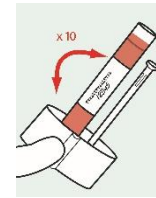


5. Faire pivoter le porte-seringues dans un mouvement de va-et-vient (10 fois)




6. Lorsque l'écran l'indique, ouvrir la protection

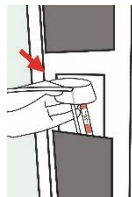

7. Insérer et bien positionner le porte-seringues

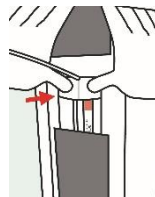

8. Enfoncer le porte-seringues dans son logement avec deux doigts

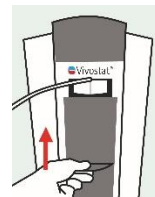


9. Fermer la protection

ATTENTION :

- 1) Pour éviter la présence de bulles d'air qui auraient un impact négatif sur le mélange, ne PAS pousser l'aiguille jusqu'au fond du flacon de pH 10 à l'étape 1.
- 2) Exécuter scrupuleusement l'étape 5 pour qu'il n'y ait pas de dépôt de plaquettes au fond, celles-ci étant essentielles dans le processus de cicatrisation
- 3) S'il s'est écoulé plus de 30 minutes après l'étape 5, recommencer à faire pivoter le porte-seringues : appuyer sur le bouton en haut de l'unité d'application pendant au moins 4 s, sortir le porte-seringues, le faire pivoter, le pousser dans son logement, fermer la protection et appuyer sur le bouton pendant au moins 4 s.


PHASE 2 – CHARGEMENT DES SERINGUES, AMORÇAGE ET DÉMARRAGE DE L'APPLICATION

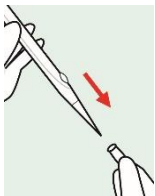


1. Retirer le capuchon du Spraypen




2. Appuyer sur le bouton pour démarrer le chargement des seringues

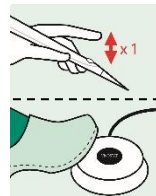

3. Appuyer sur le bouton du Spraypen ou sur l'interrupteur au pied une fois pour amorcer

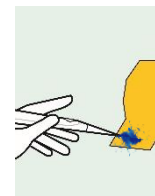


4. Diriger l'écoulement sur l'angle inférieur du papier pH et laisser l'amorçage automatique s'effectuer

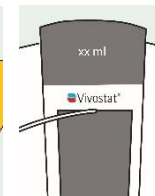

5. L'amorçage automatique s'arrête ; les ml et le mode de pulvérisation sont affichés




6. Vérifier que le mélange est correct sur le papier pH (de liquide à visqueux en 10 à 30 s)

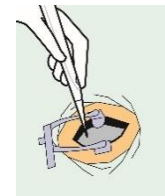


7. Le produit est prêt à l'application.


CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'APPLICATION

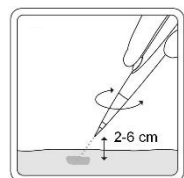


Procéder par mouvements circulaires à une distance de pulvérisation de 2 à 6 cm

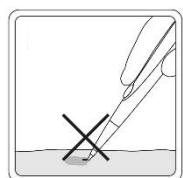


Ne PAS piquer les tissus ni plier la pointe du Spraypen

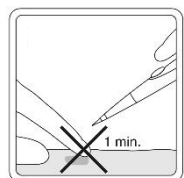

Éviter de toucher la substance pulvérisée immédiatement après l'application

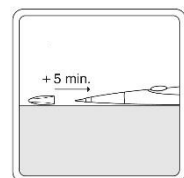

En cas d'interruption de plus de 5 minutes de l'application, remettre le capuchon sur le Spraypen

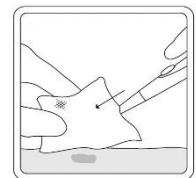

Retirer le capuchon et essuyer la pointe du Spraypen avant de reprendre l'application