



APL 400 Series Sono disponibili per il download versioni nelle lingue locali su www.vivostat.com/qrcs


PARTE 1 – PREPARAZIONE DEL DISPOSITIVO APPLICATORE MONOUSO E DELL'UNITÀ APPLICATORE

Accendere l'unità applicatore sul retro e collegare il pedale (se utilizzato)




Evitare la formazione di bolle d'aria nella siringa


1. Inserire un ago 21g nel flacone pH 10, prelevare il liquido in una siringa da 1 ml

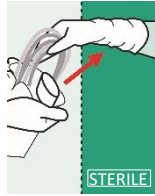


2. Trasferire l'applicatore monouso + carta tornasole nell'area sterile

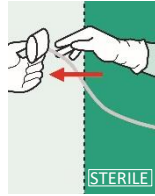

3. Rimuovere il portasiringhe dall'area sterile

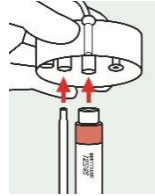


4. Inserire le siringhe di pH 10 e PRF nel portasiringhe

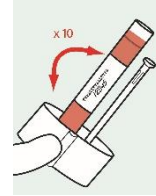


5. Capovolgere avanti e indietro il portasiringhe (x10)




6. Quando indicato sul display, aprire lo schermo

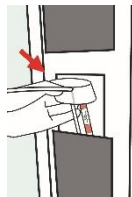

7. Inserire e posizionare il portasiringhe

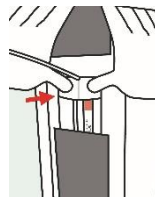

8. Premere il portasiringhe nella cavità usando due dita

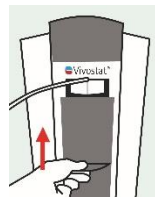


9. Chiudere lo schermo

ATTENZIONE:

- 1) Per evitare che bolle d'aria compromettano la miscela NON spingere l'ago in fondo al flacone pH 10 nel Punto 1.
- 2) Seguire attentamente il Punto 5 per evitare che le piastrine si depositino sul fondo, perché sono essenziali per il processo di guarigione.
- 3) Se passano +30 min dopo il Punto 5 capovolgere nuovamente il portasiringhe: premere il pulsante sulla sommità dell'unità applicatore per +4 s, estrarre il portasiringhe, ruotarlo, inserirlo nuovamente nella cavità premendo, chiudere lo schermo e premere il pulsante per +4 s.


PARTE 2 – CARICAMENTO DELLE SIRINGHE, ADESCAMENTO E INIZIO DELL'APPLICAZIONE

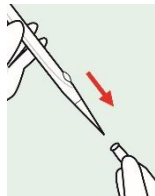


1. Togliere il cappuccio dallo strumento Spraypen




2. Premere il pulsante per avviare il caricamento delle siringhe

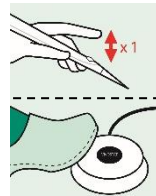

3. Premere il pulsante dello Spraypen oppure il pedale una volta per adescare

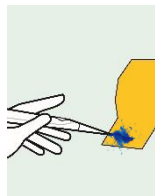


4. Puntare sull'angolo inferiore della carta tornasole mentre avviene l'adescamento o automatico

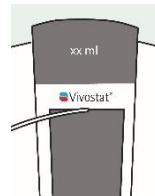

5. L'adescamento si arresta automaticamente e viene visualizzata la modalità spray + ml




6. Verificare che la miscela sia corretta sulla carta tornasole (da liquida a viscosa in 10-30 s)

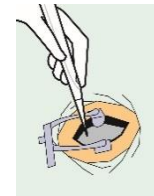


7. Pronto per l'applicazione.


ULTERIORI SUGGERIMENTI PER L'APPLICAZIONE

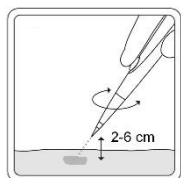


Usare movimenti circolari con una distanza di spruzzo di 2-6 cm

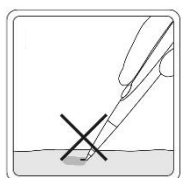


NON colpire il tessuto e non piegare la punta dello Spraypen

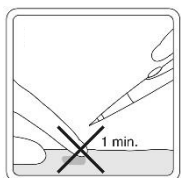

Evitare di toccare la sostanza applicata immediatamente dopo l'applicazione

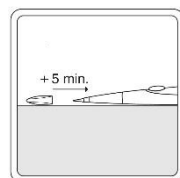

In caso di pausa superiore a 5 minuti dopo l'applicazione, rimettere il cappuccio sullo Spraypen

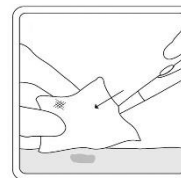

Togliere il cappuccio e pulire la punta dello Spraypen prima dell'applicazione successiva