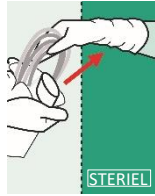
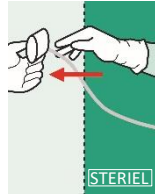


**DEEL 1 – DE WEGWERPAPPLICATOR EN DE APPLICATOREENHEID VOORBEREIDEN**

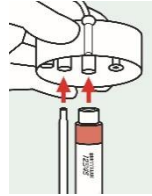
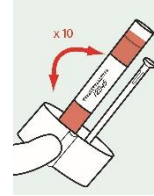
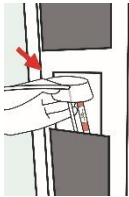
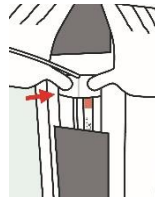
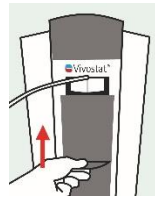
Zet de applicatoreenheid aan op de achterkant en sluit de voetschakelaar aan (als u deze gebruikt)

Zorg dat er geen  
luchtballen in de  
injectiespuit  
komen**1.** Plaats de 21 g  
naald net in het  
pH 10-flesje, trek  
vloeistof op in de  
1 ml-injectiespuit

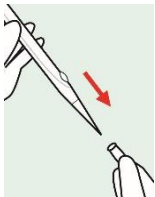
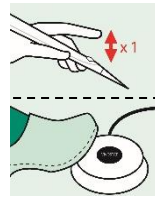
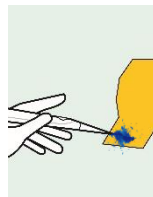
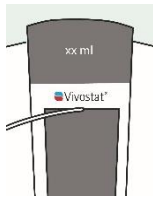
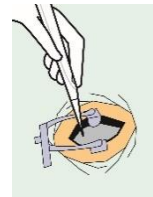
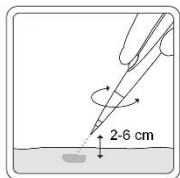
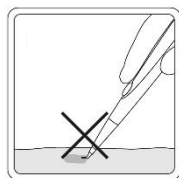
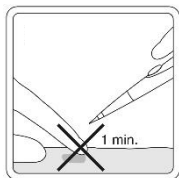
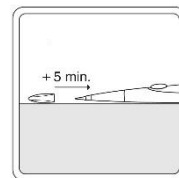
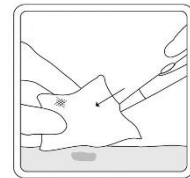
STERIEL

**2.** Breng de  
wegwerpapplicator + pH-  
papier over naar  
het steriele veld

STERIEL

**3.** Breng de  
injectiespuit-  
houder buiten  
het steriele veld**4.** Plaats de  
pH 10 en PRF-  
injectiespuiten in  
de  
injectiespuitouder**5.** Draai de  
injectiespuitouder  
der heen en  
weer (10x)**6.** Open de  
afscherming  
wanneer dit  
wordt  
aangegeven op  
het display**7.** Plaats en  
positioneer de  
injectiespuitouder**8.** Druk de  
injectiespuitouder  
in de holte met  
twee vingers**9.** Sluit de  
afscherming**LET OP:**

- 1) Om te voorkomen dat luchtballen het mengsel negatief beïnvloeden, dient u de naald NIET helemaal tot het einde in het pH 10-flesje te duwen in stap 1
- 2) Volg stap 5 zorgvuldig zodat er geen bloedplaatjes neerslaan op de bodem, omdat deze essentieel zijn voor het genezingsproces
- 3) Als er meer dan 30 min. verstreken zijn na stap 5, dient u de injectiespuitouder opnieuw te draaien: Houd de knop aan de bovenkant van de applicatoreenheid langer dan 4 seconden ingedrukt, haal de injectiespuitouder eruit, draai deze, duw de injectiespuitouder in de holte, sluit de afscherming en houd de knop langer dan 4 seconden ingedrukt

**DEEL 2 – INJECTIESPUITEN LADEN, VULLEN EN DE APPLICATIE STARTEN****1.** Verwijder  
de dop van de  
Spraypen**2.** Druk op de  
knop om te  
starten met  
het laden van  
injectiespuiten**3.** Druk eenmaal  
op de Spraypen-  
knop of de  
voetschakelaar  
om de spuiten  
te vullen**4.** Richt de  
naald naar de  
onderste  
hoek van het  
pH-papier en  
voer de  
automatische  
vulprocedure  
uit**5.** De  
automatische  
vulprocedure  
stopt automatisch  
en  
ml + spuitmodus  
wordt  
weergegeven**6.** Controleer het  
correcte mengsel  
op pH-papier (van  
vloeibaar tot  
viskeus in  
10-30 sec.)  
Viskeuze stof kan  
in kleur variëren**7.** Gereed  
voor  
applicatie.**AANVULLENDE TIPS VOOR HET AANBRENGEN**Gebruik  
cirkelvormige  
bewegingen op een  
spuitafstand van 2-6  
cmPrik NIET in  
weefsel en buig  
de punt van de  
Spraypen nietVermijd het  
aanraken van de  
aangebrachte stof  
onmiddellijk na het  
aanbrengenAls het aanbrengen +5  
minuten wordt  
onderbroken, plaatst u  
de dop op de SpraypenVerwijder de dop  
en veeg de punt  
van de Spraypen  
schoon voordat u  
de stof opnieuw  
aanbrengt