



APL 404 Series

# Vivostat® PRF Co-Delivery anvendelsessæt

## Referencekort




Lokale sprogversioner kan downloades fra [www.vivostat.com/qrcs](http://www.vivostat.com/qrcs)

### DEL 1 – FORBERED ENGANGSAPPLIKATORENHEDEN OG APPLIKATOREN


Tænd for applikatoren på bagsiden, og tilslut fodkontakten




1. Placer 21G nålen lige inden i pH 10 hætteglasset, træk væske ind i 1 ml sprøjten

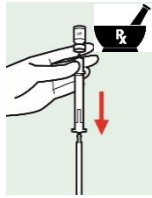


2. Klargør Co-D opløsningen til samtidig indsprøjtning med PRF

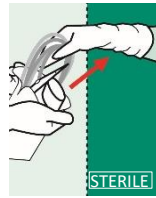


3. Overfør engangsapplikatoren + pH-papiret til det sterile område

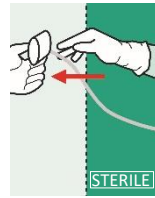


4. Fjern sprøjteholderen fra det sterile område

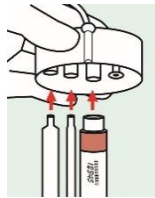


5. Indsæt PRF, pH 10 og Co-D-sprøjterne i sprøjteholderen

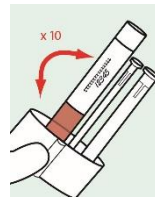


6. Drej sprøjteholderen frem og tilbage (x10)

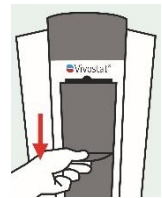


7. Når det angives på displayet, åbnes dækslet

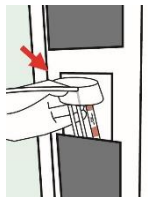

8. Indsæt og placer sprøjteholderen

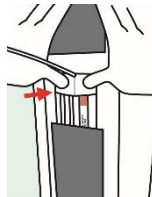

9. Tryk sprøjteholderen ind i åbningen med to fingre

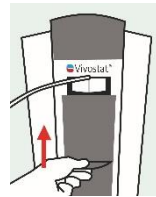


10. Luk dækslet

#### FORSIGTIG:

- 1) For at undgå luftbobler, der kan påvirke blandingen negativt, må nålen IKKE skubbes helt ind i pH 10 hætteglasset i Trin 1
- 2) Følg Trin 6 omhyggeligt, så trombocytterne ikke lægger sig på bunden, da de er vigtige for helingsprocessen
- 3) Hvis der går mere end 30 min. efter trin 6, drejes sprøjteholderen igen: Tryk på knappen øverst på applikatorenheden i mere end 4 sek., tag sprøjteholderen ud, drej den, skub sprøjteholderen ind i åbningen, luk dækslet, og tryk på knappen i mere end 4 sek.


### DEL 2 – ISÆT SPRØJTERNE, FYLD, OG START APPLIKATIONEN

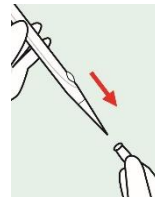


1. Tag hættten af Spraypen




2. Tryk på knappen for at begynde isætning af sprøjterne

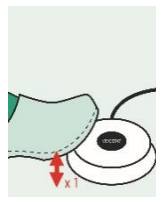

3. Tryk på Spraypens knap eller på fodpedalen én gang for at prime

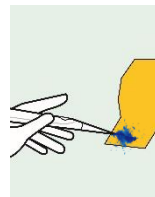


4. Peg mod det nederste hjørne af pH-papiret, og foretag automatisk fyldning

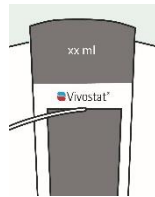

5. Den automatiske fyldning standser af sig selv, og ml + sprayfunktion vises




6. Kontrollér den korrekte blanding på pH-papiret (fra flydende til viskøst på 10-30 sek.)

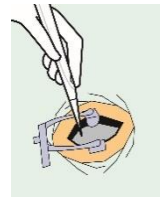


7. klar til anvendelse


### YDERLIGERE BRUGSTIPS

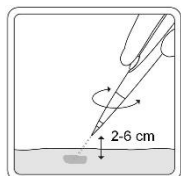


Brug cirkelformede bevægelser, og sprøjt i en afstand af 2-6 cm

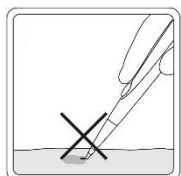


Prik IKKE vævet, og bøj IKKE Spraypens spids

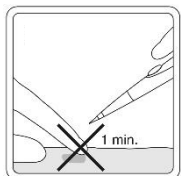

Undgå af røre ved det påførte stof umiddelbart efter påføringen

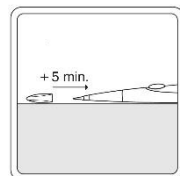

Hvis påføringen standses i mere end 5 minutter, sættes hættten på Spraypen

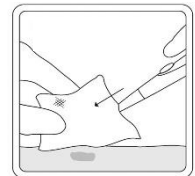

Fjern hættten og tør Spraypens spids af, før der påføres igen