



APL 404 Series

# Vivostat® PRF Co-Delivery Applicatiekit

## Snelle referentiekaart







Lokale taalversies kunnen worden gedownload op [www.vivostat.com/qrcs](http://www.vivostat.com/qrcs)

### DEEL 1 – DE WEGWERPAPPLICATOR EN DE APPLICATOREENHEID VOORBEREIDEN

Zet de applicatoreenheid AAN op de achterkant en sluit de voetschakelaar aan

Zorg dat er geen luchtballen in de injectiespuit komen.

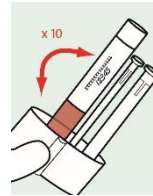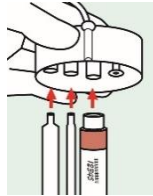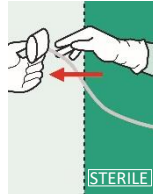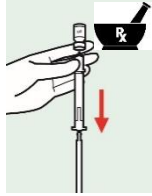

**1.** Plaats de 21 gaasnaald net in het pH 10-flesje, trek vloeistof op in de 1 ml-injectiespuit

**2.** Bereid de Co-D.-oplossing voor op die samen met PRF moet worden toegepast




**3.** Breng de wegwerppaplicator + pH-papier over naar het steriele veld

**4.** Breng de injectiespuit-houder buiten naar het steriele veld

**5.** Plaats de injectiespuit van pH 10 en Co-D.-oplossing in de injectiespuit-houder

**6.** Draai de injectiespuit-houder heen en weer (10x)

**7.** Open de afscherming wanneer dit wordt aangegeven op het display

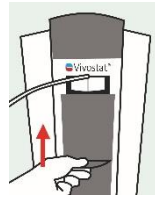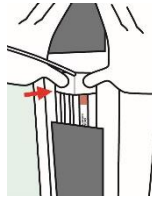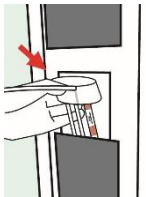

**8.** Plaats en positioneer de injectiespuit-houder in de holte der

**9.** Druk de injectiespuit-houder in de holte met twee vingers

**10.** Sluit de afscherming






#### LET OP:

1) Om te voorkomen dat luchtballen het mengsel negatief beïnvloeden, dient u de naald NIET helemaal tot het einde in het pH 10-flesje te duwen in stap 1

2) Volg stap 6 zorgvuldig zodat er geen bloedplaatjes neerslaan op de bodem, omdat deze essentieel zijn voor het genezingsproces

3) Als er meer dan 30 min. verstreken zijn na stap 6, dient u de injectiespuit-houder opnieuw te draaien: Houd de knop aan de bovenkant van de applicatoreenheid langer dan 4 seconden ingedrukt, haal de injectiespuit-houder eruit, draai deze, duw de injectiespuit-houder in de holte, sluit de afscherming en houd de knop langer dan 4 seconden ingedrukt

### DEEL 2 – INJECTIESPUITEN LADEN, VULLEN EN DE APPLICATIE STARTEN

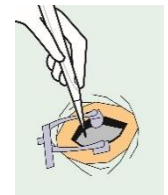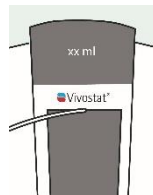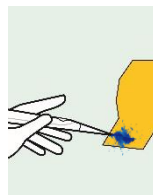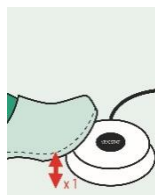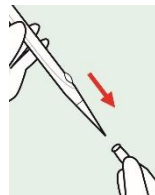

**1.** Verwijder de dop van de Spraypen

**2.** Druk op de knop om te starten met het laden van injectiespuiten

**3.** Druk eenmaal op de Spraypen-knop of de voetschakelaar om de spuiten te vullen


**4.** Richt de naald naar de onderste hoek van het pH-papier en voer de automatische vulprocedure uit

**5.** De automatische vulprocedure stopt automatisch en ml + spuitmodus wordt weergegeven


**6.** Controleer het correcte mengsel op pH-papier (van vloeibaar tot viskeus in 10-30 sec.)

**7.** Gereed voor applicatie.


### AANVULLENDE TIPS VOOR HET AANBRENGEN

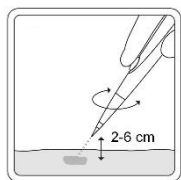


Gebruik cirkelvormige bewegingen op een spuitafstand van 2-6 cm

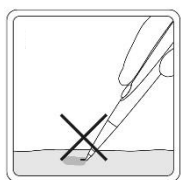


Prik NIET in weefsel en buig de punt van de Spraypen niet

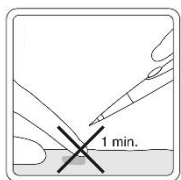

Vermijd het aanraken van de aangebrachte stof onmiddellijk na het aanbrengen

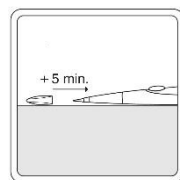

Als het aanbrengen +5 minuten wordt onderbroken, plaatst u de dop op de Spraypen

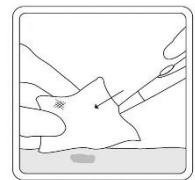

Verwijder de dop en veeg de punt van de Spraypen schoon voordat u de stof opnieuw aanbrengt