




### PARTE 1 – PREPARAR DISPOSITIVO APLICADOR DESCARTÁVEL E UNIDADE APLICADORA

LIGUE a unidade aplicadora na parte de trás e ligue o interruptor de pedal




1. Introduza uma agulha de 21 g no interior do frasco de pH 10; recolha o líquido para uma seringa de 1 ml

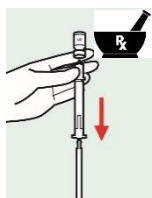


2. Prepare a solução de Co-E para co-aplicação com PRF




3. Transfira aplicador descartável + papel de pH para área estéril

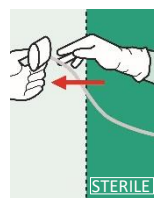

4. Transfira o suporte de seringa para fora da área estéril

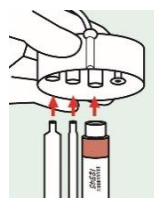


5. Insira as seringas de PRF, pH 10 e solução de Co-E no suporte de seringas

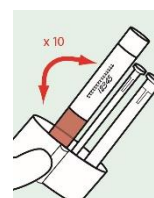


6. Rode o suporte de seringas para trás e para a frente (10 vezes)




7. Quando indicado no visor, abra a tampa

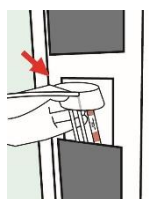

8. Insira e posicione o suporte de seringas

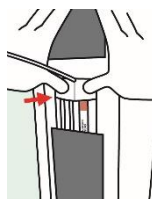

9. Pressione o suporte de seringas na cavidade utilizando dois dedos

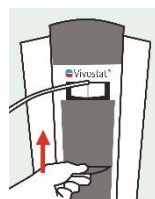


10. Feche a tampa

#### ATENÇÃO:

- 1) De modo a evitar que bolhas de ar afetem negativamente a mistura, **NÃO** empurre a agulha até ao fim do frasco de pH 10 no Passo 1
- 2) Siga o Passo 6 cuidadosamente, para que as plaquetas não assentem no fundo, pois são essenciais no processo de cicatrização
- 3) Se passarem mais de 30 min. após o Passo 6, rode o suporte de seringas novamente: pressione o botão no topo da unidade aplicadora por mais de 4 segundos, retire o suporte de seringas, rode-o, introduza o suporte de seringas na cavidade do recetáculo, feche a tampa e pressione o botão por mais de 4 segundos.


### PARTE 2 – CARREGAR SERINGAS, IRRIGAR E INICIAR A APLICAÇÃO

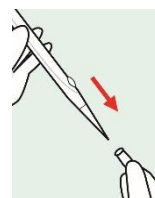


1. Retire a tampa da Spraypen




2. Pressione o botão para iniciar o carregamento de seringas

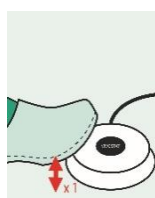


3. Pressione o botão da Spraypen ou o interruptor de pedal uma vez para irrigar

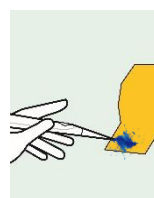


4. Aponte para o canto inferior do papel de pH e proceda à autoirrigação

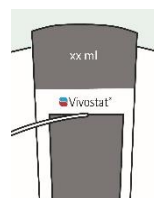

5. A autoirrigação para automaticamente e é exibido o modo de pulverização "ml"

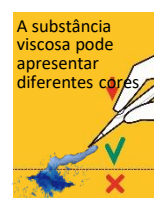


6. Verifique a mistura correta no papel de pH (de líquida a viscosa em 10-30 segundos)

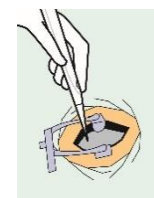


7. Pronto para aplicação.


### DICAS DE APLICAÇÃO ADICIONAIS

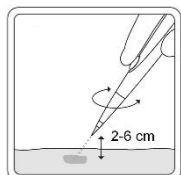


Utilize movimentos circulares a uma distância do spray de 2 a 6 cm

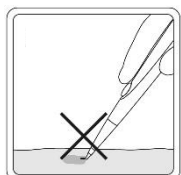


**NÃO** espete no tecido nem dobre a ponta da Spraypen

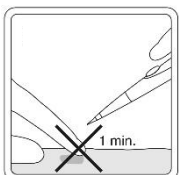

Evite tocar na substância aplicada imediatamente após a aplicação

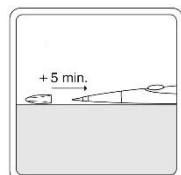

Se interromper a aplicação durante mais de 5 minutos, coloque a tampa na Spraypen

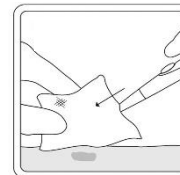

Remova a tampa e limpe a ponta da Spraypen antes de reaplicar