



APL 404 Series

Vivostat® PRF Co-Delivery Applikationssats


Snabbreferensguide




Lokala språkversioner är tillgängliga för nedladdning på www.vivostat.com/qrcs

DEL 1 – FÖRBERED ENGÅNGSAPPLIKATORENHETEN OCH APPLIKATORENHETEN


Slå PÅ applikatorenheten på baksidan och anslut fotkontakten

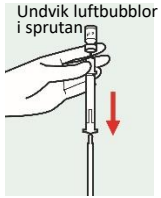


1. Placera 21 g nål precis inuti pH 10-flaskan, dra upp vätska i 1 ml spruta

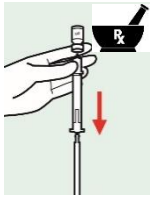


2. Bered en lösning för samtidig tillförsel som ska appliceras med PRF

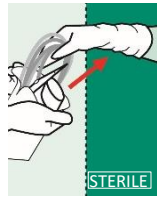


3. Överför engångsapplikator + pH-papper till ett sterilt område

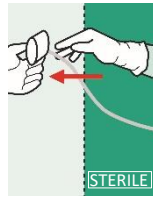


4. Flytta spruthållaren från det sterila området

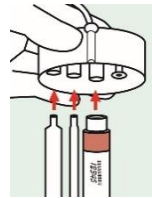


5. Sätt i PRF-, pH 10-sprutor och sprutor med lösningen för samtidig tillförsel i spruthållaren

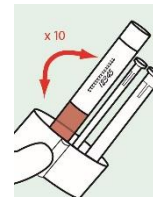


6. Vrid spruthållaren fram och tillbaka (x10)

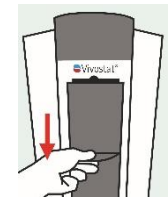


7. Öppna skärmen när det indikeras i displayen

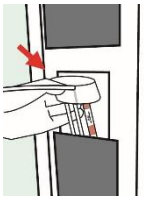

8. Sätt i och placera spruthållaren

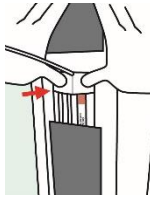

9. Tryck in spruthållaren i håligheten med hjälp av två fingrar

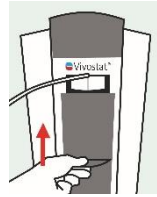


10. Stäng skölden

FÖRSIKTIGHET:

- 1) För att undvika att luftbubblor påverkar blandningen negativt ska du INTE trycka nålen till slutet av pH 10-flaskan i steg 1
- 2) Följ steg 6 noggrant så att blodplattorna inte lägger sig i botten, eftersom de är viktiga i läkningsprocessen
- 3) Om minst 30 min. går efter steg 6 roterar du spruthållaren igen: Tryck på knappen ovanpå applikatorenheten i minst 4 sek., ta ut spruthållaren, vrid den, tryck in spruthållaren i mottagningshåligheten, stäng skärmen och tryck på knappen i 4 sek.


DEL 2 – LADDA SPRUTOR, PRIMA OCH INITIERA APPLICERING

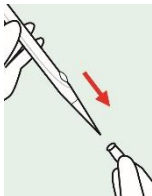


1. Ta av locket på Spraypen




2. Tryck på knappen för att börja ladda sprutor

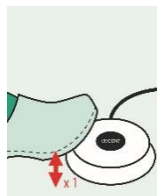

3. Tryck på knappen *eller* fotkontakten till Spraypen *en gång* för att prima

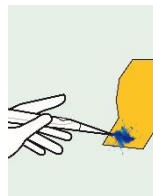


4. Peka på det nedre hörnet av pH-pappret och autoprima

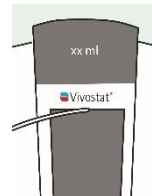

5. Autoprimering stoppar automatiskt och ml + sprayläge visas




6. Verifiera korrekt blandning på pH-papper (från flytande till viskös på 10–30 sek.)

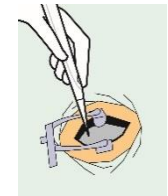


7. Färdig för applicering.


YTTERLIGARE TIPS FÖR ANVÄNDNING

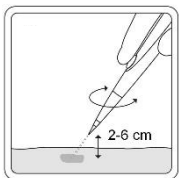


Använd cirkulära rörelser med ett avstånd på 2-6 cm

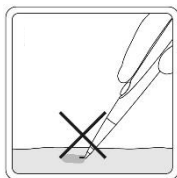


Peta INTE i vävnaden och böj inte spetsen på Spraypen

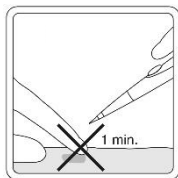

Undvik att röra vid det applicerade ämnet omedelbart efter appliceringen

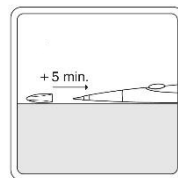

Om du pausar appliceringen i mer än 5 minuter ska du sätta på locket på Spraypen

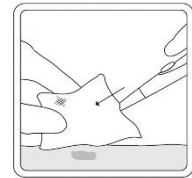

Avlägsna locket och torka av spetsen på Spraypen innan du använder den på nytt