



# Kit di applicazione di Vivostat® PRF Endoscopic


## Scheda di riferimento rapido




APL 400 Series Sono disponibili per il download versioni nelle lingue locali su [www.vivostat.com/qrcs](http://www.vivostat.com/qrcs)

### PARTE 1 – PREPARAZIONE DEL DISPOSITIVO APPLICATORE MONOUSO E DELL'UNITÀ APPLICATORE


Accendere l'unità applicatore sul retro e collegare il pedale

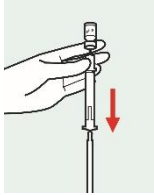


**1.** Inserire un ago 21g nel flacone pH 10, prelevare il liquido in una siringa da 1 ml

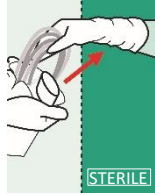


**2.** Trasferire l'applicatore monouso + carta tornasole nell'area sterile

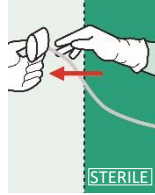

**3.** Rimuovere il portasiringhe dall'area sterile

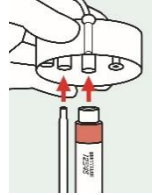


**4.** Inserire le siringhe di pH 10 e PRF nel portasiringhe

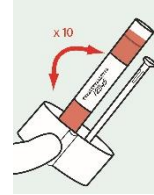


**5.** Capovolgere avanti e indietro il portasiringhe (x10)




**6.** Quando indicato sul display, aprire lo schermo

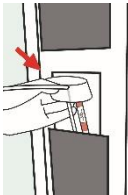

**7.** Inserire e posizionare il portasiringhe

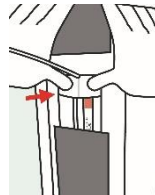

**8.** Premere il portasiringhe nella cavità usando due dita

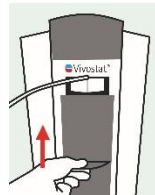


**9.** Chiudere lo schermo

#### ATTENZIONE:

- 1) Per evitare che bolle d'aria compromettano la miscela NON spingere l'ago in fondo al flacone pH 10 nel Punto 1.
- 2) Seguire attentamente il Punto 5 per evitare che le piastrine si depositino sul fondo, perché sono essenziali per il processo di guarigione.
- 3) Se passano +30 min dopo il Punto 5 capovolgere nuovamente il portasiringhe: premere il pulsante sulla sommità dell'unità applicatore per +4 s, estrarre il portasiringhe, ruotarlo, inserirlo nuovamente nella cavità premendo, chiudere lo schermo e premere il pulsante per +4 s.

### PARTE 2 (OPZIONALE) – CARICAMENTO DEL CATETERE NELL'IMPUGNATURA DELL'APPLICATORE ENDOSCOPICO STERILIZZATA

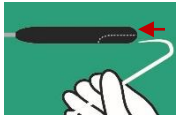


**1.** Posizionare la punta del catetere endoscopico all'estremità dell'impugnatura



**2.** Caricare e spingere per infilare l'intero catetere endoscopico



**3.** Regolare il catetere endoscopico nella posizione corretta - tutte le angolazioni sono possibili

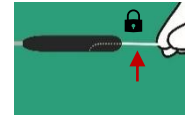


**4.** Per bloccarlo in posizione, spingere il catetere verso l'alto fino a quando fa clic


### PARTE 3 – CARICAMENTO DELLE SIRINGHE, ADESCAMENTO E INIZIO DELL'APPLICAZIONE




**1.** Premere il pulsante per avviare il caricamento delle siringhe

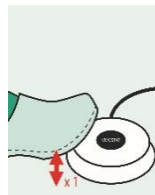

**2.** Premere il pedale una volta per adescare

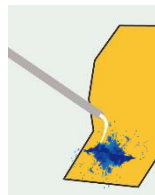

**3.** Puntare sull'angolo inferiore della carta tornasole mentre avviene l'adescamento automatico

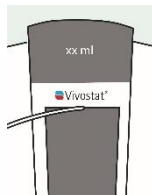

**4.** L'adescamento si arresta automaticamente e viene visualizzata la modalità spray + ml



**5.** Verificare che la miscela sia corretta sulla carta tornasole (da liquida a viscosa in 10-30 s)



**6.** Pronto per l'applicazione.