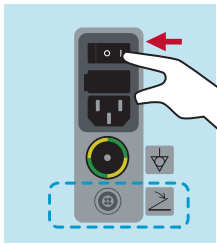
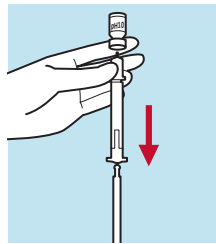
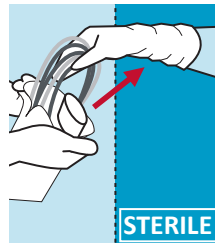
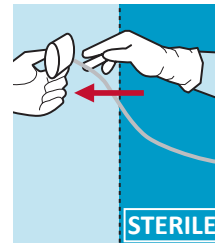
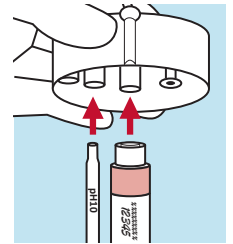
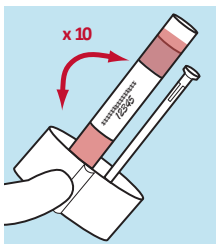
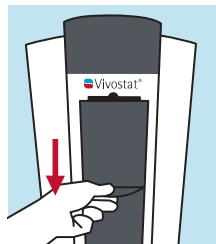
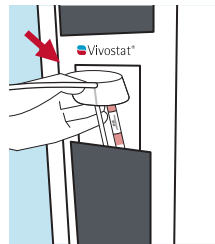
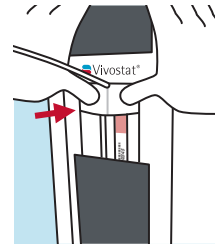
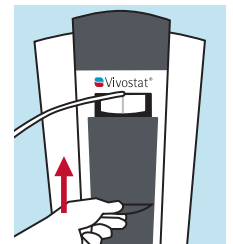
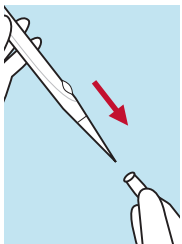
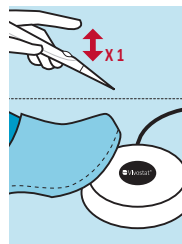
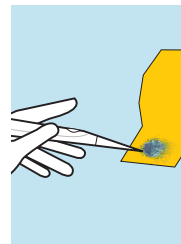
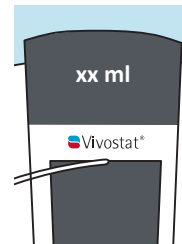
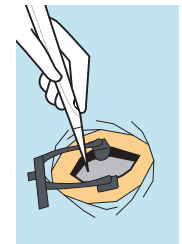
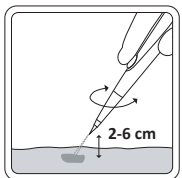
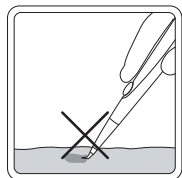
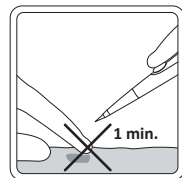
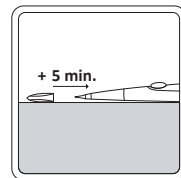
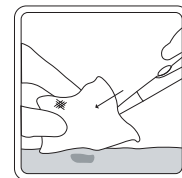


**APL 400****QUICK REFERENCE CARD
SPRAYPEN APPLICATION KIT****Vivostat®****DEL 1 – FORBERED ENGANGSAPPLIKATORENHEDEN OG APPLIKATOREN****1. Tænd applicator.**
Valgfrit: tilslut fodpedal**2. Placer 21G nålen lige indenfor pH 10 hætteglasset, træk væske ind i 1 ml sprøjten*****3. Overfør engangs-applikatoren + pH-papiret til det sterile område****4. Overfør sprøjteholderen ud af det sterile område****5. Sæt pH 10 og klæber/matrix-sprøjterne i sprøjteholderen****6. Hvis matrix: Drej sprøjteholderen frem og tilbage 10 gange*****7. Når det angives i displayet, åbnes lågen****8. Indsæt og placer sprøjteholderen****9. Tryk sprøjteholderen ind i åbningen med to fingre****10. Luk lågen****DEL 2 – ISÆT SPRØJTERNE, FYLD, OG START APPLIKATIONEN****1. Tag hættten af Spraypen****2. Tryk på knappen for at begynde isætning af sprøjterne****3. Tryk én gang på Spraypen knappen eller fodpedalen for at starte****4. Peg mod det nederste hjørne af pH-papiret under autoopstarten****5. Autoopstarten stopper automatisk, og ml + sprøjte-funktion vises****6. Kontroller korrekt blanding på pH-papir (fra flydende til tyktflydende på 10-30 sek.)*****7. Klar til anvendelse****YDERLIGERE BRUGSTIPS****Brug cirkelformede bevægelser, og sprøjt i en afstand af 2-6 cm****Sprøjt IKKE vævet, og bøj ikke Spraypens spids****Undgå af røre ved det påførte stof umiddelbart efter påføringen****Hvis påføringen standses i mere end 5 minutter, sættes hættten på Spraypen****Fjern hættten og tør Spraypens spids af, før der påføres igen***** FORSIGTIG:****1.2:** For at undgå luftbobler, der kan påvirke blandingen negativt, må nålen **IKKE** skubbes helt ind i pH 10 hætteglasset.**1.6:** Følg trinnet omhyggeligt, så blodpladerne ikke lægger sig i bunden, da de er vigtige for helingen. Hvis der går +30 minutter efter rotation, skal du rottere igen: Tryk på knappen øverst på applicatorenheden i +4 sekunder, tag sprøjteholderen ud, rotér og følg trin 1.6-1.10.**2.6:** Hvis blandingen ikke bliver tyktflydende, skal du trykke på knappen øverst på applicatorenheden i +4 sek. og kontrollere, at sprøjteholderen er placeret korrekt, og følg trin 1.6-1.10.

DENNE QRC SKAL LÆSES I SAMMENHÆNG MED PRODUKT IFU OG MASKINMANUAL.

For IFU'er og manualer, QRC sprog versioner og meget mere, besøg vores website: www.vivostat.com/application-now**CE**
0477Vivostat A/S
Borupvang 2
3450 Allerød
Danmark+45 8880 8400
info@vivostat.com
www.vivostat.com