




APL 400


FICHE AIDE-MÉMOIRE (QRC) KIT D'APPLICATION DE SPRAYPEN

Vivostat®


PHASE 1 – PRÉPARATION DU DISPOSITIF D'APPLICATION JETABLE ET DE L'UNITÉ D'APPLICATION

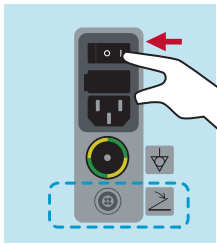


1. Mettre l'appareil en marche. En option : brancher l'interrupteur au pied

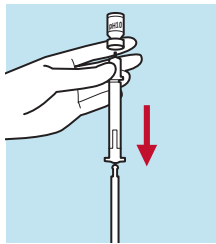


2. Placer l'aiguille 21 G juste à l'intérieur du flacon de pH 10, prélever le liquide dans une seringue de 1ml*

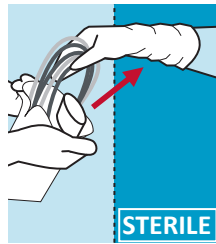


3. Transférer l'applicateur jetable et le papier pH sur le champ stérile

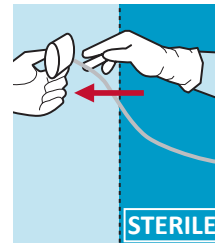


4. Sortir le porteseringues du champ stérile

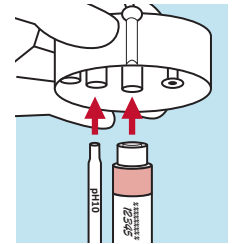


5. Insérer les seringues de pH 10 et de colle/matrice dans le porteseringues

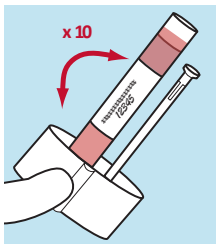


6. Pour la matrice : faire pivoter le porteseringues dans un mouvement de va-et-vient 10 fois*

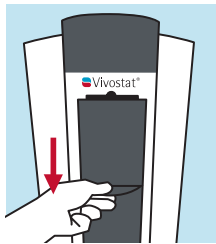


7. Lorsque l'écran l'indique, ouvrir la protection

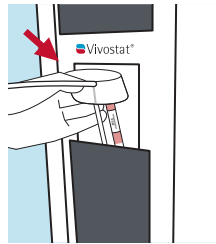

8. Insérer et bien positionner le porteseringues

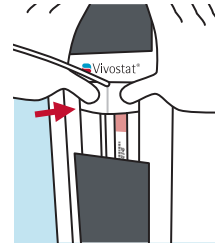


9. Enfoncer le porteseringues dans son logement avec deux doigts

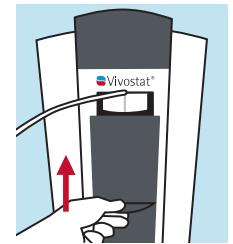

10. Fermer la protection


PHASE 2 – CHARGEMENT DES SERINGUES, AMORÇAGE ET DÉMARRAGE DE L'APPLICATION

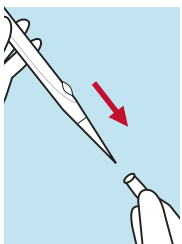


1. Retirer le capuchon du Spraypen




2. Appuyer sur le bouton pour démarrer le chargement des seringues

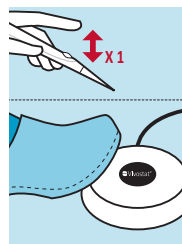

3. Appuyer sur le bouton du Spraypen ou sur l'interrupteur au pied une fois pour amorcer

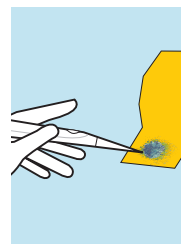


4. Diriger l'écoulement sur l'angle inférieur du papier pH et laisser l'amorçage automatique s'effectuer

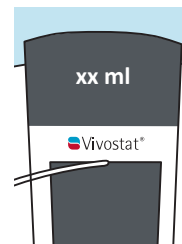

5. L'amorçage automatique s'arrête ; les ml et le mode de pulvérisation sont affichés




6. Vérifier que le mélange est correct sur le papier pH (de liquide à visqueux en 10 à 30 s)*

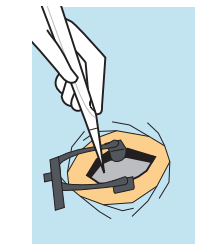


7. Le produit est prêt à l'application


CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'APPLICATION

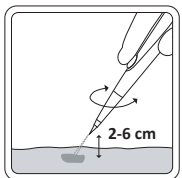


Procéder par mouvements circulaires à une distance de pulvérisation de 2 à 6 cm

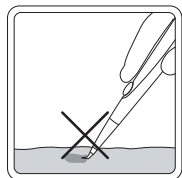


Ne PAS piquer les tissus ni plier la pointe du Spraypen

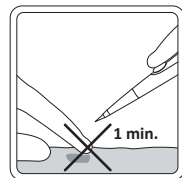

Éviter de toucher la substance pulvérisée immédiatement après l'application

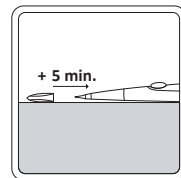

En cas d'interruption de plus de 5 minutes de l'application, remettre le capuchon sur le Spraypen

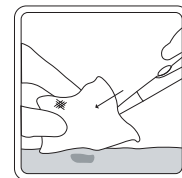

Retirer le capuchon et essuyer la pointe du Spraypen avant de reprendre l'application

* ATTENTION:

1.2: Pour éviter que les bulles d'air aient un impact négatif sur le mélange, **NE PAS** pousser l'aiguille jusqu'à l'extrémité du flacon de pH 10.

1.6: Suivre attentivement l'étape pour que les plaquettes ne se déposent pas au fond du flacon, car elles sont essentielles à la cicatrisation. Si +30 minutes se sont écoulées après la rotation, effectuer une nouvelle rotation ; appuyer sur le bouton situé sur le dessus de l'Applicateur pendant +4 secondes, retirer le porteseringue, effectuer une nouvelle rotation et suivre les étapes 1.6-1.10.

2.6: Si le mélange ne devient pas visqueux, appuyer sur le bouton situé en haut de l'unité d'application pendant +4 secondes, vérifier que le porteseringue est correctement placé et suivre l'étape 1.6-1.10.

CE QRC DOIT ÊTRE LU EN CONJONCTION AVEC L'IFU DU PRODUIT ET LE MANUEL DE LA MACHINE. Pour obtenir les IFU et les manuels, les versions linguistiques des QRC et bien d'autres informations, veuillez consulter notre site web : www.vivostat.com/application-now



CE 0477



Vivostat A/S
Borupvang 2
3450 Allerød
Danemark

+45 8880 8400
info@vivostat.com
www.vivostat.com