




APL 404

SCHEDA DI RIFERIMENTO RAPIDO (QRC)


KIT DI APPLICAZIONE SPRAYPEN - CO-DELIVERY

Vivostat®


PARTE 1 - PREPARAZIONE DEL DISPOSITIVO APPLICATORE MONOUSO E DELL'UNITÀ APPLICATORE

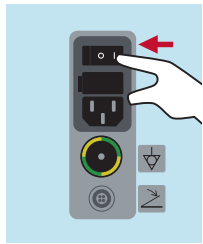


1. Accendere l'unità e collegare il pedale

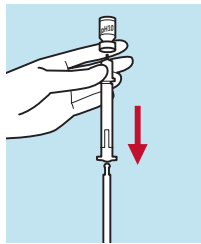


2. Inserire un ago 21g nella fiala del pH 10, prelevare il liquido in una siringa da 1 ml*

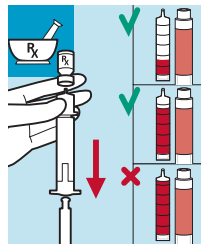


3. Preparare la soluzione di co-delivery a un livello inferiore o uguale a quello del sigillante/matrice

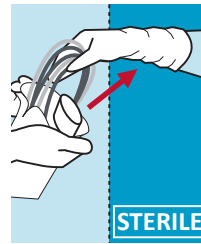


4. Trasferire l'applicatore monouso + carta tornasole nell'area sterile

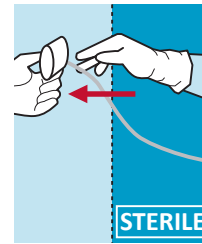


5. Rimuovere il portasiringhe dall'area sterile

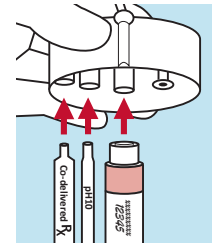


6. Inserire le siringhe di pH 10, sigillante/matrice e soluzione Co-D, nel portasiringhe

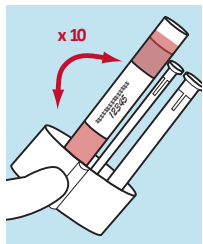

7. Per la matrice: ruotare il supporto della siringa avanti e indietro per 10 volte.*

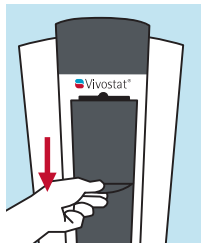


8. Quando indicato sul display, aprire lo schermo

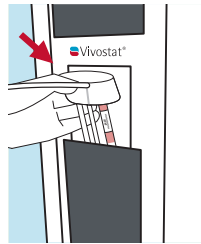


9. Inserire e posizionare il portasiringhe

Utilizzando APL 404 senza co-delivery: fare attenzione che la siringa di pH10 sia posizionata centrale e non nella cavità di co-delivery.

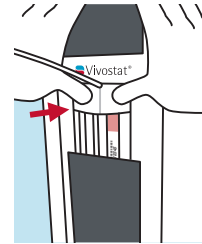


10. Premere il portasiringhe nella cavità usando due dita

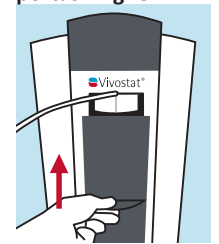

11. Chiudere lo schermo


PARTE 2 - CARICARE LE SIRINGHE, INIZIALIZZARE E AVVIARE L'APPLICAZIONE

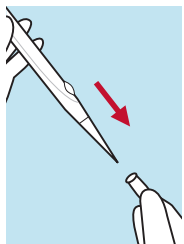


1. Togliere il cappuccio dalla Spraypen




2. Premere il pulsante per avviare il caricamento delle siringhe

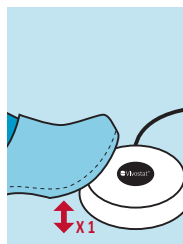


3. Premere il pedale una volta per inizializzare

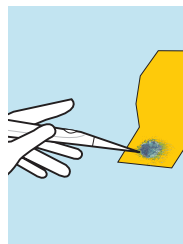


4. Puntare sull'angolo inferiore della carta tornasole mentre avviene inizializzazione automatica

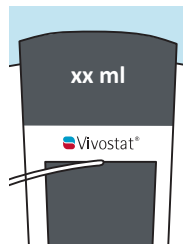

5. L'inizializzazione si arresta automaticamente e viene visualizzata la modalità spray + ml

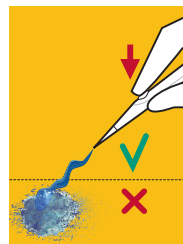


6. Verificare che la miscela sia corretta (da liquida a viscosa in 10-30 s)*

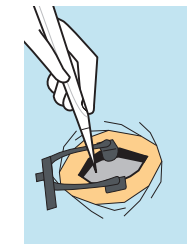


7. Pronto per l'applicazione


ULTERIORI SUGGERIMENTI PER L'APPLICAZIONE

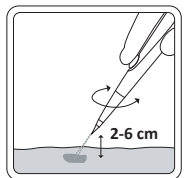


Usare movimenti circolari con una distanza di spruzzo di 2-6 cm

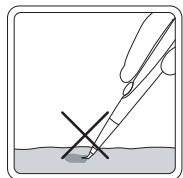


NON colpire il tessuto e non piegare la punta dello Spraypen

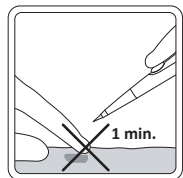

Evitare di toccare la sostanza applicata immediatamente dopo l'applicazione

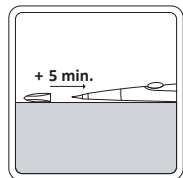

In caso di pausa superiore a 5 minuti dopo l'applicazione, rimettere il cappuccio sullo Spraypen

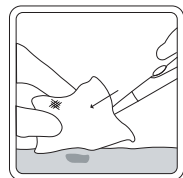

Togliere il cappuccio e pulire la punta dello Spraypen prima dell'applicazione successiva

* CAUTION:

1.2: Per evitare che bolle d'aria compromettano la miscela NON spingere l'ago in fondo alla fiala del pH 10.

1.7: Seguire attentamente il passaggio per evitare che le piastrine si depositino sul fondo, in quanto essenziali per la guarigione. Superati +30 minuti dopo la rotazione, ruotare di nuovo: premere il pulsante sulla parte superiore dell'unità applicatore per +4 secondi, estrarre il porta-siringa, ruotare e seguire i passaggi 1.7-1.11.

2.6: Se la miscela non diventa viscosa, premere il pulsante sulla parte superiore dell'unità applicatore per +4 secondi, verificare che il porta-siringa sia posizionato correttamente e seguire il passaggio 1.7-1.11.

QUESTO QRC DEVE ESSERE LETTO INSIEME ALL'IFU DEL PRODOTTO E AL MANUALE DELLA MACCHINA. Per informazioni su IFU e manuali, versioni linguistiche del QRC e molto altro ancora, visitate il nostro sito Web: www.vivostat.com/application-now.



CE 0477



Vivostat A/S
Borupvang 2
3450 Allerød
Danimarca

+45 8880 8400
info@vivostat.com
www.vivostat.com