




APL 404


# TARJETA DE REFERENCIA RÁPIDA (QRC) SPRAYPEN KIT DE APLICACIÓN – CO-DELIVERY

# Vivostat®


## PARTE 1 – PREPARAR EL DISPOSITIVO APLICADOR DESECHABLE Y LA UNIDAD APLICADORA

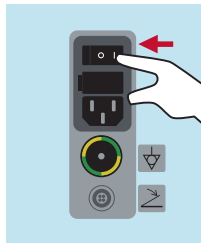


1. Encienda la unidad y conecte el pedal

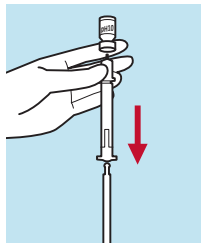


2. Ponga una jeringa de 21 G justo dentro del vial de pH 10 y extraiga líquido al interior de la jeringa de 1ml\*

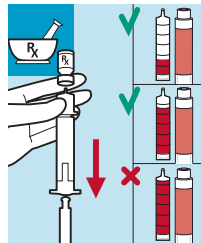


3. Preparar la solución Co-Delivery a menos o igual que el sellante/matriz

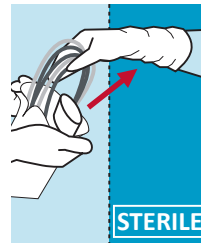


4. Lleve el aplicador desechable y el papel de pH a la zona estéril

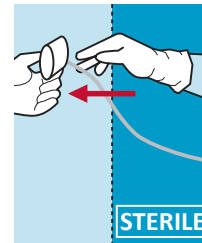


5. Saque el soporte de las jeringas de la zona estéril

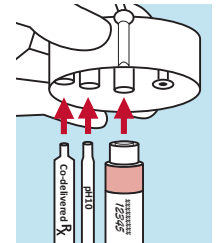


6. Inserte las jeringas de pH 10 y sellador/matriz en el soporte de las jeringas

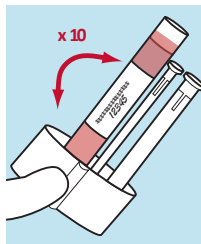

7. Para la matriz: gire el soporte de la jeringa hacia delante y hacia atrás 10 veces\*

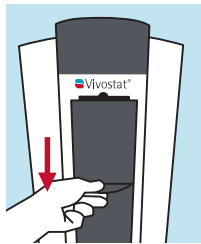


8. Cuando lo indique en la pantalla, abra el protector

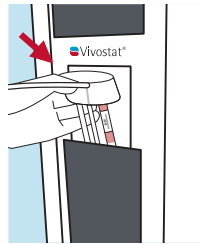


9. Inserte y coloque el soporte de las jeringas

Utilizando APL 404 sin co-delivery: tenga cuidado de que la jeringa pH10 esté colocada recta y no en la cavidad de co-delivery.

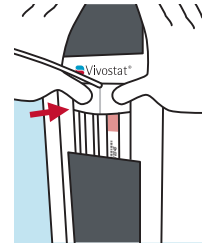


10. Introduzca el soporte de las jeringas en la cavidad utilizando dos dedos

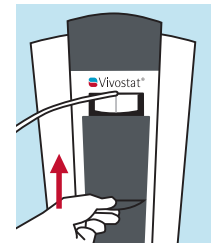

11. Cierre el protector


## PART 2 – CARGAR LAS JERINGAS, PURGARLAS E INICIAR LA APLICACIÓN

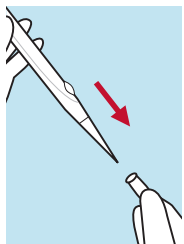


1. Retire el capuchón del instrumento Spraypen




2. Pulse el botón para empezar a cargar las jeringas

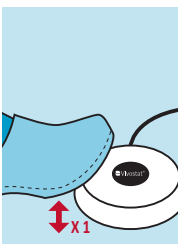


3. Pulsa el botón del pulverizador o el pedal una vez para purgar

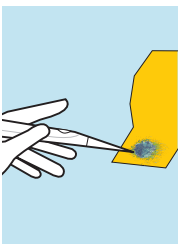


4. Apunte a la esquina inferior del papel de pH e inicie el purgado automático

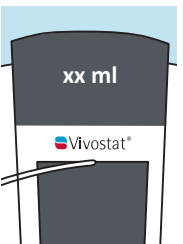

5. El purgado automático se detiene automáticamente y se muestran los ml y el modo de pulverización

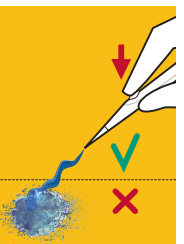


6. Verifique que la mezcla es la correcta en el papel de pH (de líquido a viscoso en 10-30 s)\*

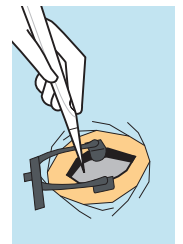


7. Preparado para la aplicación


## CONSEJOS ADICIONALES PARA LA APLICACIÓN

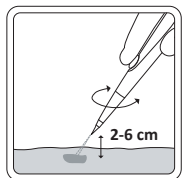


Aplique la pulverización realizando movimientos circulares a una distancia de 2-6 cm

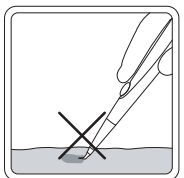


NO haga contacto con el tejido, ya que esto hará que se doble la punta del Spraypen

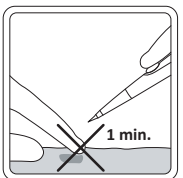

Evite tocar la sustancia inmediatamente después de la aplicación

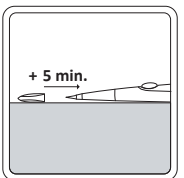

Si va interrumpir la aplicación más de 5 minutos, póngale la tapa al Spraypen

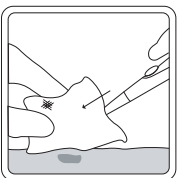

Retire la tapa y limpie la punta del Spraypen antes de reanudar la aplicación

### \* PRECAUCIÓN:

1.2: Para evitar que las burbujas de aire afecten negativamente a la mezcla, **NO** empuje la aguja hasta el final del vial de pH 10.

1.7: Siga el paso cuidadosamente para que las plaquetas no se depositen en el fondo. Son esenciales para la curación. Si transcurren más de 30 minutos después de la rotación, vuelva a rotar: pulse el botón de la parte superior del aplicador durante más de 4 segundos, saque el soporte de la jeringa, gire y siga los pasos 1.7-1.11.

2.6: Si la mezcla no se vuelve viscosa, pulse el botón de la parte superior del aplicador durante 4 segundos, compruebe que el soporte de la jeringa está colocado correctamente y siga el paso 1.7-1.11.

ESTE QRC DEBE LEERSE JUNTO CON LA IFU DEL PRODUCTO Y EL MANUAL DEL USUARIO.

Para IFUs y manuales, QRC versiones lingüísticas y mucho más, por favor visite nuestro sitio web: [www.vivostat.com/application-now](http://www.vivostat.com/application-now)



Vivostat A/S  
Borupvang 2  
3450 Allerød  
Dinamarca

+45 8880 8400  
info@vivostat.com  
www.vivostat.com