



PRO 800-5

## QUICK REFERENCE CARD MAINTENANCE TIPS

Vivostat®

### VI ANBEFALER RENGØRING AF PROCESSOR UNIT EFTER HVER PROCES

Processor Unit kan tåle følgende rengøringsmidler/  
desinfektionsmidler:

- ASP Cidex®
- EcoLab Indicin® -væske
- Dr. Schumacher Optisept®
- Isopropylalkohol
- Peroxider

**ANVEND  
IKKE  
RENGØRINGS-  
SPRAY!!!**

Bemærk, at alkohol (ethanol) > 96 % ikke må benyttes til  
at rengøre **Processor Unit**




Advarsel: Varmelampeområdet  
kan stadig være varmt!




Advarsel: Processor Unit inde-  
holder måske farligt materiale  
såsom krops væsker. Rengør i  
overensstemmelse med universel  
blodhåndterings foranstaltninger.


### AFMONTERING OG RENGØRING AF BUNDDÆKSEL, LÅGE OG CENTRIFUGEOMRÅDE

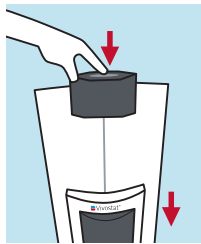


**1. Tryk på knappen  
for at åbne lågen**

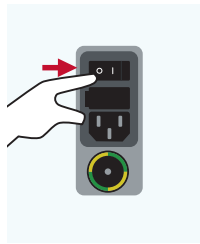


**2. Sluk på  
hovedkontakten**

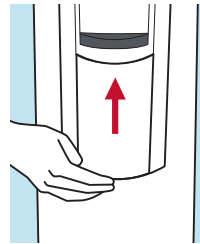


**3. Skub  
bunddækslet opad,  
frigør og fjern det**

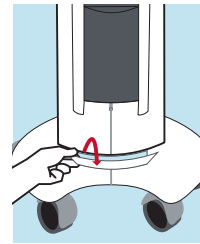


**4. Åben slisken på  
bundpladen**

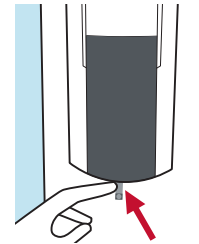


**5. Tryk på fjedren.**

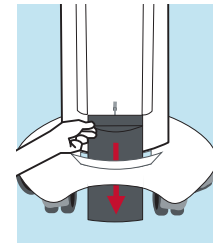

**6. Vip unit lidt  
bagud. Skub lågen  
ned**

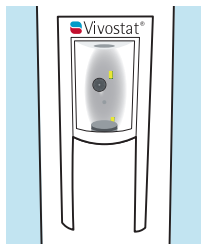

**7. Med unit vippet  
og lågen ude af  
sporet kan den blive  
fjernet**

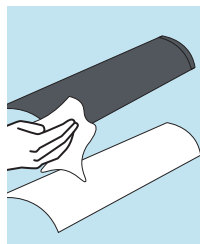

**8. Rengør lågen og  
bunddæksel med  
desinfektionsmiddel  
og blød klud**




**9. Rengør centrifuge-  
området med blød klud  
fugtet med desinfektions-  
middel. Lad det tørre.**


Den indvendige overflade har sensorer, som er  
meget fintfølelse og kræver forsigtighed, når de  
rengøres. Gnid forsigtigt, indtil desinfektionsmiddel  
er fjernet fra sensorområdet. Benyt isopropyl eller  
et af de andre godkendte desinfektionsmidler for at  
fjerne alle striber og rester fra sensorvinduerne.

Kontroller, at sensorområdet er rent, tørt og fri for  
trævler og fnug.


### KONTROLLER LÅGE OG GUMMIPAKNING – GENMONTER DELENE

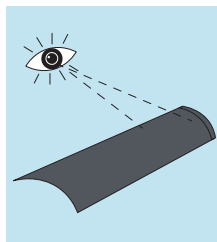


**10. Kontroller lågen  
for revner eller  
andre beskadigelser**

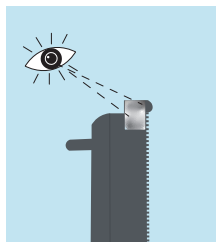

**11. Kontroller, at  
aluminiumstapen sidder  
godt fast øverst til  
venstre på lågen**

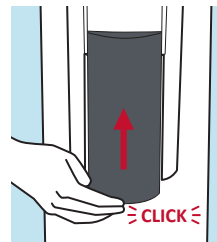

**12. Hvis alt er intakt,  
genmonter lågen, træk  
den op gennem sporet.  
Korrekt monteret, når  
fjederen "klikker"**

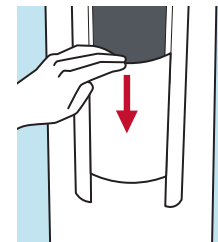

**13. Remonter  
bunddækslet ved at  
placere det i sporet  
og skubbe det nedad**

Hvis der  
findes revner  
eller skader;  
kontakt lokal  
forhandler eller  
Vivostat A/S

### RENGØR EKSTERNE SIDER

**14. Aftør den ydre skal af Processor Unit med en blød klud fugtet med  
rengøringsmiddel/desinfektionsmiddel. Undgå at ridse displayhuset.**

DENNE QRC SKAL LÆSES I SAMMENHÆNG MED PRODUKT  
IFU OG MASKINMANUAL.

For IFU'er og manualer, QRC sprog versioner og meget mere,  
besøg vores website: [www.vivostat.com/application-now](http://www.vivostat.com/application-now)



CE  
0477



Vivostat A/S  
Borupvang 2  
3450 Allerød  
Danmark

+45 8880 8400  
[info@vivostat.com](mailto:info@vivostat.com)  
[www.vivostat.com](http://www.vivostat.com)