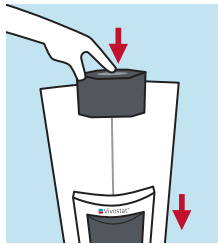
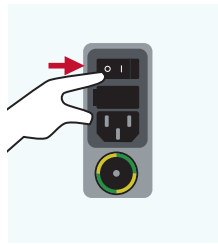
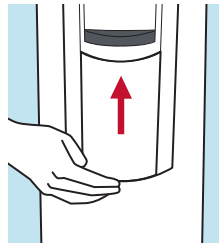
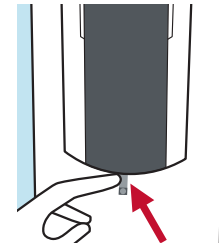
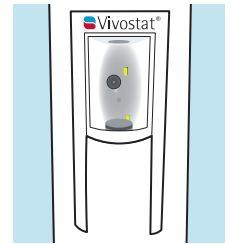
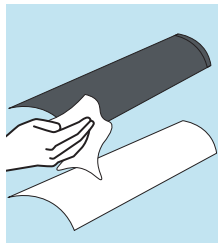
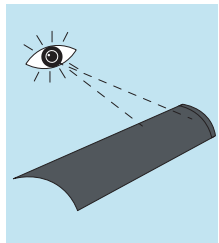
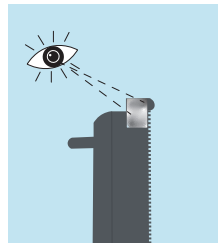
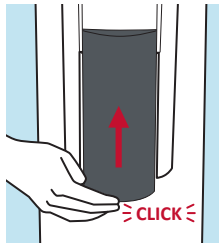
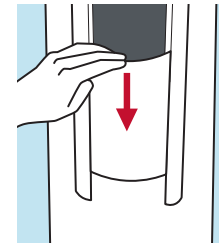


**PRO 800****QUICK REFERENCE CARD  
MAINTENANCE TIPS****Vivostat®****VI ANBEFALER RENGØRING AF PROCESSOR UNIT EFTER HVER PROCES**Processor Unit kan tåle følgende rengøringsmidler/  
desinfektionsmidler:

- ASP Cidex®
- EcoLab Indicin® -væske
- Dr. Schumacher Optisept®
- Isopropylalkohol
- Peroxider

**ANVEND  
IKKE  
RENGØRINGS-  
SPRAY!!!**Bemærk, at alkohol (ethanol) > 96 % ikke må benyttes til  
at rengøre **Processor Unit**Advarsel: Varmelampeområdet  
kan stadig være varmt!Advarsel: Processor Unit inde-  
holder måske farligt materiale  
såsom kropps væsker. Rengør i  
overensstemmelse med universel  
blodhåndterings foranstaltninger.**AFMONTERING OG RENGØRING AF BUNDDÆKSEL, LÅGE OG CENTRIFUGEOMRÅDE****1. Tryk på knappen  
for at åbne lågen****2. Sluk på  
hovedkontakten****3. Skub bunddækslet  
opad, frigør og fjern  
det****4. Tryk på fjedren****5. Skub lågen ned og ud  
af sporet****6. Rengør lågen og  
bunddækslet med  
desinfektionsmiddel  
og blød klud****7. Rengør centrifuge-  
området med blød klud  
fugtet med desinfektions-  
middel. Lad det tørre.**Den indvendige overflade har sensorer, som er meget  
fintfølelse og kræver forsigtighed, når de rengøres.  
Gnid forsigtigt, indtil desinfektionsmidlet er fjernet fra  
sensorområdet. Benyt isopropyl eller et af de andre godkendte  
desinfektionsmidler for at fjerne alle striber og rester fra  
sensorvinduerne.Kontroller, at sensorområdet er rent, tørt og fri for trævler og  
fug.**KONTROLLER LÅGE OG GUMMIPAKNING – GENMONTER DELENE****8. Kontroller lågen  
for revner eller  
andre beskadigelser****9. Kontroller, at  
aluminiumstapen sidder  
godt fast øverst til  
venstre på lågen****10. Hvis alt er intakt,  
genmonter lågen, træk  
den op gennem sporet.  
Korrekt monteret, når  
fjederen "klikker"****11. Remonter  
bunddækslet ved at  
placere det i sporet  
og skubbe det nedad**Hvis der  
findes revner  
eller skader;  
kontakte lokal  
forhandler eller  
Vivostat A/S**RENGØR EKSTERNE SIDER****12. Aftør den ydre skal af Processor Unit med en blød klud fugtet med  
rengøringsmiddel/desinfektionsmiddel. Undgå at ridse displayhuset.**DENNE QRC SKAL LÆSES I SAMMENHÆNG MED PRODUKT  
IFU OG MASKINMANUAL.For IFU'er og manualer, QRC sprog versioner og meget mere,  
besøg vores website: [www.vivostat.com/application-now](http://www.vivostat.com/application-now)CE  
0477Vivostat A/S  
Borupvang 2  
3450 Allerød  
Danmark+45 8880 8400  
[info@vivostat.com](mailto:info@vivostat.com)  
[www.vivostat.com](http://www.vivostat.com)