




DEEL 1 – VOORBEREIDING VOORDAT DE PATIËNT ERBIJ BETROKKEN IS (ongeveer 1 minuut)

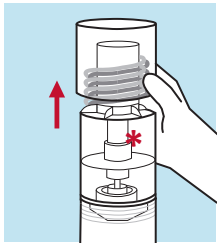

1. Verwijder de buitenste dop

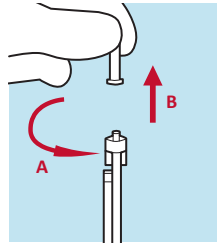


2. Verwijder de dop van de buis

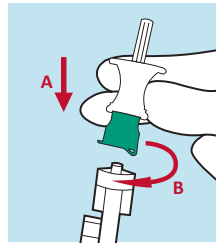

3. Open de klikdop, draai de naald op de buis, verwijder de naaldcap




4. Verwijder de citraatdop

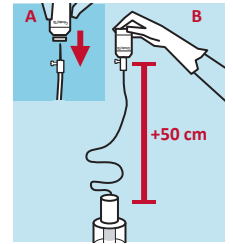


5. Draai het citraat om, prik door met de naald en leeg de flacon


DEEL 2 – BLOED AFNEMEN VAN DE PATIËNT (ongeveer 5 minuten)

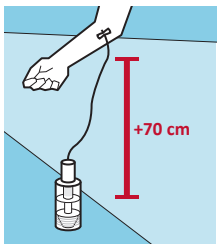


1. Breng de vasculaire toegang aan en neem 120 ml bloed af

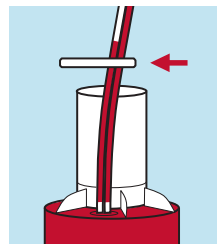


2. Wanneer de bereidingseenheid is gevuld, klemt u de lijn af

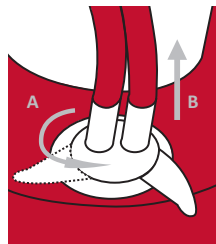


3. Draai om de klep goed te sluiten en verwijder de lijn

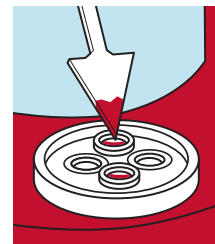


4. Reinig de klep met de wattenstaafje

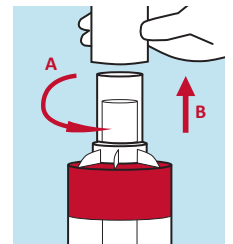


5. Verwijder de dop

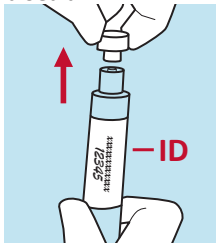

6. Neem de spuit, breng de patiënt ID aan en verwijder de dop

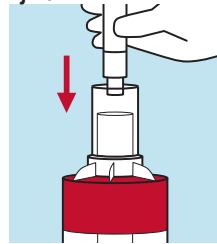

7. Breng de spuit aan in de bereidingseenheid

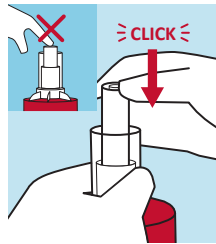

8. Klik de spuit op zijn plaats zonder de plunjer in te drukken

Ga voorzichtig te werk om lekkage en machinefouten te voorkomen:


- 1) Oefen niet te veel druk uit op de bloedstroom tijdens het vullen van de bereidingseenheid
- 2) Laat de bereidingseenheid niet te vol lopen
- 3) Sluit en reinig de klep zorgvuldig

Als u een foutcode krijgt, raadpleegt u de problemen verhelpen in de gebruikershandleiding

DEEL 3 – HET BLOED VAN DE PATIËNT VERWERKEN (ca. 25 minuten)




1. Zet het apparaat "AAN" en druk op de knop om de beschermkap te openen

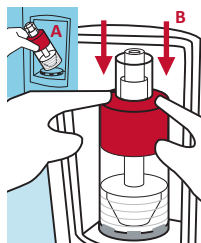


2. Plaats de bereidingseenheid met de onderkant eerst. Plaats stevig in de klemmen




3. Sluit de afscherming, druk op de knop en de verwerking wordt gestart

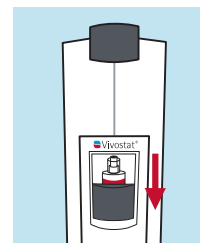

4. Als u klaar bent, neemt u de bereidingseenheid uit

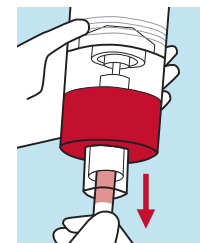

5. Draai de bereidingseenheid om en verwijder de spuit

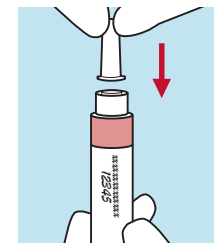

5. Plaats de dop

*KLEURCODERING BEREIDINGSEENHEID
Donkerblauw: Vivostat® Fibrin (sealant)
Blauwgroen: Vivostat® PRF (matrix)
Lichtblauw: ArthroZheal® (matrix)
Wit: Obsidian® ASG (matrix)
Obsidian® RFT (matrix)

De sealant/matrix is gebruiksklaar en kan worden aangebracht met een Vivostat® Applicator Unit.

Volg de aparte Applicatie Kit QRC.

DEZE QRC MOET GELEZEN WORDEN IN CONJUNCTIE MET DE IFU VAN HET PRODUCT EN DE MACHINEHANDLEIDING.

Ga voor IFU's en handleidingen, QRC-taalversies en nog veel meer naar onze website: www.vivostat.com/application-now

