




DEL 1 – FÖRBEREDELSE FÖRE PATIENTBEHANDLING (cirka 1 minut)

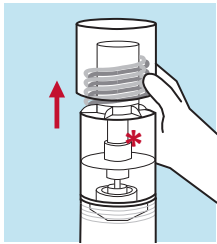

1. Avlägsna ytterlocket

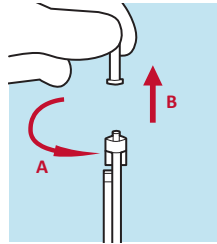


2. Avlägsna locket från slangen

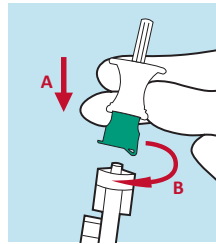

3. Öppna snäpplocket, skruva in spetsen på slangen, avlägsna spetslocket




4. Avlägsna citratflaskans lock

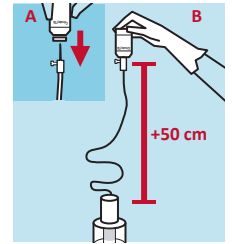


5. Vänd på citratflaskan, gör hål med spetsen och töm flaskan


DEL 2 – TA BLOD FRÅN PATIENTEN (cirka 5 minuter)

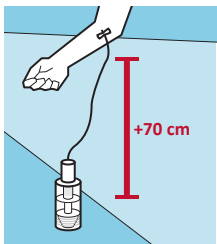


1. Förbered vaskulär åtkomst och dra 120 ml blod

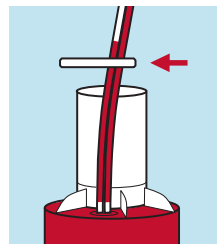


2. När prepareringsenheten är fylld, kläm åt slangen

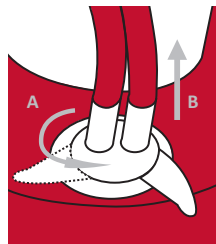


3. Vrid för att stänga ventilen ordentligt och avlägsna slangen

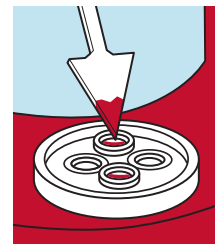


4. Rengör ventilen med en spjut-svabbar

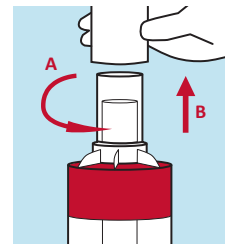


5. Avlägsna locket

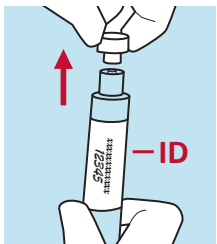

6. Ta sprutan, sätt på patient ID och avlägsna locket

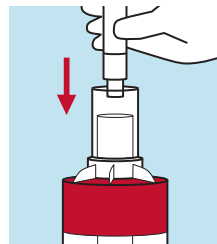

7. För in sprutan i prepareringsenheten

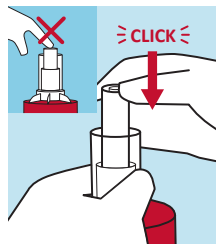

8. Klicka på plats utan att trycka på sprutkolven

För att undvika läckage och maskinfel, se noga till att:


- 1) Inte använda för högt blodflödestryck när du fyller prepareringsenheten
- 2) Inte överfylla prepareringsenheten
- 3) Stänga och rengöra ventilen ordentligt

Om du får en felkod, se felsökning i användarhandbok

DEL 3 – BEARBETA PATIENTENS BLOD (cirka 25 minuter)




1. Slå PÅ enheten och tryck på knappen för att öppna skärmen

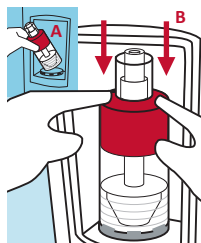


2. Sätt i prepareringsenheten säkert med bakstycket först. Placera den säkert i klämmorna




3. Stäng skärmen, tryck på knappen och bearbetningen startar

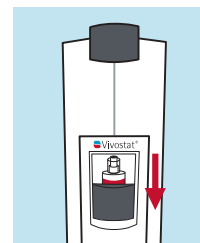

4. När den är klar, ta ut prepareringsenheten

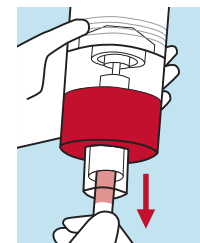

5. Vänd på prepareringsenheten och avlägsna sprutan

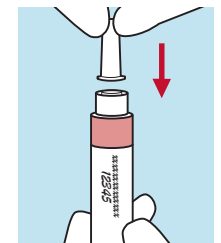

5. Sätt på locket

***FÄRGKODNING PREPARERINGSENHET**

Mörkblå:	Vivostat® Fibrin (fibrinlim)
Blågrön:	Vivostat® PRF (matris)
Ljusblå:	ArthroZheal® (matris)
Vit:	Obsidian® ASG (matris)
	Obsidian® RFT (matris)

fibrinlimen/matrisen är färdig att använda och kan appliceras med en Vivostat® applikatorerhet.

Följ separat appliceringsatts QRC.

DENNA QRC MÅSTE LÄSAS I SAMBAND MED PRODUKTENS IFU OCH MASKINENS MANUAL.

För IFU:er och manualer, QRC-språkversioner och mycket mer, besök vår webbplats: www.vivostat.com/application-now

