





## APPLIKATIONS ANBEFALING

Den korrekte rækkefølge af anvendelsen af Obsidian® ASG vises i nedenstående trin.

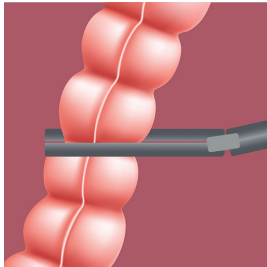


### TRIN 1

Resektion af colon med stapler eller anden standardiseret, kirurgisk procedure.

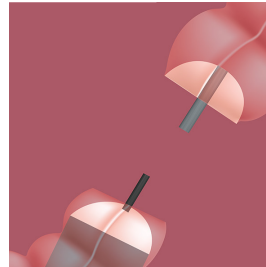

### TRIN 2


Efter vellykket placering af ambolten og indføring af den cirkulære stapler forbindes de to dele.

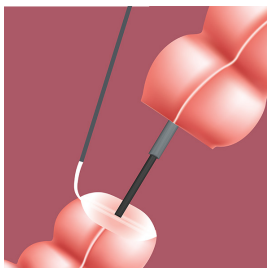

### TRIN 3


Kontroller den proksimale colons placering, og anvend mindst 2 ml Obsidian® ASG på hele den distale colonstumps overflade.

**Vigtigt:** Specielt skal de ydre kanter dækkes.

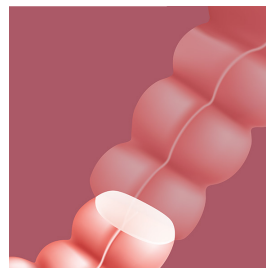


### TRIN 4

Stapleren lukkes og udløses iht. producentens anvisninger og trækkes forsigtigt tilbage gennem anus.

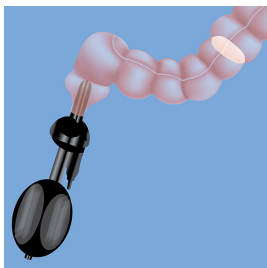


### TRIN 5

Anastomosens lufttæthed kontrolleres med en "bobbelttest - vand og luft" eller med et kontrastmiddel.

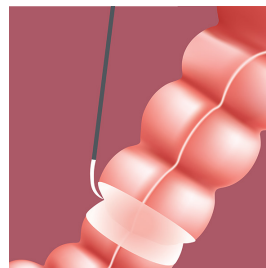


### TRIN 6

Efter saltvandsevakuering og en tilstrækkelig visualisering af anastomoseområdet forstærkes anastomosen hele vejen rundt med påføring af Obsidian® ASG 1,5 cm distalt og 1,5 cm proksimalt.

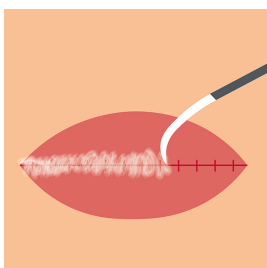

### TRIN 7

Efter fascialukning af den abdominale midtlinje under laparoskopiske procedurer eller hele incisionen i åbne procedurer, anvendes den resterende Obsidian® ASG direkte oven på fascialukningen.

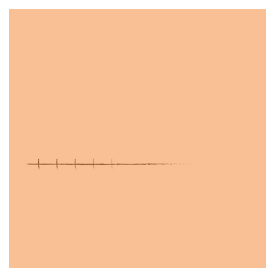

### TRIN 8

Endelig sårlukning.

### Bemærk:

Når Obsidian® ASG er påført, bør der ventes i ca. 30 sekunder, før operationen fortsættes, så Obsidian® ASG-polymeriseringsprocessen færdiggøres.

