





ANWENDUNGSEMPFEHLUNG


In den nachfolgenden Schritten wird die richtige Anwendungssequenz von Obsidian® ASG beschrieben.

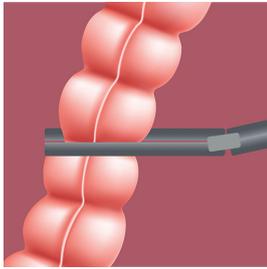

SCHRITT 1
 Resektion des Kolons mit Stapler oder einem anderen standardisierten chirurgischen Verfahren.

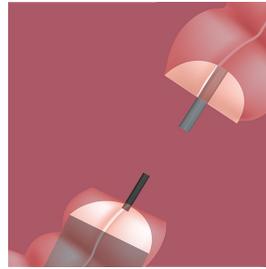


SCHRITT 2
 Die beiden Teile nach der erfolgreichen Platzierung des Anvils und dem Einführen des Zirkularstaplers verbinden.

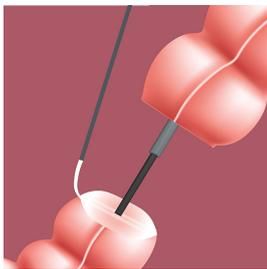


SCHRITT 3
 Die Position des proximalen Kolons überprüfen und mindestens 2 ml Obsidian® ASG über die gesamte Oberfläche des distalen Kolonstumpfs auftragen.


Wichtig: Vor allem die äußeren Ränder müssen vollständig bedeckt ein.

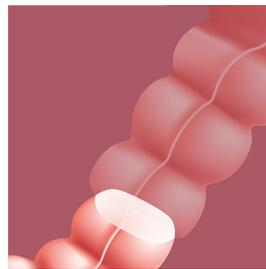


SCHRITT 4
 Der Stapler wird entsprechend den Herstelleranweisungen geschlossen und ausgelöst und vorsichtig transanal zurückgezogen.

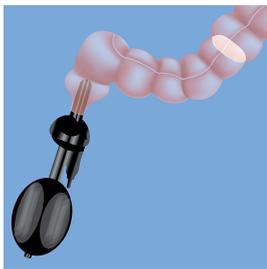


SCHRITT 5
 Die Luftdichtheit der Anastomose wird mit dem „Blasentest – Wasser und Luft“ oder einem Kontrastmitteltest überprüft.

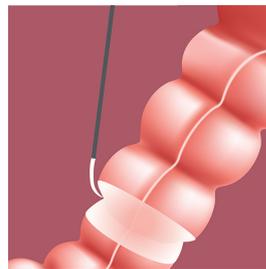

SCHRITT 6
 Nach der NaCl-Evakuierung und gründlichen Sichtprüfung des Anastomosebereichs wird die Anastomose umlaufend vollständig verstärkt, indem Obsidian® ASG 1,5 cm distal und 1,5 cm proximal aufgetragen wird.

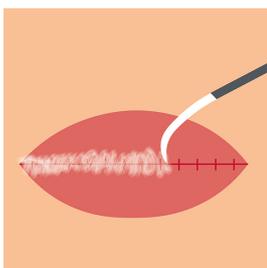

SCHRITT 7
 Nach dem faszialen Verschluss der Mittellinie des Abdomens bei laparoskopischen Verfahren bzw. der vollständigen chirurgischen Inzision bei offenen Verfahren wird das restliche Obsidian® ASG direkt auf den faszialen Verschluss aufgetragen.

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

SCHRITT 8
 Endgültiger Wundverschluss.

Anmerkung: Nach dem vollständigen Auftragen von Obsidian® ASG mindestens 30 Sekunden warten, bevor die chirurgischen Manöver fortgesetzt werden, bis der Polymerisationsprozess von Obsidian® ASG abgeschlossen ist.

