




RECOMMANDATION D'UTILISATION


L'ordre correct des étapes à suivre pour l'application d'Obsidian® ASG est présenté cidessous.

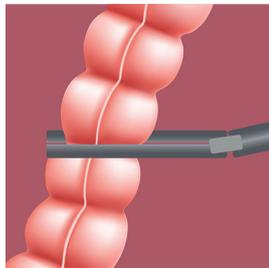


**ÉTAPE 1**  
Résection du côlon avec une agrafeuse ou selon une autre méthode chirurgicale normalisée.




**ÉTAPE 2**  
Après une mise en place réussie de l'enclume et l'insertion de l'agrafeuse circulaire, connecter les deux parties.

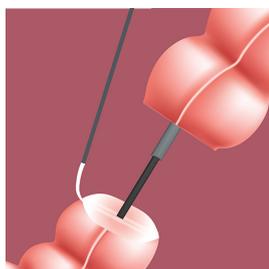


**ÉTAPE 3**  
Vérifier la position du côlon proximal et appliquer au moins 2 ml d'Obsidian® ASG sur la surface entière du moignon de côlon distal.  
**Important :** il est impératif de couvrir complètement les marges extérieures en particulier.

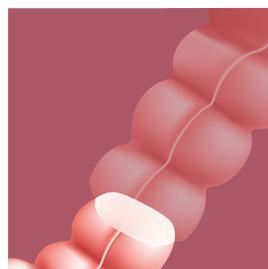


**ÉTAPE 4**  
Fermer l'agrafeuse et la déclencher conformément aux directives du fabricant, puis la rétracter avec précaution par voie transanale.

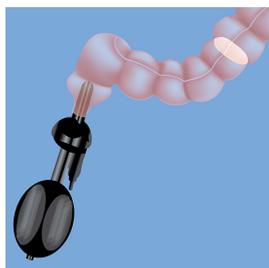


**ÉTAPE 5**  
Contrôler l'étanchéité à l'air de l'anastomose par le « test des bulles - air et eau » ou par un test avec agent de contraste.

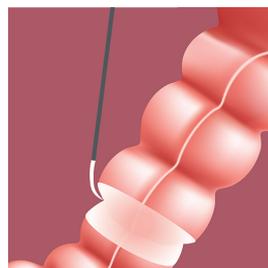

**ÉTAPE 6**  
Après évacuation du NaCl et obtention d'une visualisation adéquate de la région anastomotique, renforcer l'anastomose sur sa circonférence complète en appliquant Obsidian® ASG sur une surface de 1,5 cm dans les directions distale et proximale.

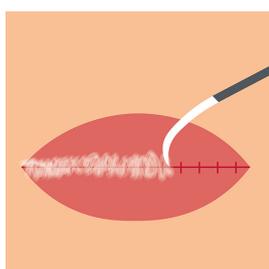

**ÉTAPE 7**  
Après fermeture des fascias de la ligne médiane abdominale lors des coelioscopies ou de l'incision chirurgicale entière lors de procédures ouvertes, appliquer le restant d'Obsidian® ASG directement par-dessus la fermeture fasciale.

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

**ÉTAPE 8**  
Fermeture finale de la plaie.

**Remarque :** Une fois l'application d'Obsidian® ASG effectuée, attendre environ 30 secondes avant de poursuivre les manoeuvres chirurgicales, afin que le processus de polymérisation d'Obsidian® ASG puisse se terminer.

